



COBI REHAB®
The Positioning Company

GEBRAUCHSANLEITUNG

Der 4-Punkt-Gehstock

Starker und funktioneller 4-Punkt-Gehstock, der für den bariatrischen Benutzer entwickelt wurde.

Der 4-Punkt-Gehstock ist für Benutzer mit einem Gewicht von bis zu 270 kg ausgelegt.



Cobi Rehab und seine Lieferanten halten alle Vorgaben gemäß der UN-Konvention zu Kinder- und Zwangsarbeit sowie die ILO-Übereinkommen 029, C132 und C182 ein.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheit	3
2. Symbolerklärung	4
3. Allgemeines	5
4. Verwendung	5
5. Einstellung	5
6. Langfristige Aufbewahrung	6
8. Entsorgung	6
7. Reinigung und Wartung	6
9. Garantie	7
10. Spezifikationen	8
11. Bestellung	8

1. Sicherheit



WARNUNG

Der 4-Punkt-Gehstock darf nicht ohne gründliche Einweisung durch geschultes Personal oder durch Personen, die im Umgang mit dem 4-Punkt-Gehstock unterwiesen wurden, benutzt werden. Durch falsche Verwendung können Nutzer zu Schaden kommen.

Die Gebrauchsanleitung muss vor der Verwendung des 4-Punkt-Gehstocks sorgfältig gelesen werden. Beachten Sie insbesondere die mit  gekennzeichneten Sicherheitshinweise.

Cobi Rehab übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden am Produkt oder für Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des 4-Punkt-Gehstocks entstehen.

Kontaktieren Sie Cobi Rehab umgehend, wenn der Stock beschädigt ist oder Mängel aufweist. Verwenden Sie niemals eigene Ersatzteile.

Cobi Rehab kann nicht für Schäden oder unangemessene Situationen verantwortlich gemacht werden, die durch Reparaturen entstehen, die ohne die schriftliche Genehmigung von Cobi Rehab durchgeführt wurden.



SICHERHEITSHINWEISE

Der 4-Punkt-Gehstock darf nur von geschultem Personal oder von Personen, die in den Gebrauch des Gehstocks eingewiesen wurden, eingestellt werden. Eine falsche Einstellung kann dem Benutzer Schaden zufügen.

Der 4-Punkt-Gehstock kann brechen oder beschädigt werden, wenn er von einem Benutzer mit einem Gewicht von über 270 kg verwendet wird.

2. Symbolerklärung

Die folgenden Symbole finden Sie in der Gebrauchsanleitung oder auf dem Produktetikett.	
	Warnung!
	Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte
	Cobi-Artikelnummer
	Seriennummer
	Produktionsjahr
	Hersteller
	Medizinprodukte, Klasse 1
	Benutzergewicht
	Konsultieren Sie die Gebrauchsanleitung
Die CE-Kennzeichnung ist auf dem Gehstock angebracht. Ein Beispiel für diese Kennzeichnung ist unten zu sehen.	

	Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522				
	XXL-Rehab 4 point cane 0201-000-000			270 KG	MADE IN TAIWAN
	0050808				
	2020		(01)05740000102124(21)0050808		

3. Allgemeines

Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Informationen über die Zielgruppe und den Gebrauch des 4-Punkt-Gehstocks. Die Gebrauchsanleitung enthält auch eine Liste mit den Spezifikationen.

Die aktuellste Version dieser Gebrauchsanleitung finden Sie auf unserer Website. Prüfen Sie, ob die jetzt vorliegende Version die neueste ist.

Wenn Sie eine Gebrauchsanleitung in einer größeren Schriftgröße benötigen, steht Ihnen das Produktblatt im PDF-Format auf cobirehab.com zur Verfügung, bei dem die Schriftgröße skalierbar ist.

Sie können sich jederzeit über die Telefonnummer +45 7025 2522 an Cobi Rehab wenden, wenn Sie weitere Informationen über den 4-Punkt-Gehstock wünschen.

Cobi Rehab behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die UDI-Nummer des 4-Punkt-Gehstocks ist auf dem Etikett des Gehstocks angegeben.

Produktsicherheitshinweise und Produktrückrufe finden Sie auf der Website <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/viktig-produktinformation/>

4. Verwendung

Beim 4-Punkt-Gehstock handelt es sich um einen extra verstärkten Stock mit einer Vierfuß-Basis, die speziell entwickelt wurde, um Benutzern mit einem Gewicht von bis zu 270 kg Unterstützung und Sicherheit beim Gehen zu bieten.

⚠ Der 4-Punkt-Gehstock kann brechen oder beschädigt werden, wenn er von einem Benutzer mit einem Gewicht von über 270 kg verwendet wird.

Der 4-Punkt-Gehstock wird in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Privathaushalten eingesetzt.

Der 4-Punkt-Gehstock kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

Lassen Sie sich immer von einem Therapeuten beraten, bevor Sie einem Benutzer einen 4-Punkt-Gehstock zuweisen.

Kontraindikationen

Es gibt keine Kontraindikationen für die Verwendung des Produkts.

5. Einstellung

Der Gehstock ist mit zwei Entriegelungsknöpfen am Stockschaft zur Höhenverstellung ausgestattet.

Stellen Sie vor der Verwendung die Höhe des Gehstocks durch Drücken der beiden Entriegelungsknöpfe ein.

⚠ Der 4-Punkt-Gehstock darf erst verwendet werden, wenn die beiden Entriegelungsknöpfe für die Höhenverstellung vollständig eingerastet sind.

Das Innenrohr kann sich lösen, wenn der Clip nicht korrekt sitzt. Dies kann dazu führen, dass das Innenrohr im Außenrohr herunterrutschen kann.

6. Langfristige Aufbewahrung

Der 4-Punkt-Gehstock sollte im Dunkeln und bei Temperaturen zwischen -10 °C und +50 °C aufbewahrt werden.

7. Reinigung und Wartung

7.1 Reinigung und Desinfektion

Der 4-Punkt-Gehstock kann mit Wasser und mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel gereinigt werden.

4-Punkt-Gehstöcke können auch mit z. B. Wet Wipe 70 % oder einem chlorhaltigen Produkt mit einer Chlorkonzentration von 1000–1200 ppm desinfiziert werden.

Desinfizieren Sie den 4-Punkt-Gehstock vor jedem Benutzerwechsel. Dies ist wichtig, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Etwaige lokal geltende Vorschriften zur Reinigung und Wartung sind unbedingt einzuhalten.

Die beiden Entriegelungsknöpfe müssen regelmäßig geprüft und ggf. ausgetauscht werden.

 Wenn die beiden Entriegelungsknöpfe nicht wie vorgeschrieben geprüft werden, kann es zu

8. Entsorgung

Wenn der 4-Punkt-Gehstock nicht mehr verwendet wird, muss er umweltgerecht entsorgt werden.

Wenden Sie sich an Cobi Rehab oder Ihre Gemeinde, um weitere Informationen zur Entsorgung zu erhalten.

9. Garantie

Cobi Rehab garantiert, dass der 4-Punkt-Gehstock bei Auslieferung einwandfrei ist. Sollte der Gehstock wider Erwarten beim Erhalt Mängel aufweisen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte sofort an Cobi Rehab.

Die Garantiezeit für 4-Punkt-Gehstöcke beträgt ab Kaufdatum ein Jahr und deckt Fabrikationsfehler oder Mängel zum Zeitpunkt der Lieferung ab. Die Rechnung dient als Garantienachweis.

Die Garantie gilt nicht:

- für Produkte, bei denen die Seriennummer, Chargennummer o. ä. entfernt oder wesentlich beschädigt wurde.

- für Produkte, die durch nicht autorisiertes Personal repariert wurden.

9.1 Unbeabsichtigtes Ereignis

Jeder Vorfall, der in Verbindung mit der Verwendung des 4-Punkt-Gehstocks auftritt, muss Cobi Rehab gemeldet werden.

9.2 Nach Ablauf der erwarteten Lebensdauer

Nach Ablauf der erwarteten Lebensdauer ist es wichtig, dass vor der weiteren Verwendung eine Gesamtprüfung des Produkts vorgenommen wird.

Nach Ablauf der erwarteten Lebensdauer kann Cobi Rehab keine Garantie für die Eignung und Sicherheit des Produkts übernehmen, da Cobi Rehab keinen Einfluss darauf hat, wie das Produkt verwendet und abgenutzt wird.

Die Garantie deckt Folgendes nicht ab:
- Verschleißteile.

Die Garantie gilt nicht, wenn Cobi Rehab feststellt, dass der 4-Punkt-Gehstock unsachgemäß behandelt wurde.

Bei Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch werden sowohl der Service als auch die verwendeten Ersatzteile in Rechnung gestellt.

Cobi Rehab kann nicht für Schäden jeglicher Art haftbar gemacht werden.

⚠ Mangelnde Wartung kann das Produkt beschädigen, seine Haltbarkeit verkürzen oder die Leistung des 4-Punkt-Gehstockes beeinträchtigen.

10. Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	270 kg
Höhenverstellbar	710-930 mm
Gewicht	1,5 kg
Maße der Basis	15 x 22 cm
Reflektoren	Ja
Material	Chrom-Molybdän-Stahl/SAE41-30
Griff	TPR - Thermoplastischer Gummi
ISO-Klassifizierung	ISO 12 03 16 - 03
Lebenserwartung des Produkts	7 Jahre
Risikoklasse	I
UDI-DI	5740000102858
Basis-UDI	5740000100010MV
Die Oberflächentemperatur des 4-Punkt-Gehstocks kann steigen oder fallen, wenn das Rohr äußeren Kälte- und Wärmeeinflüssen ausgesetzt wird.	

11. Bestellung

Modell	Artikelnummer
Der 4-Punkt-Gehstock	0201-000-000



COBI REHAB[®]
The Positioning Company



HERSTELLER UND HÄNDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Dänemark
+45 7025 2522
cobirehab.com