






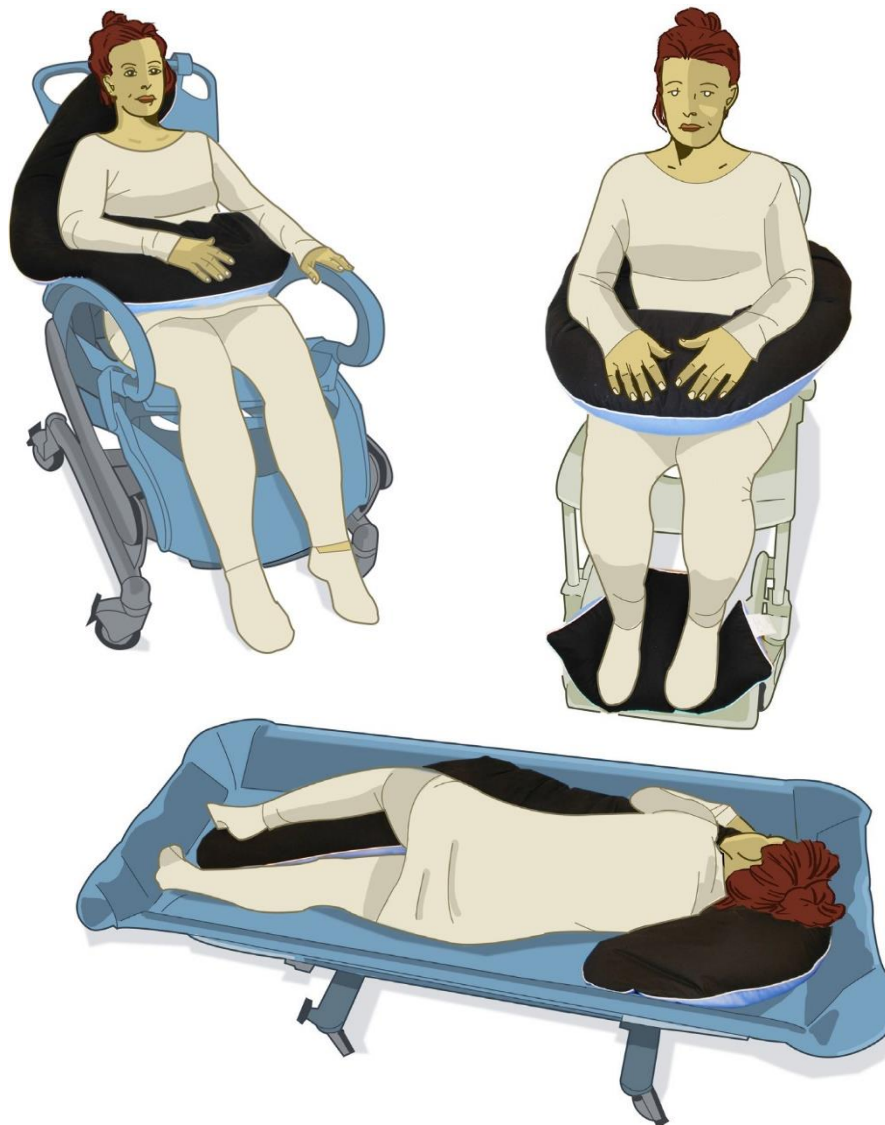




Tumle hygienkuddar

Positionering i våt miljö



Att duscha i en hygienstol eller duschbrits innebär många gånger en otrygg situation för både användare och den som hjälper till. När man använder TUMLE hygienkuddar kan man skapa trygghet och säkerhet genom att minska risken för att användaren glider och de får en mjuk och behaglig kudde som inte bara stödjer utan också gör situationen mindre utlämnad.

TUMLE hygienkudde är framtagen för att användas i våta miljöer. Se nästa sida för mer information om hur du kan använda TUMLE hygienkudde. Om ni önskar mer information om TUMLE får ni gärna kontakta URIFORM. Vi är också behjälpliga med utprovningar med TUMLEs alla olika kuddar.

modell	produktnamn	cm	cm	art nr	Beskrivning och förslag på användning
	Liten halvmåne	21	47	9601	Litet, stabilt stöd längs bålen i hygienstol eller nackstöd på duschbräts.
	Nackflytkudde	37	56	9602	Kompletterar befintligt huvudstöd i hygienstol eller på duschbräts. Stabiliserar och centrerar huvud/nacke.
	Bananflytkudde S	50	90	9603	Stöd under förlamad arm och i sidan av överkroppen. Underarmsstöd för båda armarna i knät. Utfyllnad bakom nacke och axlar.
	Bananflytkudde M	62	110	9604	Banankudde M och L stödjer hela kroppen både i hygienstol och duschbräts. Fungerar som utfyllnad för att stabilisera kring en smal person. Placeras bakom nacken och stödjer överkroppen på varje sida instoppad innanför armstöden. Alternativt kan den placeras från nacken och ner under ena armen framför personen. Stödjer längs med kroppen för att få ett säkert magliggande i duschbräts vid tvätt av ryggen.
	Bananflytkudde L	76	125	9605	
	T-flytkudde S	38	60	9703	T-kuddar separerar/centrerar och stabiliserar ben och fötter både i hygienstol och på duschbräts. Ger stöd för felställda fötter och fyller ut om man inte når ned ordentligt.
	T-flytkudde L	50	78	9704	
	Tvättpåse S	38	52	9802	S passar för 9601, 9602, 9703 i vanlig tvättmaskin. M passar för 9603, 9704 i vanlig tvättmaskin. L passar för 9604, 9605. OBS endast i industritvätt maskin.
	Tvättpåse M	52	66	9803	
	Tvättpåse L	74	72	9804	

Produktinformation

Fyllnadsmaterial: Polystyren Ytterhölje: Polyestertyg och polyester

Skötselråd: Efter varje användning, spola igenom kudden noga. Droptorka så fort som möjligt. Alternativ använd torkskåp max 60°C.

Vid behov kan kudden tvättas i maskin max 60°C. Tvättpåse ska användas. Vanligt förekommande tvättmedel för hushåll kan användas. Använd INTE sköljmedel.

Temperaturer över 70°C skadar kuddens fyllning.

Cobi Rehab AB
Rålamsvägen 17
11259 Stockholm
Telefon 08-702 97 74
info@cobirehab.se
www.cobirehab.se