



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

BRUKSANVISNING

Bariatriskt Gåstativ med och utan hjul

Starkt och funktionellt gåstativ speciellt utvecklat till bariatrisk användare.

Bariatriskt Gåstativ med och utan hjul är anpassat till användare som väger upp till 270 kg.



Cobi Rehab och Cobi Rehabs leverantörer följer FN:s konventioner om barn- och tvångsarbete och ILO 029, C132 samt C182.

Innehåll

1. Säkerhet.....	3
2. Symbolförklaring.....	4
3. Generellt	5
4. Användning.....	5
5. Inställning.....	5
6. Långtidsförvaring	6
7. Rengöring och underhåll	6
8. Bortskaffande.....	6
9. Garanti.....	7
10. Specifikationer	8
11. Beställning	8

1. Säkerhet

VARNING

Bariatriskt Gåstativ får inte användas utan instruktion från utbildad personal eller av personer som har fått instruktion i användandet av Bariatriskt Gåstativ. Vid felaktigt bruk kan användaren komma till skada.

Bruksanvisningen ska läsas grundligt innan Bariatriskt Gåstativ tas i bruk. Rikta speciellt uppmärksamhet vid säkerhetsvägledning markerade med .

Cobi Rehab påtager sig inget ansvar för eventuella skador på produkten eller för personskador förorsakade av felaktig användning av Bariatriskt Gåstativ.

Kontakta Cobi Rehab omgående om Bariatriskt Gåstativ är skadat eller om delar saknas. Använd aldrig egna reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador eller för oförutsedda situationer som uppstår efter olämpliga reparationer gjorda på produkten utan skriftlig tillåtelse från Cobi Rehab.

SÄKERHETSVÄGLEDNING

Bariatriskt Gåstativ bör ställas in av utbildad personal eller av personer som fått en instruktion i bruket av Bariatriskt Gåstativ. Felaktig inställning kan skada användaren.

Bariatriskt Gåstativ kan ta skada om den används av användare som väger över 270kg.

Bariatriskt Gåstativ får inte användas innan clipsen till höjdställningen är helt på plats. Det kan då få till följd att det inre röret faller in i det yttre röret.

Se till att Bariatriskt Gåstativ står likbent och att alla ben är justerade till samma höjd.

Se till att höjden på Bariatriskt Gåstativ är korrekt justerat till användarens behov.










Se till så att låsmekanismerna fungerar korrekt.












Använd inte Bariatriskt Gåstativ i badbassänger, i duschen eller i andra vattenmiljöer. Det kan resultera i korrosion av gåstativets delar som leder till skada av Bariatriskt Gåstativ, som på sikt riskerar att skada användaren.

Undvik halt eller blött golv samt trappor och andra hinder.

Doppskon som används ska vara av god standard. Byt ut dessa när det behövs.

2. Symbolförklaring

Följande symboler finns i bruksanvisningen eller på produktens etikett	
	Varning!
	Försäkran om överensstämmelse enligt direktivet om medicintekniska produkter EU 2017/745
	Cobi varunummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Fabrikant
	Medicinsk utrustning klass 1
	Användarvikt
	Läs manual
CE-etiketten är placerad på sidan av gästativets rör. Exempel på etikett kan ses nedan.	

	Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522			
	Walking frame XXL 0130-071-000			270 KG
	0051316		MADE IN TAIWAN	
	2020			

3. Generellt

Denna bruksanvisning innehåller viktiga upplysningar om målgruppen för och användningen av Bariatriskt Gåstativ. Bruksanvisningen innehåller också en specifikationslista.

Den senaste versionen av denna bruksanvisning finner du på vår hemsida. Kontrollera om den version du har nu är den senaste.

Om du har behov av en bruksanvisning med större teckenstorlek finns bruksanvisningen i PDF-format på www.cobirehab.se, som kan förstoras upp i teckenstorlek.

Du kan alltid kontakta Cobi Rehab på 08-702 97 74 om du önskar fler upplysningar om Bariatriskt Gåstativ.

Cobi Rehab förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna utan föregående varsel.

Gåstativets UDI-nummer framgår av etiketten på Bariatriskt Gåstativ.

Produktsäkerhetsmeddelanden och tillbakakallelse av produkter kan ses på hemsidan under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/viktig-produktinformation/>

4. Användning

Bariatriskt Gåstativ är framtaget för att ge stöd, stabilitet och trygghet under gång i inomhusmiljö för en användare som väger upp till 270 kg.

⚠ Bariatriskt Gåstativ kan välta eller ta skada om den används av en användare som väger mer än 270 kg.

Rådfråga alltid en förskrivare innan Bariatriskt Gåstativ anvisas till en användare.

Kontraindikationer

Det finns inga kontraindikationer förknippat med användningen av Bariatriskt Gåstativ.

5. Inställningar

Bariatriskt Gåstativ är vikbart, har en stabil konstruktion och kan levereras i två bredder, antingen med doppskor eller med två massiva hjulpar framtill. Ramen är tillverkad i lättmetall, och den starka konstruktionen och de vinklade benen gör den mycket stabil.

Innan användning: Justering av benhöjd

1. Ställ in höjden på varje ben utifrån användarens behov genom att trycka in tryckknappen och dra i det inre röret.
2. Se till så att samtliga ben har samma höjd.
3. När den önskade höjden är nådd låses benen genom att tryckknappen i hålet sätts helt på plats.

Under användning: Öppning av Bariatriskt Gåstativ

1. Ta tag i ett av handtagen och dra det ut från mitten av Gåstativet.
2. Upprepa med det andra handtaget. Skjut handtagen från varandra tills utlösarknappen klickar på plats.

Så här fäller du ihop Bariatriskt Gåstativ

1. Tryck ned utlösarknapparna och håll dem nere.
2. Håll knapparna nere och ta tag i ena handtaget och drag det mot mitten av Gåstativet.
3. Gör samma sak med det andra handtaget.

⚠ Se till så att golvet under Bariatriskt Gåstativ är jämnt och utan gropar.

6. Långtidsförvaring

Bariatriskt Gåstativ bör förvaras mörkt och i en temperatur mellan -10° - 50°C.

7. Rengöring och underhåll

Bariatriskt Gåstativ kan rengöras med vatten och ett allmänt rengöringsmedel. Använd aldrig organiska lösningsmedel, till exempel terpentin, aceton och bensin. Detta kan lösa upp handtagen.

Clips till höjdinställning ska kontrolleras regelbundet och bytas ut vid behov.

⚠ Bristande kontroll av clips kan förorsaka funktionsfel.

Desinficering

Bariatriskt Gåstativ kan också desinficeras med Wet Wipe 70% eller med en klorprodukt 1000-1200 ppm.

⚠ Desinficera alltid Bariatriskt Gåstativ innan det ska användas av en ny person. Detta för att undvika korskontaminering.

Eventuella lokala instruktioner kring rengöring och underhåll ska alltid följas.

8. Bortforsling

När Bariatriskt Gåstativ inte längre är i bruk ska den bortforslas på ett miljövänligt sätt.

Kontakta Cobi Rehab eller kommunen för ytterligare information kring bortforsling.

9. Garanti

Cobi Rehab garanterar att Bariatriskt Gåstativ är felfritt när det levereras. Skulle det mot förmodan finnas skador eller saknas något vid leverans, kontakta Cobi Rehab omedelbart.

Garantiperioden för Bariatriskt Gåstativ är ett år från köpedatum och täcker produktionsfel eller defekter vid leverans. Fakturan gäller som garantibevis.

Garantin gäller inte:

- produkter där serienummer, batchnummer eller liknande har försvunnit eller skadats väsentligt.
- produkter där det gjorts en reparation av icke auktoriserad personal.

Garantin omfattar inte:

- slitagedelar.

9.1 Oförutsedda händelser

Varje incident som inträffar i samband med användningen av Bariatriskt Gåstativ ska meddelas till Cobi Rehab.

9.2 Efter förväntad livslängd

Efter den förväntade livslängden är det viktigt att det görs en samlad bedömning av produkten innan fortsatt bruk.

Efter den förväntade livslängden kan Cobi Rehab inte garantera lämplighet och säkerhet för produkten då Cobi Rehab inte har någon kontroll över hur produkten använts och hur sliten den är.

Garantin gäller inte om Cobi Rehab bedömer att Bariatriskt Gåstativ blivit hanterat på ett felaktigt sätt.

Vid skada på grund av felaktig användning faktureras både för service och använda reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador av någon art.

⚠ Brist på underhåll kan skada Bariatriskt Gåstativ, förkorta livslängden eller påverka gåstativets prestanda.

10. Specifikationer

Max användarvikt	270 kg
Höjjusterbar i 2,5 cm intervall	76-101 cm
Vikt	3 kg
Total längd	50 cm
Total bredd vid ben	74/84 cm
Bredd mellan handtag	54/64 cm
Handtag	PU skum
Material	Pulverlakeret lättmetall
ISO - klassifikation	ISO 12 06 03 - 06
Produktens förväntade livslängd	7 år
Riskklass	I
UDI-DI	5740000100991/5740000101004/5740000101011/ 5740000101028
Grundläggande UDI	5740000100002MW
Yttemperaturen på Gåstativet kan stiga eller falla beroende på om den utsätts för yttre kyla eller värme.	

11. Beställning

Modell	Bredd cm	Längd cm	Artikelnummer
Bariatriskt Gåstativ utan hjul	74	50	0130-071-000
Bariatriskt Gåstativ utan hjul	84	50	0130-081-000
Bariatrisk Gåstativ med hjul	74	50	0130-074-000
Bariatriskt Gåstativ med hjul	84	50	0130-084-000



COBI REHAB[®]

The Positioning Company



TILLVERKARE

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com

LEVERANTÖR

Cobi Rehab
Rålambsvägen 17
11259 Stockholm
08-702 97 74

WWW.cobirehab.se