



BRUKSANVISNING

Gåbord

Starkt och funktionellt gåbord som är utvecklat till den bariatriska användaren.

Gåbordet är anpassat till användare som väger upp till 325 kg.



Innehållsförteckning

1. Säkerhet.....	3
2. Symbolförklaring.....	4
4. Användning.....	5
3. Generellt	5
5. Inställning.....	5
6. Långtidsförvaring	6
7. Rengöring och underhåll	6
8. Bortskaffning	6
9. Garanti.....	7
10. Specifikationer	8
11. Beställning	8

1. Sikkerhed

VARNING

Gåbordet får ikke anvendes utan instruktion av utbildad personal eller av personer som fått en instruktion i bruket av Gåbordet. Vid felaktig användning kan användaren komma till skada.

Bruksanvisningen ska läsas grundligt innan Gåbordet används. Rikta speciellt uppmärksamheten mot säkerhetsvägledningarna markerade med .

Cobi Rehab påtager sig inget ansvar för eventuella skador på produkten eller för personskador förorsakade av felaktig användning av Gåbordet.

Kontakta Cobi Rehab omedelbart om Gåbordet är skadat eller har felaktigheter. Använd aldrig egna reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador eller för oförutsedda situationer som kan uppstå efter reparationer som gjorts utan skriftlig tillåtelse från Cobi Rehab.

SÄKERHETSVÄGLEDNING

Gåbordet ska ställas in av utbildad personal eller av personer som fått instruktion i användandet av Gåbordet. Felaktig inställning kan skada användaren.

Gåbordet kan tippa eller ta skada om det används av personer som väger mer än 325 kg.




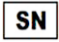





Gåbordet ska användas på ett plant och hårt underlag med en maximal lutning på 3,5°. Används Gåbordet på underlag med en lutning större än 3,5° ökar risken för att Gåbordet tippar.












Vid de tillfällen när Gåbordet används som stöd, när användaren reser sig eller sätter sig ned, ska bromsarna låsas.

Bromsarna kan vara svåra att aktivera om användaren har begränsad kraft i händerna.

Brister i översynen av skruvar och bultar kan medföra funktionsfel.

2. Symbolförklaring

Följande symboler finns i bruksanvisningen eller på produktens etikett.	
	Varning!
	Försäkran om överensstämmelse enligt direktivet för medicintekniska produkter, EU 2017/745
	Cobi artikelnummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Tillverkare
	Medicinsk utrustning, klass 1
	Användarvikt
	Läs manual
CE-etiketten är placerad på Gåbordets ram. Exempel på etikett kan ses här under.	

	Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522			
	XXL-Rehab Stand Tall 0180-076-000			325 KG
	0045418		MADE IN TAIWAN	
	2020			

3. Generellt

Denna bruksanvisning innehåller viktiga upplysningar om målgruppen för och användningen av Gåbordet. Bruksanvisningen innehåller också en specifikationslista.

Den senaste versionen av denna bruksanvisning finner du på vår hemsida. Kontrollera att den version du sitter med nu är den senaste.

Om du har behov av en bruksanvisning med större skrift finns bruksanvisningen i PDF-format på www.cobirehab.se. Där kan du förstora upp skriftstorleken.

Du kan alltid kontakta Cobi Rehab på telefon 08-702 97 74 om du önskar fler upplysningar om Gåbordet.

Cobi Rehab förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna utan föregående varning.

Gångbordets UDI-nummer framgår av etiketten.

Produktsäkerhetsmeddelanden och tillbakakallelse av produkten kan ses på hemsidan under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/viktig-produktinformation/>

4. Användning

Gåbordet är utrustad med fyra horisontella, genomgående bultar (två på vardera sida) för höjdjustering av underarmstöd och handbygel. Bultarna är låsta med handvred.

Gåbordet används på sjukhus, omsorgsboenden och i privata hem där Gåbordet ger stöd och trygghet under gång för användare upp till 325 kg. Gåbordet är anpassat för inomhusbruk.

⚠ Används Gåbordet till användare som väger mer än 325 kg kan bordet tippa eller ta skada.

⚠ Gåbordet ska användas på ett plant och hårt underlag med en maximal lutning på 3,5° grader. Används Gåbordet på ett underlag med större lutning än 3,5° grader ökar risken för att bordet tippas.

Bromsarna ska ses över och justeras var 6:e månad.

Det går att montera en syrgasbehållare på Gåbordet. Syrgasbehållaren har en längd på 101 cm och sätts fast på utsidan av gåbordets ram med hjälp av en rörhållare. Syrgasbehållaren ökar Gåbordets bredd med max 16 cm.

Montering av syrgasbehållare bör utföras av utbildad omsorgspersonal.

Rådfråga alltid en förskrivare innan Gåbordet rekommenderas till en användare.

Kontraindikationer

Det finns inga kontraindikationer förknippade med bruket av Gåbordet.

5. Inställning

Inställning av Gåbordets underarmsstöd och handbygel:

- Skruva av handvreden.
- Dra ut de två horisontella bultarna helt ur ramen.
- Ställ in underarmsstödet och handbygeln i önskad position.
- Trä bultarna igenom ramen.
- Skruva fast handvreden på bultarna.

Gåbordet får inte användas förrän handvreden är festskruvade på bultarna. Risken finns annars att underarmsstödet och handbygeln lösgör sig.

Var uppmärksam på att bultarnas båggenomgående huvuden ligger rätt i ramen. Risken finns annars att handvreden inte går att låsa korrekt.

Under användning

Bromsarna låses genom att dra upp bromshandtagen mot handbygeln och sedan trä in låsöglan över handtaget när Gåbordet står stilla.

⚠ När Gåbordet används som stöd, till exempel när användaren reser sig eller sätter sig ska bromsarna vara låsta.

⚠ Bromsarna kan vara svåra att aktivera för användare med begränsad handkraft.

6. Långtidsförvaring

Gåbordet bör förvaras mörkt och i en temperatur mellan -10° - 50°C.

7. Rengöring och underhåll

Gåbordet kan rengöras med vatten och ett vanligt rengöringsmedel.

Bultar och låsvred måste inspekteras och dras åt regelbundet.

⚠ Bristande kontroll av bultar kan förorsaka fel på produkten.

Desinficering

Gåbordet kan också desinficeras ytdesinfektion 70% eller med en klorprodukt 1000-1200 ppm.

⚠ Desinficera alltid Gåbordet innan den ska användas av en ny användare. Detta för att undvika korskontaminering.

Eventuella lokala rutiner kring rengöring och underhåll ska alltid följas.

8. Bortskaffning

När Gåbordet inte längre är i bruk ska den bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Kontakta Cobi Rehab eller kommunen för ytterligare information kring bortskaffning.

9. Garanti

Cobi Rehab garanterar att Gåbordet är felfritt när det levereras. Skulle det mot förmodan vara brister eller fel på Gåbordet vid leverans, kontakta Cobi Rehab omedelbart.

Garantiperioden för Gåbordet är ett år från köpedatum och täcker produktionsfel eller defekter vid leverans. Fakturan gäller som garantibevis.

Garantin gäller inte:

- produkter där serienummer, batchnummer eller liknande försvunnit eller skadats väsentligt.
- produkter som har reparerats av ej auktoriserad persona.

Garantin omfattar inte:

- slitagedelar.

9.1 Oförutsedda händelser

Varje oförutsedd händelse som inträffar vid bruk av Gåbordet ska rapporteras till Cobi Rehab.

9.2 Efter förväntad livslängd

Efter förväntad livslängd är det viktigt att det görs en bedömning av produkten innan fortsatt bruk.

Efter den förväntade livslängden kan Cobi Rehab inte garantera lämplighet och säkerhet av produkten, då Cobi Rehab inte har någon kontroll över hur produkten är använd eller hur sliten den är.

Garantin gäller inte om Cobi Rehab anser att Gåbordet blivit felaktigt hanterat.

Vid skada på grund av felaktig användning faktureras både service och reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador av någon art.

 Brist på underhåll kan skada Gåbordet, förkorta livslängden eller påverka Gåbordets prestanda.

10. Specifikationer

Maximal användarvikt	325 kg
Total längd	760 mm
Total bredd (med syrgasbehållare monterad)	800-920 mm
Bredd invändigt mellan handtagen	590-690 mm
Gåbordets vändradie	2000 mm
Höjjusterbar i 2,5 cm intervaller	1000-1300 mm
Vikt	20 kg
Massiva hjul	Ja, 100 mm
Ram	Pulverlackerad krom molybden stål
Underarmskuddar	PU skum
ISO - klassifikation	ISO 12 06 12 - 06
Produktens förväntade livslängd	7 år
Riskklass	I
UDI-DI	5 740 000 102 520
Grundläggande UDI	5740000100009NC
Yttemperaturen på Gåbordet kan stiga eller sjunka om den utsätts för yttre kyla eller värme.	

11. Beställning

Modell	Bredd mm	Höjd i mm	Artikelnummer
Gåbord	Invändig bredd mellan armstöd 590-690 Utvändig bredd 800 Total bredd med syrgasbehållare 920	Min. 1000 max 1300	0180-076-000



COBI REHAB[®]

The Positioning Company



TILLVERKARE

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522

WWW.cobirehab.com

LEVERANTÖR

Cobi Rehab
Rålambsvägen 17
11259 Stockholm
08-702 97 74

WWW.cobirehab.se