

Tumle Flytkuddar och Hygienkuddar **Bruksanvisning kortversion**

Denna bruksanvisning avser Tumle flytkuddar och hygienkuddar med artikelnummer 3002-XXX-000.

Tumle flytkuddar är utvecklade för träning och rehabilitering i vatten.
Tumle flytkuddar/Hygienkuddar kan också användas för positionering i duschstol eller duschbrits.

Tumle flytkuddar uppfyller inte krav för räddningsutrustning och får inte användas i stället för flyt- eller räddningsväst. Ansvar för den badandes säkerhet, drunkningsrisk eller andra skador åligger alltid assisterande personal, oavsett om Tumle flytkuddar varit i användning eller ej.

Efter användning skall kudden sköljas rikligt med vatten och placeras luftigt med nätsidan vänd nedåt så att vatten lätt kan rinna ur. Låt sedan kudden droptorka. Placera inte kuddar ovanpå varandra. Skall kuddar packas för transport måste de först vara helt torra då risk för mögel annars föreligger. Förvara helst kuddarna hängande.

Kuddarna kan vid behov tvättas i maskin i 60°C. Tvättpåse **måste** användas.
Använd INTE sköljmedel, kemtvätt, lösningsmedel eller blekmedel.
Var uppmärksam på att inte använda desinfektionsmedel eller rengöringsmedel som har ett PH värde över 11,4.
Kuddarna kan torkas i torkskåp max 40°C.

OBS! Kulorna i fyllningen smälter vid 71°C.

MATERIAL

Fyllning: Polystyrenkulor
Överdrag: översida: 100% polyester
Överdrag: undersida: 100% polyesternet

Tumle flyt- och hygienkuddar har ISO-kod 093339 och 300933-04
UDI-DI: 5740000100022N4

Vid användning i hygientsituation rekommenderas att kudden är personbunden.

Undvik skarpa kanter och spetsiga föremål mot kuddarna.

Om det går håll på kuddarna, så att fyllningen kommer ut, mister kuddarna flytkraft och positionerings-möjligheter och skall kasseras.

Kontrollera regelbundet kuddarna avseende skador.

Kuddarna kan användas i klorhaltigt bassängvatten.
Undvik användning utomhus i sjö- eller havsvatten få föroreningar kan orsaka mögel.

Använd aldrig badoljor tillsammans med Tumle flytkuddar/hygienkuddar.

Kuddarna är märkta med artikelnummer, produktnamn, tvätthanvisningar och streckkod, samt anger år och månad för tillverkning.

Tumle flytkuddar deponeras till förbränning med vanligt hushållsavfall.

