



COBI REHAB
The Positioning Company

Tumle Hygienkuddar

Positioneringskuddar för hygiensituation

Modell	Produktnamn	Cm	Cm	artikelnr	Beskrivning och förslag på användning
	Hygienhalvmåne	21	47	3002-9601-000	Litet, stabilt stöd längs bålen i hygienstol eller nackstöd på duschbrits.
	Nackflytkudde	37	56	3002-9911-000	Kompletterar befintligt huvudstöd i hygienstol eller på duschbrits. Stabiliserar och centrerar huvud/nacke.
	Bananflytkudde S	50	90	3002-9811-000	Stöd under förlamad arm och i sidan av överkroppen. Underarmsstöd för båda armarna i knät. Utfyllnad bakom nacke och axlar.
	Bananflytkudde M	62	110	3002-9111-000	Banankudde M och L stödjer hela kroppen både i hygienstol och duschbrits. Fungerar som utfyllnad för att stabilisera kring en smal person. Placeras bakom nacken och stödjer överkroppen på varje sida instoppad innanför armstöden. Alternativt kan den placeras från nacken och ner under ena armen framför personen. Stödjer längs med kroppen för att få ett säkert magliggande i duschbrits vid tvätt av ryggen.
	Bananflytkudde L	76	125	3002-9101-000	
	T-flytkudde S	38	60	3002-9027-000	T-kuddar separerar/centrerar och stabiliserar ben och fötter både i hygienstol och på duschbrits. Ger stöd för felställda fötter och fyller ut om man inte når ned ordentligt.
	T-flytkudde L	50	78	3002-9017-000	
	Tvättpåse S	38	52	3002-9802-000	S passar för 3002-9601-000, 3002-9911-000 & 3002-9027-000 i vanlig tvättmaskin. M passar för 3002-9811-000 och 3002-9017-000 i vanlig tvättmaskin. L passar för 3002-9111-000 och 3002-9101-000. OBS behöver vara en större tvättmaskin.
	Tvättpåse M	52	66	3002-9803-000	
	Tvättpåse L	74	72	3002-9803-000	

Produktinformation

Fyllnadsmaterial: Polystyren Ytterhölje: Polyestertyg och polyester

Skötselråd: Efter varje användning, spola igenom kudden noga. Dropptorka så fort som möjligt. Alternativ använd torkskåp max 60°C.

Vid behov kan kudden tvättas i maskin max 60°C. Tvättpåse ska användas. Vanligt förekommande tvättmedel för hushåll kan användas. Använd INTE sköljmedel.

Temperaturer över 70°C skadar kuddens fyllning.