



modell	produktnamn	cm	cm	art nr	Beskrivning och förslag på användning
	Halsflytkrage XS	50	26	3002-9421-000	<p>Halsflytkragen är formad som en ring som kan slutas tätt runt halsen. Den används för användare som flyter på rygg. Under bakhuvudet är en fyrkantig platta formad som ger extra flytkraft och stöd för att motverka att huvudet pressas under vattenytan. Från hakan ned över bröstkorgen löper två parallella flytkuddar. Ett nedre band löper bakom ryggen från sida till sida på kudden som lyfter bröstkorgen i vattenytan. Halsflytkragen finns i fyra storlekar.</p> <p><b>Halsflytkragen är ingen flytväst / räddningsväst.</b></p>
	Halsflytkrage S	55	30	3002-9415-000	
	Halsflytkrage M	60	37	3002-9411-000	
	Halsflytkrage L	65	42	3002-9401-000	
	Kort Halsflytkrage XS	40	26	3002-9521-000	<p>Samma som halsflytkrage 9421 men utan den stora plattan bakom bakhuvudet. Nackenkan därför föras längre bakåt och halsen sträckas ut, vilket för vissa användare underlättar andningen. Stabiliteten i sidled är lika som för 9421 men huvudet flyter mer horisontellt.</p> <p><b>Kort Halsflytkrage är ingen flytväst / räddningsväst.</b></p>
	Kort Halsflytkrage S	45	30	3002-9515-000	
	Kort Halsflytkrage M	50	37	3002-9504-000	
	Kort Halsflytkrage L	55	42	3002-9501-000	
	Liten Halvmåne	21	47	3002-9601-000	Nackflytkudden är formad för att ligga stadigt i nacken vid ryggsim men passar också bra där extra flytkraft saknas, till exempel under svanken i ryggläge, under magen i bröstläge, under en överarm, ben eller fot. Nackflytkudden finns i en storlek.
	Nackflytkrage	37	56	3002-9911-000	Nackflytkudden är formad för att ligga stadigt i nacken vid ryggsim. Kudden passar dock bra överallt där extra flytkraft saknas, till exempel under svanken i ryggläge, under magen i bröstläge, under en överarm, under ett ben eller en fot. Nackflytkudden finns i en storlek.
	Bananflytkudde S	50	90	3002-9811-000	<p>Bananformade flytkuddar har mycket stor flytkraft. De två större kuddarna kan med svårighet sänkas under vattenytan med två vuxna persons belastning. Kuddarna placeras som stöd runt användaren vid olika positioner i bassängen. Vid ryggsim placeraskudden under huvud, skuldror och armar. Underarmarna tillåts falla utanför kudden som på så sätt hålls på plats. Vid magsim ligger användaren med huvud och skuldror vilande på kudden. Armarna placeras framåt över kudden och kuddens båda "ben" följer kroppen mot midjan. Vid stå- eller gåövning placeras kudden under användarens armhålor som enbadring. Tippas huvudet framåt tar kudden emot och munnen hålls utan svårighet ovanför vattenytan.</p>
	Bananflytkudde M	62	110	3002-9111-000	
	Bananflytkudde L	76	125	3002-9101-000	
	T-flytkudde S	38	60	3002-9027-000	T-formade flytkuddar används som flythjälp i knäveckan där kudden håller samman benen men sårar knäna vid spasticitet. T-kudden passar också bra som stöd under smalben och fötter. Placeras T-kudden under hakan och övre delen av bröstkorgen vid magläge, kan huvudet vila över vattenytan. Kudden räcker ut till armhålan och ger stöd under överarmarna som kan riktas framåt.
	T-flytkudde L	50	78	3002-9017-000	
	Blomsterflytkudde Liten	Inre dia. 20	60	3002-9600-000	<p>Blomsterflytkudden har samma funktion som en badring. Man kan flyta avslappnat eller vara aktiv i både rygg och magposition. Blomsterflytkuddens utformning gör det lättare för personen att hålla armarna tätt intill kroppen, och passar därför mycket bra för bland annat användare som har nedsatt rörelse i axlar och överarmar som kan riktas framåt.</p>
	Blomsterflytkudde Stor	Inre dia. 28	80	3002-9610-000	
	Supportflytkudde Liten		60	3002-9620-000	<p>Användaren placeras mellan kuddarna i sittande, stående eller liggande efter behov och funktionsmöjlighet. Kudden medger aktivitet i rygg- eller magliggande position. Används också för stabilitet i flytande, balansträning och för att nå önskad position i vattnet.</p>
	Supportflytkudde Stor		80	3002-9630-000	
	Tvättpåse S	38	52	3002-9802-000	<p>Tvättas i tvättpåse vid maximalt 60° C med vanligt förekommande tvättmedel för hushållet. Sköljmedel får inte användas. Efter tvätt rekommenderas torktumlning vid låg värme under längre tid, alternativt torkskåp vid maximalt 60° C. Kuddar med torrvekt över 1 kg rekommenderas inte tvätt i vanlig hushållstvättmaskin då kuddarnas höga vikt vattenfylldakan skada maskinen under inledande centrifugering.</p> <p><b>WARNING! Temperatur över 71° C skadar kuddens fyllning.</b></p>
	Tvättpåse M	52	66	3002-9803-000	
	Tvättpåse L	74	72	3002-9804-000	