




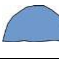














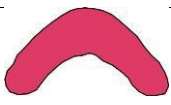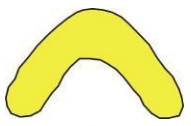












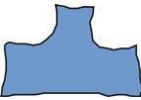


# Produktguide Tumlekudden

2020-04

Modell	Produkt-namn	Kudde utan överdrag	Bomulls-överdrag	Hygien-överdrag	Kudde med överdrag	Mått cm	Beskrivning
	Halskrage Junior	0305-321-000	0305-321-020	0305-321-010	0305-321-120	Omkrets hals 23 Bredd 16	<b>Halskragen</b> för junior och vuxen ger gott stöd åt huvudet bakåt och åt sidan. Öppningen är smal och halsvidden snäv för att passa tätt runt halsen. Kan även användas som kudde för att stabilisera huvudet i ryggliggande eller som avlastning för öra.
	Halskrage Vuxen	0305-311-000	0305-311-020	0305-311-010	0305-311-120	Omkrets hals 24 Bredd 21	
	Tunn barn-nackkudde	0305-901-000	0305-901-020	0305-901-010	0305-901-120	Utv.längd 109 Inv.längd 62 Bredd 15	<b>Barnnackkuddar:</b> Tunn barnnackkudde är lätt att forma kring hals och nacke. Kudden är tunn och så lång att ändarna räcker ner på bröstet. Tjock och Mellan barnnackkudde passar större barn och vuxna. Den ger gott stöd åt sidan och då den fyller ut tomrum mellan nacke och huvudstöd. Barnnackkuddarna kan också användas som stöd under armarna på små barn som sitter.
	Mellan barn-nackkudde	0305-921-000	0305-921-020	0305-921-010	0305-921-120	Utv.längd 90 Inv.längd 54 Bredd 15	
	Tjock barn-nackkudde	0305-911-000	0305-911-020	0305-911-010	0305-911-120	Utv.längd 114 Inv.längd 60 Bredd 21	
	Liten halvmåne	0305-301-000	0305-301-020	0305-301-010	0305-301-120	Längd 47 Bredd 22	<b>Liten halvmåne</b> fungerar mycket bra som ett stabilt bälstöd. Universell kudde som fyller ut där lite extra stöd behövs.
	Stor halvmåne	0305-801-000	0305-801-020	0305-801-010	0305-801-120	Inv.längd 79 Bredd 33	<b>Halvmånekudden</b> används främst som stöd under arm och hand. Stor halvmåne är ett utmärkt alternativ till hemplegiarinstöd med ett stabilt bälstöd. Fungerar också bra som stöd bakom skuldror och nacke för en användare med kyfos. Tjock halvmåne kan ersätta ett rullstolsbord och ger ett flexibelt och stabilt stöd för bål och underarmar.
	Tjock halvmåne	0305-811-000	0305-811-020	0305-811-010	0305-811-120	Inv.längd 86 Bredd 40	
	Liten banan	0305-111-000	0305-111-020	0305-111-010	0305-111-120	Inv.längd 144 Bredd 40	<b>Banankudden</b> är en stor formbar kudde för stöd i liggande och sittande. Vid liggande på sidan ger banankudden stöd längs hela ryggen, runt stussen och ut mellan benen. Den kan även ge stöd framifrån mot bröst och mage i sidoliggande. Vid rygläge ger banankudden stöd och avlastning runt bäckenet eller under skuldror och huvud med stora möjligheter till individuell positionering.
	Stor banan	0305-101-000	0305-101-020	0305-101-010	0305-101-120	Inv.längd 148 Bredd 31	
	V-kudde	0305-151-000	0305-151-020	0305-151-010	0305-151-120	Längd 320 Bredd 30	<b>V-kudden</b> är en lång rak kudde som kan formas utefter behov. Den långa kudden tillåter stor variation vid till exempel liggande på rygg då den kan formas runt hela kroppen.
	Smal fyrkant	0305-761-000	0305-761-020	0305-761-010	0305-761-120	Längd 40 Bredd 18	<b>Fyrkantskudden</b> är en allroundkudde. Lång fyrkant kan användas som stöd från axeln längs hela sidan ner till höften vid liggande. Alla fyrkantskuddar är lämpliga att stabilisera arm och/eller ben då kudden ger ett stabilt stöd genom att den formar sig efter kroppen och underlaget. Den lilla fyrkantskudden fungerar som ett extra stöd/polstring till ett befintligt armstöd. De mindre fyrkantskuddarna kan fylla ut tomrum mot ryggstöd eller säng vid scolios. Stor fyrkantskudde är ett bra underbensstöd i liggande som ger en jämn avlastning när man behöver böja i knäna vid liggande på rygg, eller mellan benen vid liggande på sidan. Fyrkantskuddarna fungerar också bra för att underlätta andning för en person genom att alternera hur kuddarna ligger längs ryggen när man ligger på rygg.
	Kort fyrkant	0305-731-000	0305-731-020	0305-731-010	0305-731-120	Längd 35 Bredd 22	
	Liten fyrkant	0305-701-000	0305-701-020	0305-701-010	0305-701-120	Längd 60 Bredd 30	
	Stor fyrkant	0305-711-000	0305-711-020	0305-711-010	0305-711-120	Längd 73 Bredd 42	
	Lång fyrkant	0305-721-000	0305-721-020	0305-721-010	0305-721-120	Längd 110 Bredd 41	

# Produktguide Tumlekudden

2020-04

Modell	Produkt-namn	Kudde utan överdrag	Bomulls-överdrag	Hygien-överdrag	Kudde med överdrag	Mått cm	Beskrivning
	T-kudde XS	0305-6041-000	0305-6041-020	0305-6041-010	0305-6041-120	Längd 37 Bredd 27	<p><b>T-kudden</b> kan användas som ab- och adduktionsstöd i sittande och i liggande. Det går väldigt bra att använda T-kudden på fotstödet på rullstolen för att avlasta och styra felställda fötter. Genom att tömma foten på kudden kan man använda den som ett ensidigt stöd för ben genom att föra in den tömda delen under vad eller knäveck. Detta förhindrar att ett ben faller åt sidan i rullstol eller i liggande. Personer som är väldigt spända med armarna över bröstet kan lättare slappna av genom att krama T-kudden.</p>
	T-kudde S	0305-6031-000	0305-6031-020	0305-6031-010	0305-6031-120	Längd 56 Bredd 37	
	T-kudde M	0305-6021-000	0305-6021-020	0305-6021-010	0305-6021-120	Längd 63 Bredd 40	
	T-kudde L	0305-6011-000	0305-6011-020	0305-6011-010	0305-6011-120	Längd 83 Bredd 56	
	T-kudde XL	0305-6001-000	0305-6001-020	0305-6001-010	0305-6001-120	Längd 98 Bredd 61	
	Knubb-kudde	0305-511-000	0305-511-020	0305-511-010	0305-511-120	Längd 34 Bredd 24	<p><b>Knubbkudden</b> är en kilformad universal-kudde med runda hörn. Används gärna för att bygga höjd eller mellan knäna.</p>
	Kort sittkudde	0305-401-000	0305-401-020	0305-401-010	0305-401-120	Längd 73 Bredd 50	<p><b>Sittkudden</b> är en större kilformad kudde. Sittkudden kan användas för att träna balansen både för vuxna och barn. Den går även att användas som en formbar psosokudde. Sittkudden går bra att forma till en fätölj för de mindre barnen och för större barn blir det ett stabilt magläge där de kan råta ut ryggen samt underlätta andningen.</p>
	Lång sittkudde	0305-421-000	0305-421-020	0305-421-010	0305-421-120	Längd 104 Bredd 50	
	Sittsäck barn	0317-3201-000	0317-3201-020	0317-3201-010	0317-3201-120	Diam. 72 Höjd 48	<p><b>Sittsäcken</b> kan användas till att placera en användare i sittande/halvsittande/ liggande position. Den är mycket formbar med förmågan att "låsa sig" i formen efter användaren. Det går därför att röra sig utan att formen förloras och användaren glider. Det är dock viktigt att sitsäcken inte är för stor för användaren. Man kan med fördel använda andra Tumlekuddar för att ytterligare positionera efter användarens behov.</p>
	Sittsäck junior	0317-4201-000	0317-4201-020	0317-4201-010	0317-4201-120	Diam. 89 Höjd 51	
	Sittsäck vuxen	0317-5201-000	0317-5201-020	0317-5201-010	0317-5201-120	Diam. 110 Höjd 55	
	Omfamnare XS	0305-6441-000	0305-6441-020	0305-6441-010	0305-6441-120	Längd 76 Bredd 66	<p><b>Omfamnaren</b> är framtagen för att användas för personer med Huntington tillsammans med HS-fätöljen. Syftet är att möjliggöra en stabil och avslappnad sittställning. Den fungerar väldigt bra till personer som behöver en "omfamning", Omfamnaren har kardborreband som fäster när man lägger kudden omlott framtil. Den ger väldigt gott stöd i sidan både i sittande i fätölj, rullstol och i säng.</p>
	Omfamnare S	0305-6421-000	0305-6421-020	0305-6421-010	0305-6421-120	Längd 87 Bredd 70	
	Omfamnare L	0305-6401-000	0305-6401-020	0305-6401-010	0305-6401-120	Längd 95 Bredd 78	
	Trekants-kudde S	0305-221-000	0305-221-020	0305-221-010	0305-221-120	Längd 40 Bredd 12	<p><b>Trekantskudden</b> är en förhållandevis fast kudde. Den används för att stabilisera i sidorna eller i knäveck. Den kan användas bakom ryggen i sidoliggande. Man kan även använda den som ett stöd för droppfot i liggande.</p>
	Trekants-kudde M/S	0305-231-000	0305-231-020	0305-231-010	0305-231-120	Längd 55 Bredd 14	
	Trekants-kudde M	0305-211-000	0305-211-020	0305-211-010	0305-211-120	Längd 66 Bredd 20	
	Trekants-kudde L	0305-201-000	0305-201-020	0305-201-010	0305-201-120	Längd 95 Bredd 25	