



PRODUKTARK

Lasal Flydepuder

Alle har glæde af gode oplevelser i vandet.

Lasal Flydepuder til positionering i bassin anvendes under træning og ved forskellige former for vandterapi. De er udviklet specielt til funktionshæmmede børn og voksne, men kan også anvendes af personer, der ønsker ekstra støtte i vandet.

Bruges i bassiner med klorholdigt vand.



- Giver stor flydeeffekt.
- Sikrer stabilitet og tryghed, der giver øget bevægelighed og flere muligheder for træning.
- Hjælper terapeut med at kunne udføre relevante og gavnlige øvelser med bruger.
- Mange forskellige størrelser og former.



Anvendelse

Lasal Flydepuder er udviklet specielt til funktionshæmmede børn og voksne, men kan også anvendes af personer, der ønsker ekstra støtte i vandet.

Flydepuderne anvendes til positionering i bassin under træning samt ved forskellige former for vandterapi. Puderne bidrager til flere træningsmuligheder og sikrer en behagelig vandoplevelse for bruger.

Lasal Flydepuder må kun bruges i klorholdigt vand.

Produktbeskrivelse

Flydepuderne fremstilles i flere modeller og størrelser til både børn og voksne. De forskellige modeller kan anvendes enkeltvis eller kombineres alt efter hver enkelt brugers behov.

Hvilke puder og hvor mange, der skal bruges, afhænger både af aktiviteten, af brugers evner og om der anvendes andre rekvisitter eller hjælpemidler i vandet.

Flydepuderne har en stor flydeevne. De føles også meget behagelige mod huden på grund af den helt specielle sammensætning af materialerne. Det betyder en tryk og behagelig oplevelse for bruger i vandet.

Flydepuderne kan placeres omkring bruger, inden bruger sænkes ned i vandet.

Flydepuderne har en blå og en sort side. Det anbefales at den sorte side vendes ind mod kroppen.

Lasal Flydepuder findes i følgende varianter:

- Halsflydekraver: 4 størrelser
- Nakkeflydekraver: 2 størrelser
- Bananformede flydepuder: 3 størrelser
- U-formet flydepude: 1 størrelse
- T-formet flydepude: 2 størrelser
- Badeblomst: 2 størrelser
- Stabilisator: 2 størrelser

Rengøring og vedligeholdelse

Skyl flydepudernes yderside rene for klor med rigeligt rent ikke-klorholdigt vand efter brug.

Hæng flydepuderne til tørring. Den blå netside vendes nedad, så vandet frit kan løbe ud af flydepuden. Flydepudernes tørringstid er lang.

Flydepuderne kan håndvaskes med vand og sæbe eller sprittes af med et desinficeringsmiddel.

Vær opmærksom på, at pH-værdien på det anvendte desinficeringsmiddel ikke bør være højere end 11,4.



Halsflydekrave, T-formet flydepude og bananformet flydepude.



T-formet flydepude og bananformet flydepude.



Badeblomst.

Flydepuderne må ikke maskinvaskes.

Brug evt. tørreskab på max. 70° C. Højere temperatur ødelægger fyldet, da polystyrenkuglerne smelter over 71° C.

Undgå blegemidler, skyllemidler og andre rengøringsprodukter, som indeholder opløsningsmidler.

Lasal Flydepuder - oversigt

Størrelser angivet i længde x bredde x halshul



T-formet flydepude, S
Str. 63x39 cm
HMI: 64984

T-formet flydepude, L
Str. 81x54 cm
HMI: 64979



Bananformet flydepude, S
Str. 90x38 cm
HMI: 64982

Bananformet flydepude, M
Str. 98x38-33 cm
HMI: 64981

Bananformet flydepude, L
Str. 125x30-37 cm
HMI: 64983



U-formet flydepude
Str. 55x19 cm
HMI: 64986



Nakkeflydekrave, S
Str. 41x41x26 cm
HMI: 70141

Nakkeflydekrave, L
Str. 51x51x27 cm
HMI: 64985



Halsflydekrave, XS
Str. 50x34x23 cm
HMI: 64989

Halsflydekrave, S
Str. 59x39x25 cm
HMI: 64985

Halsflydekrave, M
Str. 63x42x30 cm
HMI: 70141

Halsflydekrave, L
Str. 68x46x35 cm
HMI: 64987



Badeblomst, S
Str. 68x20 cm
HMI: 72594

Badeblomst, L
Str. 77x28 cm
HMI: 72595



Flydestabilisator, S
Str. 60-37x18-25 cm
HMI: 72597

Flydestabilisator, L
Str. 93-55x24-29 cm
HMI: 72598

Specifikationer

Kuglemateriale	Brandhæmmende EPS-perler (ekspanderet polystyren)
Yderbetræk - overside	100% polyester, ej flammehæmmet
Yderbetræk - underside	100% polyester, ej flammehæmmet
Rengøring	<p>Efter brug skylles flydepudernes yderside rene for klor med rigeligt ikke-klorholdigt vand.</p> <p>Hæng dem op og lad dem dryppe af.</p> <p>Flydepuderne kan håndvaskes med vand og sæbe eller sprittes af med et desinficeringsmiddel.</p> <p>Vær opmærksom på, at pH-værdien på det anvendte desinficeringsmiddel ikke bør være højere end 11,4.</p> <p>Flydepuder må ikke maskinvaskes.</p> <p>Tørring i tørreskab må ikke overstige 70° C, da fyldet eller ødelægges.</p>
Opbevaring	Udsæt ikke puden for høj varme, langvarigt og intensivt sollys eller anden stråling.
ISO-klassifikation	09 33 39 01
Forventet levetid	2 år
Grundlæggende UDI-DI	5740000100022N4

Cobi Rehab deltager gerne i konkrete afprøvninger hos brugere med komplicerede lejringsproblematikker.

Kontakt os på **cobi@cobi.dk** eller **7025 2522**.

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com

Bestilling

Model	Længde cm	Bredde cm	Omkreds af halshul	HMI- nummer	Varenummer
T-formet flydepude, S	63	39		64984	3002-9027-000
T-formet flydepude, L	81	54		64979	3002-9017-000
Bananformet flydepude, S	90	38		64982	3002-9811-000
Bananformet flydepude, M	98	38/33		64981	3002-9111-000
Bananformet flydepude, L	125	30/37		64983	3002-9101-000
Nakkeflydekrave, S	41	41	26	70141	3002-9321-000
Nakkeflydekrave, L	51	51	27	64985	3002-9311-000
Halsflydekrave, XS	50	34	23	64989	3002-9421-000
Halsflydekrave, S	59	39	25	64985	3002-9415-000
Halsflydekrave, M	63	42	30	70141	3002-9411-000
Halsflydekrave, L	68	46	35	64987	3002-9401-000
U-formet flydepude	55	19		64986	3002-9911-000
Badeblomst, S	68		20	72594	3002-9600-000
Badeblomst, L	77		28	72597	3002-9610-000
Flydestabilisator, S	60/37	18/25		72597	3002-9620-000
Flydestabilisator, L	93/55	24/29		72598	3002-9630-000



COBI REHAB[®]
The Positioning Company