



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

BRUGERVEJLEDNING

# Rollator Support

**Stærk og funktionel rollator udviklet til den bariatriske bruger.**

Rollator Support er beregnet til brugere, der vejer op til 200 kg.

Rollatoren kan bruges udendørs og indendørs på institutioner, plejecentre og i private hjem. Findes i to bredder.



Scan koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

# Indhold

1. Sikkerhed.....	3
2. Symbolforklaring.....	4
3. Generelt .....	5
4. Anvendelse.....	5
5. Montering .....	6
6. Indstilling.....	6
7. Rollator King .....	7
8. Rengøring og vedligeholdelse .....	8
9. Bortskaffelse.....	8
10. Garanti .....	9
11. Specifikationer.....	10
12. Bestilling.....	11

# 1. Sikkerhed

---



## ADVARSEL

Rollator Support må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af Rollator Support. Ved forkert anvendelse kan bruger lide skade.

Brugsanvisningen skal læses grundigt, før Rollator Support tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod Sikkerhedsvejledninger mærket med

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert anvendelse af Rollator Support.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis rollatoren er beskadiget eller har mangler. Brug aldrig egne erstatningsreservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader eller uheldige situationer, der opstår efter reparationer, der er foretaget uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.



## SIKKERHEDSVEJLEDNINGER

Aktiver rollatorens bremser, før den bruges som hvilestol.

Brug aldrig rollatoren på rulletrapper eller almindelige trapper.

Brug aldrig rollatoren som kørestol.

Brug aldrig rollator til at transportere store ting. Transporter kun ting, der kan være i kurven.

Brug aldrig rollatoren på overflader, der skråner mere end 3,5 grader.

Brug aldrig rollatoren på bløde eller ujævne overflader.




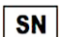





Husk altid at stramme håndmøtrikker til højdejusteringen.









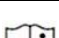


Hold begge ben på jorden, når rollatoren bruges som hvilestol. Det sikrer stabiliteten. Gå heller ikke rollatoren frem eller tilbage, mens den bruges som hvilestol.

Bruges produktet til personer, der vejer mere end 200 kg, kan der opstå risiko for at rollatoren vælter eller bliver beskadiget.

Overfladetemperaturen kan stige, når kørestolen udsættes for eksterne varmekilder, fx sollys.

## 2. Symbolforklaring

Følgende symboler findes i brugervejledningen eller på produktets label.	
	Advarsel!
	Overensstemmelseserklæring ifølge Direktivet for medicinsk udstyr, EU 2017/745
	Cobi varenummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Fabrikant
	Medicinsk udstyr, klasse 1
	Brugervægt
	Læs manual
TBA	Offentliggøres senere
CE-Label er placeret på rollatorens nederste ramme. Eksempel på label kan ses herunder.	

	Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522			
	XXL-Rehab Rollator Support 0173-050-000			200 KG
	2000741		MADE IN TAIWAN	
	2020			

## 3. Generelt

---

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om målgruppen for og anvendelsen af Rollator Support. Brugervejledningen indeholder også en specifikationsliste.

Den nyeste version af denne brugervejledning finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er den nyeste.

Hvis du har brug for en brugervejledning, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes produktarket i PDF-form på [cobirehab.com](http://cobirehab.com), som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på telefon 7025 2522, hvis du ønsker flere oplysninger om Rollator Support.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

Rollator Supports UDI-nummer fremgår af labelen på rammen.

Produktsikkerhedsmeddelelser og tilbagekaldelse af produkter kan ses på hjemmesiden under [www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/](http://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/)

## 4. Anvendelse

---

Rollator Support må kun anvendes af mobile brugere, der har fysikken samt kognitive evner til at styre gå og bremse rollatoren på en sikker og forsvarlig måde.

Rollator Support er beregnet til brugere, der vejer op til 200 kg. Rollatoren kan bruges udendørs og indendørs på institutioner, plejecentre og i private hjem.

De højdejusterbare underarmsstøtter hjælper brugeren til at gå i en oprejst stilling og øger aflastningen på håndleddene.

### 4.1 Mere anvendelse

Rollator Support findes i to bredder, 61 cm og 71 cm. Tallet refererer til den åbning, der er ind til sædet og tilsvarende afstanden mellem håndtagene.

Begge modeller har en sædebredde på 51 cm, en sædehøjde på 51 cm og en sædedybde på 37 cm.


Totalbredde på de to modeller er 13 cm mere end afstanden mellem håndtagene.

Vær opmærksom på, at modellen med en totalbredde på 84 cm kan have svært ved at komme igennem visse døråbninger.

#### Valg af model til bruger

Valg af model afhænger af brugers kropsform. Til brugere med meget fylde omkring bækken og lår anbefaler vi en størrelse 71 cm. Kontakt os på 7025 2522 for råd og vejledning inden bestilling.

Rollatoren kan anvendes som en hvilestol, når bremserne er låst.

 Brug aldrig Rollator Support på bløde eller ujævne overflader.

Konsulter altid en terapeut før, der anviser en Rollator Support til en bruger.


#### Kontraindikationer

Der er ingen kontraindikationer forbundet med brugen af produktet som rollator eller hvilestol.

Mål altid bruger stående. Placer fx en bog eller noget tilsvarende på siden af bruger, der hvor bruger er bredest. Mål derefter afstanden mellem de to bøger.

#### At gå med rollatoren

1. Placér hænderne på håndtagene. Slip bremser.
2. Træd derefter forsigtigt frem, en fod ad gangen.
3. Sørg for at overfladen er jævn, så det er lettere at gå. Vær opmærksom på og vær forsigtig med forhindringer/huller i vejen/overflade.
4. Brug bremsehåndtagene for at stoppe.

 Brug aldrig rollatoren på skrå flader, der er mere end 3,5° eller på bløde og ujævne flader.

## 5. Montering

---

Ud over rollatoren indeholder kassen også to håndtag (forbundet til rollatoren med kabler), to stænger med underarmsstøtter, en kurv og sikkerhedsrygbøjle

1. Fold rollatoren ud.
2. Fjern skruerne til højdejustering fra håndtagsstangen.
3. Sæt stængerne med underarmsstøtterne fast på rollatoren.
4. Indsæt håndtagene i underarmsstøtterne.
5. Montér sikkerhedsrygbøjlen foran på rollatoren ved at hive op i knappen i henholdsvis højre og venstre side.

Knappen kan låses, så det er nemmere at montere bøjlen. Det gøres ved at hive op i knappen og dreje den en kvart omgang.

Husk at løsne knappen igen, så sikkerhedsrygbøjlen sidder fast.

6. Indkøbskurven monteres foran ved at placere de to kroge på det øverste rør under sædet.

7. Juster højden på håndtagene, så de passer til bruger.

7. Juster bremserne.

⚠ Brug ikke rollatoren uden sikkerheds-rygbøjlen monteret.

Sikkerhedsbøjlen sikrer, at belastningen på rollatoren ikke er placeret for langt fremme. Hvis dette er tilfældet, kan rollatoren tippe forover.

⚠ Læg ikke ekstra puder oven på det polstrede sæde, når rollatoren er i brug.

## 6. Indstilling

---

### Indstilling af højden på håndtagene/underarmsstøtterne

1. Fjern skruen og drejeknappen til højdejustering fra begge håndtag, så håndtaget kan bevæges frit op og ned.

2. Skub håndtagene op eller ned indtil den ønskede højde er nået. Sæt skue og drejeknap igen. Placer bolten på bagsiden, så den passer i hullet.

3. Spænd til.

Juster højden af håndtagene, så håndtagene er i området mellem hoftelod og nederste del af ribben. Vær opmærksom på, at begge håndtag har samme højde. Uens højde kan medføre ustabilitet ved kørsel.

### Sådan foldes rollatoren

1. Tag fat i sædets forkant (den forkant der er tættest på dig selv) med en ene hånd. Hold om ét af håndtagene med den anden hånd.

2. Løft op i sædet.

3. Rollatoren folder sig nu sammen.

Hvis rollatoren skal fylde endnu mindre, kan kurven og sikkerhedsbøjlen tages af.

### Brug af bremserne

Rollator Support kan bremse på to måder:

1. Kortvarigt stop:

Pres begge håndtag op.

2. Længerevarende stop:

Tryk begge bremsehåndtag ned, så de låser fast i en position nede. Håndtagene forbliver i denne position, indtil de aktivt trykkes op igen.

### Eftersyn af bremserne

Bremserne er indstillet korrekt ved levering.

Bremserne og parkeringsbremsen skal kontrolleres før brug.

Hvis parkeringsbremsen ikke kan låse, eller hvis bremserne ikke fungerer korrekt, kontakt da Cobi Rehab på 7025 2522.

Bremserne skal have et serviceeftersyn hver 3. måned.

## 6.1 Transport i motoriseret køretøj

Rollator Support kan let klappes sammen, hvis rollatoren skal transporteres i motoriseret køretøj.

1. Tag fat i sædets forkant med den ene hånd. Hold om ét af håndtagene med den anden hånd.
2. Løft op i sædet og fold nu rollatoren sammen.

Hvis rollatoren skal fylde mindre, kan kurven og sikkerhedsrygbøjlen tages af.

Rollator Support må ikke bruges som sæde i motoriseret køretøj.

## 6.2 Opbevaring (inkl. langtidsopbevaring)

Rollator Support bør opbevares mørkt og dækket af et tæppe eller lignende.

Rollator Support bør temperaturmæssigt opbevares mellem -10°- 50° C.

Tjek jævnligt, at rollatoren ikke er blevet våd eller har lidt anden skade under opbevaringen.

# 7. Rollator King

---

Vores anden bariatriske Rollator (King) minder i sin konstruktion om Rollator Support.

Rollator King har dog håndtag i stedet for underarmsstøtter.

Hvis bruger i stedet har behov for en Rollator King, kan underarmsstøtterne afmonteres og erstattes af håndtag.

Kontakt Cobi Rehab for mere information om afmontering af underarmsstøtter.



## 8. Rengøring og vedligeholdelse

---

### 8.1 Rengøring og desinficering

Rollatorens stel, sæde, håndtag, underarmsstøtter og sikkerhedsrygbøjle skal rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

#### Desinficering

Rollatorens stel, sæde, håndtag, underarmsstøtter og sikkerhedsrygbøjle kan også desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm (fx Wet Wipe Chlorine Disinfection).

Hvilesæde og rygbøjle kan skiftes ved overgang til ny bruger.

⚠ Desinficer altid Rollator Support, hvis den skal overgå til ny bruger. Det skal ske for at undgå krydskontamination.

Eventuelle lokale procedurer omkring rengøring og vedligeholdelse skal altid overholdes.

### 8.2 Vedligeholdelse

Bolte og møtrikker skal kontrolleres hver tredje måned. Spænd dem, hvis der er behov for det.

Kontakt Cobi Rehab for yderligere vedligeholdelse af Rollator Support.

⚠ Manglende vedligeholdelse af bolte og møtrikker kan føre til funktionsfejl.

## 9. Bortskaffelse

---

Når Rollator Support ikke længere er i brug, skal den bortskaffes på miljøforsvarlig vis.

Kontakt Cobi Rehab eller kommunen for yderligere information om bortskaffelse.

#### Genanvendelse

Dele af Rollator Support kan genanvendes. Kontakt Cobi Rehab for mere information.



# 10. Garanti

---

Cobi Rehab garanterer, at Rollator Support er fejlfri, når den leveres. Skulle der mod forventning være mangler eller skade på Rollator Support ved modtagelsen, så kontakt Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for Rollator Support er et år fra købsdato og dækker produktionsfejl eller defekter ved levering. Fakturaen gælder som garantibevis.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt.


- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale.

Garantien omfatter ikke:  
- sliddele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at Rollator Support er blevet håndteret på en uhensigtsmæssig måde.

Ved skade på grund af forkert brug, faktureres både service og anvendte reservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader af nogen af art.

 Mangel på vedligeholdelse kan skade produktet, forkorte holdbarheden eller have indvirkning på eller påvirke rollatorens ydeevne.

## 10.1 Utilsigtet hændelse

Enhver hændelse, der er indtruffet i forbindelse med brugen af Rollator Support, skal indberettes til Cobi Rehab.

## 10.2 Efter forventet levetid

Efter den forventede levetid er det vigtigt, at der foretages en samlet vurdering af produktet, inden fortsat brug.

Efter den forventede levetid kan Cobi ikke garantere egnethed og sikkerhed for produktet, da Cobi ikke har kontrol over, hvordan produktet er brugt og slidt.

Den samlede vurdering af produktet skal udføres af kvalificeret fagpersonel, og som et minimum

skal der tages højde for, hvordan produktet er blevet brugt, produktets tilstand og dets komponenter.

Cobi Rehab kan altid foretage en sådan vurdering.

Efter den forventede levetid er det vigtigt, at der foretages en samlet vurdering af produktet, inden fortsat brug.

# 11. Specifikationer

<b>Generelt model 61 cm og 71 cm</b>	
Maksimum brugervægt	200 kg
Total længde	850 mm
Total bredde	740/840 mm
Bredde mellem håndtag	610/710 mm
Højdejusterbar i intervaller af 2,5 cm	100 - 130 mm
Sædebredde	510 mm
Sædedybde	370 mm
Åbning ind til sædet	610/710 mm
Sædehøjde	510 mm
Vægt	17 kg
Vægt i kurv maks.	5 kg
Sammenklappelig	Ja
Massive hjul	Ja
Ramme	Krom molybdæn stål/SAE41-30
Ramme og sæde	Flammehæmmende
Sæde- og rygpulster	Polyurethan skum
Hjul	8" massive
Estimeret holdbarhed	7 år
ISO-klassifikation	ISO 12 06 06 - 11
Risikoklasse	I
Grundlæggende UDI	5740000100007N8
Overfladetemperaturen på Rollator Support kan stige eller falde, hvis rollatoren udsættes for eksterne kulde og varme påvirkninger.	

## 12. Bestilling

---

<b>Model</b>	<b>Åbning i ind til sædet</b>	<b>Totalbredde</b>	<b>HMI-nummer</b>	<b>Varenummer</b>
Rollator Support 61, inkl. kurv	610 mm	740 mm	88145	0173-050-000
Rollator Support 71, inkl. kurv	710 mm	840 mm	127906	0173-071-000
Håndtag, venstre				0170-999-010L
Håndtag, højre				0170-999-010R



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

---



**FABRIKANT OG FORHANDLER**

**Cobi Rehab**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
+45 7025 2522  
[cobirehab.com](http://cobirehab.com)