



COBI REHAB®
The Positioning Company

PRODUKTARK

Bariatrisk Patientstol/Spisebordsstol

Specialdesignet patientstol, der sikrer god siddekomfort til bariatriske brugere. Bariatrisk Patientstol bruges i venteværelser, på hospitaler og institutioner og i private hjem.

Findes i to størrelser, 61 cm og 71 cm. Til brugere der vejer op til 325 kg.



- Flere indstillingsmuligheder
- Findes i to størrelser
- Vægtkapacitet op til 325 kg
- Minimalistisk design, der passer ind i såvel venteværelser som private hjem



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Bariatrisk Patientstol/Spisebordsstol

Bariatrisk Patientstol er en stærk stol, der giver god siddekomfort for brugere op til 325 kg. Patientstol findes med to sædebredder, 61 cm og 71 cm.

Bariatrisk Patientstol er udstyret med et bredt sæde som sammen med de buede armlæn sikrer god plads mellem armlænenene. Sædedybden kan justeres i tre forskellige dybder.

Konstruktion

Bariatrisk Patientstol består af letvægtsrør, der sikrer mest muligt stabilitet og lav vægt. Rørene er overfladebehandlet.

Armlænenene går ud over siddefladerne, hvilket mindsker risikoen for at blive klemt. Det gør det også nemmere at få et godt greb ved ind- og udstigning.

Indstillinger

Bariatrisk Patientstol består af to dele, stolens ramme og ryglænet. Bariatrisk Patientstol samles ved hjælp af de medfølgende bolte og skiver.

Justering af sædedybde og ryglæn

Sædedybden kan justeres i tre positioner. Vælg to huller (forreste, midterste eller bageste) på ryglænet for den ønskede sædedybde.

Rengøring og vedligeholdelse

Bariatrisk Patientstol kan rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Bariatrisk Patientstol kan også desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

Desinficer altid Bariatrisk Patientstol, inden den overgår til ny bruger. Derved undgås krydskontamination.

Udformningen af ryg og sæde gør, at brugeren kommer helt tilbage i sædet, hvilket er en hjælp, når stolen bruges som spisebordsstol.

Bariatrisk Patientstol bruges på hospitaler, i plejeboliger og i private hjem. Bariatrisk Patientstol er beregnet til indendørs brug.

Bariatrisk Patientstol må kun bruges på hårdt underlag med en maksimal hældning på 3°.

Ryglænet på Bariatrisk Patientstol kan justeres, så den bedst mulige siddestilling opnås. Ryglænet kan flyttes +/- 6 cm i alt.

De buede rør sikrer en god siddekomfort.

Sædehøjden er justerbar fra 44-59 cm.

Justering af benenes højdeindstillinger

Højden på benene kan justeres i seks positioner ved at løsne og stramme de fire bolte, der allerede er monteret på benene.

Under brug

Sæderyggen kan indstilles i tre forskellige dybder. Justering af sædedybden påvirker ikke stolens stabilitet.

Vedligeholdelse

Bolte skal kontrolleres regelmæssigt og udskiftes om nødvendigt.

Manglende kontrol af bolte, som anvist kan forårsage funktionsfejl.

Specifikationer

Specifikationer, model 61 cm og 71 cm	
Maksimum brugervægt	325 kg
Sædebredde	61/71 cm
Sædedybde justerbar	40-52 cm
Sædehøjde justerbar	44-59 cm
Afstand mellem armlæn	65/75
Totalbredde over armlæn	73/83 cm
Totalhøjde	79-94 cm
Totallængde (fra fod til rygbøjlen)	80-101 cm
Sæde/ryg/armlæn	Polyuretan
Ramme	Krom molybdæn stål/SAE41-30
Vægt (61 cm/71 cm)	16,5/17,5 kg
ISO - klassifikation	ISO 18 09 03 14
Produktets forventede levetid	7 år
Risikoklasse	I
UDI-DI	5740000102124/5740000102131
Grundlæggende UDI	5740000100003MY
Generelle krav og prøvningsmetoder	EN 12182
Overfladetemperaturen på Patientstol kan stige eller falde, hvis den udsættes for eksterne kulde og varme påvirkninger.	

Bestilling

Model	Varenummer	HMI
Bariatrisk Patientstol, 61 cm	0160-061-000	54767
Bariatrisk Patientstol, 71 cm	0160-071-000	54766