



## Aktuatorer

Rise N Tilt er udstyret med fire aktuatorer, placeret under sædet. De fire aktuatorer sørger for, at badetoiletstolen kan løfte og tilte.

Tag ikke batteriet ud af styreboksen, før fem sekunder efter at den sidste aktuator er stoppet. Sker det alligevel, skal badetoiletstolen kalibreres for at virke igen. **Se Fejlsøgning.**

Hvis to eller flere aktuatorer kører skævt, lukker styreboksen ned for dem. Sker det, skal Rise N Tilt kalibreres. **Se Fejlsøgning.**

## Fejlsøgning

Ved driftsproblemer er det vigtigt at kontrollere, at alle stik sidder korrekt i både styreboks, fjernbetjening og mellem batteri og styreboks.

Hvis aktuatorerne ikke kører, skal badetoiletstolen O-punkts kalibreres.

## En O-punkts kalibrering

En O-punkts kalibrering sker ved at holde fjernbetjeningens to nederste knapper nede, indtil badetoiletstolen er kørt ned i "bundposition".

Kalibreringen er nu gennemført, og aktuatorerne kan køre igen.

## Ladefejl

Ved fejl i opladerfunktionen, blinker den gule diode på batteriet.


1. Tag ledningen ud af kontakten.
2. Vent to minutter, og sæt da ledningen i igen.

Hvis alle dioder blinker, skyldes det driftsproblemer i styreboksen. Det kræver en O-punkts kalibrering af badetoiletstolen. **Se fejlsøgning.**

Kontakt gerne Cobi Rehab på 7025 2522 ved driftsproblemer.

## Fuldt opladet batteri med tre tændte dioder.

Status	Batteri
Fuldt opladet	>85%
Medium opladet	85 - 40%
Næsten tomt	40 - 20%

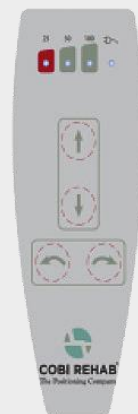

### O-punkts kalibrering

Hold de to nederste knapper nede, indtil badetoiletstolen er kørt i bund.

## QUICK GUIDE

# Rise N Tilt badetoiletstol

## Opladning og drift

### Klargøring

Lad batteriet op, inden badetoiletstolen tages i brug. Batteriet sidder i styreboksen, som er monteret på håndtaget. En opladning tager op til 10 timer.

Når styreboksen med batteri tilsluttes strøm via ledningen, kommer der lys i den gule diode på batteriet. Når batteriet er opladt, slukkes den gule diode.

Efter endt opladning lyser alle tre dioder på fjernbetjeningen på samme tid.

Oplad batteriet hver dag efter brug.

### Lavt batteriniveau

Med 25% tilbage af batteriet, kan badetoiletstolen kun køre ned. Det sikrer, at brugeren altid kan liftes ned.

### Hård belastning af batteri

Hård belastning af batteriet (mange ture op og ned efter hinanden) betyder, at batteriet bliver for varmt, og at sikkerhedstermostaten i batteriet aktiveres.

Det betyder, at styreboksen lukkes ned, og at batteriet skal køle af i mindst en halv time, inden det kan bruges igen. Lad der gå minimum et minut, før et andet batteri sættes i styringen.

Hav altid et opladet ekstra batteri liggende til rådighed.



Batteri