



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

## PRODUKTARK

# Bariatrisk Visco Comfort Kørestolspude

**Dansk designet standard kørestolspude til forebyggelse af tryksår hos bariatriske brugere.**

Visco Comfort Kørestolspude er beregnet til brugere, der vejer op til 325 kg.



- Tryksårsforebyggende
- Viskoelastisk top
- Specialudviklet til bariatriske brugere
- Strækbart inkontinensbetræk
- Vægtpacitet op til 325 kg



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

## Kørestolspude til forebyggelse af tryksår

Visco Comfort Kørestolspude er en standard kørestolspude til forebyggelse af tryksår hos bariatriske brugere op til 325 kg.

Visco Comfort Kørestolspude bruges i kørestole på hospitaler, i plejeboliger og private hjem.

### Før brug

Placér Visco Comfort Kørestolspude i kørestol eller i stol, så lynlåsen vender nedad. Tjek, at betrækket på Visco Comfort Kørestolspude er lynet korrekt.

⚠ Anbring ikke yderligere lag eller polstring mellem puden og bruger, da det kan reducere effekten af puden.

## Konstruktion

Visco Comfort pudens ergonomisk støbte base er udført i fast skum med en 3 cm viskoelastisk top.

Den støbte base giver øget stabilitet, sædestøtte og god trykaflastning på sædeknuderne.

Puden er betrukket med stræk- og åndbart inkontinensbetræk, som også er flammehæmmende og vaskbart.

## Rengøring og vedligeholdelse

Visco Comfort Kørestolspude kan ikke vaskes i vaskemaskine.

Inkontinensbetrækket kan rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel. Betrækket kan også maskinvaskes på 60°C og tørretumbles.

### Desinfektion

Visco Comfort Kørestolspude kan også desinficeres med fx Wet Wipe 70%, et klorprodukt 1000-1200 ppm (fx Wet Wipe Chlorine Desinfection) eller ECA (100ppm).

Desinficer altid Visco Comfort Kørestolspude, inden den overgår til ny bruger. Derved undgås krydskontamination.

### Langtidsopbevaring

Visco Comfort Kørestolspude bør opbevares mørkt og i temperaturer mellem -10° - 50° C.

### Under brug

Undersøg jævnligt kørestolspuden for at sikre, at pude og betræk vender korrekt, og at puden ikke er våd eller defekt.

⚠ En våd eller defekt Visco Comfort Kørestolspude kan mindske effekten af tryksårsforebyggelsen og i værste fald forårsage personskaade.

# Specifikationer

Maksimum brugervægt	325 kg
Vægt	2 kg
Sædebredde	550/610/660/720/820 mm
Sædedybde	450 mm
Sædehøjde	120 mm
Pudebase	HD PUR-skum og viskoelastisk PUR-skum
Pudebetræk	PU
Inkontinensbetræk	Dartex
ISO - klassifikation	04 33 03 01
Produktets forventede levetid	3 år
Risikoklasse	I
Grundlæggende UDI	5740000100011MX
Brugervejledning og produktark findes på website og kan skaleres op til stor skriftstørrelse ved synshandicap.	

## Bestilling

Model	Bredde cm	Dybde x højde i cm	HMI-nummer	Varenummer
Visco Comfort Kørestolspude med inkontinensbetræk	56	50 x 14	70650	0233-056-050
Visco Comfort Kørestolspude med inkontinensbetræk	61	50 x 14	70649	0233-061-050
Visco Comfort Kørestolspude med inkontinensbetræk	66	50 x 14	70648	0233-066-050
Visco Comfort Kørestolspude med inkontinensbetræk	71	50 x 14	70647	0233-071-050
Visco Comfort Kørestolspude med inkontinensbetræk	76	50 x 14	130391	0233-076-050
Visco Comfort Kørestolspude med inkontinensbetræk	81	50 X 14	64538	0233-081-050
Visco Comfort Kørestolspude med inkontinensbetræk	91	50 x 14	64539	0233-091-050
Visco Comfort Kørestolspude med inkontinensbetræk	96	50 x 14	64541	0233-096-050
Visco Comfort Kørestolspude med inkontinensbetræk	100	50 x 14	64540	0233-100-050

# Reserve dele

Type	Bredde cm	Dybde x højde i cm	Varenummer
Inkontinensbetræk	56	50 x 14	0233-056-050
Inkontinensbetræk	61	50 x 14	0233-061-050
Inkontinensbetræk	66	50 x 14	0233-066-050
Inkontinensbetræk	71	50 x 14	0233-071-050
Inkontinensbetræk	76	50 x 14	0233-076-050
Inkontinensbetræk	81	50 X 14	0233-081-050
Inkontinensbetræk	91	50 x 14	0233-091-050
Inkontinensbetræk	96	50 x 14	0233-096-050
Inkontinensbetræk	100	50 x 14	0233-100-050