



**COBI REHAB®**  
The Positioning Company

PRODUKTARK

## Bariatrisk vekseltrykmadras

**Bariatrisk vekseltrykmadras med Legacy XL pumpe til forebyggelse og behandling af tryksår hos bariatriske borgere.**

Anvendes til borgere, som er tryksårstruede eller skal have hjælp til stillingsskift. Vekseltrykmadrassen bruges i hjemmeplejen, plejeboliger og institutioner.

Maks. brugervægt 270 kg.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Medical device

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

## Om dette produktark

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger om målgruppen for og anvendelsen af Bariatrisk vekseltryksmadras. Den indeholder også en specifikationsliste.

Den nyeste version af dette produktark finder du på vores website.

Hvis du har brug for en brugervejledning skrevet med en større skriftstørrelse, findes den i PDF-form på [cobirehab.com](http://cobirehab.com), som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

## Anvendelse

Bariatrisk vekseltryksmadras bruges i plejeboliger, i hjemmeplejen og på institutioner

Her bruges madrassen til borgere, som er alment eller midlertidigt svækket og derfor mere sengeliggende end normalt.

Bariatrisk vekseltryksmadras er specialudviklet til forebyggelse af tryksår og til behandling af tryksår stadie 1-4. Madrassen kan bidrage til forbedring af blodcirkulationen og til at nedsætte trykket i kontaktområdet.

## Konstruktion

Bariatrisk vekseltryksmadras består af 20 luftceller lavet i et forstærket plastmateriale. Cellerne er 22 cm høje.

Den elektroniske vekseltrykspumpe sørger for, at luften skiftevis pumpes ind eller tømmes ud af de 20 celler. Det vil sige, når celle 1, 3, 5 osv. fyldes med luft, tømmes celle 2, 4, 6 osv. langsomt, hvorefter cyklusen vender. Tidscyklusen indstilles manuelt.

Vekseltrykket flytter presset på borgers væv. Det bidrager til forbedring af blodcirkulationen og til forebyggelse af tryksår.

Ved strømsvigt holder Bariatrisk vekseltryksmadras luften i 24 timer. Borger kommer ikke i forbindelse med sengebunden i løbet af de 24 timer.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på telefon 7025 2522, hvis du ønsker flere oplysninger om Bariatrisk vekseltryksmadras.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

Produktsikkerhedsmeddelelser og tilbagekaldelse af produkter kan ses på hjemmesiden.

Bariatrisk vekseltryksmadras er beregnet til borgere, der vejer op til 270 kg.

Bariatrisk vekseltryksmadras kan genbruges og er nem at rengøre.

### Kontraindikationer

Bariatriske borgere med ustabile frakturer må ikke ligge på en bariatrisk vekseltryksmadras.

Konsultér altid en læge eller terapeut, før en borger tildeles en bariatrisk vekseltryksmadras.

Vekseltryksmadrassens luftceller kan udskiftes enkeltvis. Cellerne holdes på plads ved hjælp af trykknapper og tre cellestyrer. De midterste celler er ventilerede. Det sikrer luftgennemtrængningen og mindsker varmeophobning.

Bundbetrækket er slidstærkt og fastgøres til sengerammen med kraftige stropper.

Alle dele kan udskiftes ved behov.

### Betræk

Betrækket er aftageligt, åndbart, strækbart i fire retninger og anti-bakterielt behandlet på overfladen.

Betrækket er beskyttet mod væskeindtrængning og er flammehæmmende. Betrækket kan vaskes, tørretumbles og desinficeres.

Betrækket er forsynet med lynlås på fire sider. Lynlåsen er dækket af et overlap af betrækket.

## Pumpens funktioner

### ON/OFF - figur 1

Tænd- og slukknappen sidder på højre side af pumpen.

### SIKRING - figur 2

Pumpen er udstyret med to sikringer.

### LEDNING - figur 3

Ledningen er fastmonteret på pumpen.

### PRESSURE RANGE (Trykvalg) - figur 4

Der kan vælges madrastryk på otte niveauer.

### CYCLE TIME (cyklustid) - figur 5

Der kan vælges fire forskellige cyklustider, 10, 15, 20 eller 25 min. To lamper er tilknyttet hver værdi.

### ALARM RESET - figur 6

Alarmen lyder, når der er strømsvigt eller tryktab. Samtidig med at alarmen lyder, blinker ALARM RESET-lampen.

Slå lyden fra ved at trykke på ALARM RESET-knappen. Nu er der kun ALARM RESET-lampen, der blinker.

Tryk på ALARM RESET-knappen for at gøre alarmen hørbar igen.

### STATIC

Statisk funktion bruges, når madrassens vekseltryk skal tilsidesættes.

### ALTERNATING - figur 7

Aktivering af ALTERNATING starter madrassens vekseltrykfunktion.

### AUTOFIRM - figur 8

Autofirm-funktionen bruges til pleje i sengen. Funktionen fylder vekseltrykmadrassen til det maksimale tryk (70 mm Hg), hvilket letter pleje og forflytning. Trykket holder i 30 minutter.

Bagefter vender pumpen automatisk tilbage til vekseltryk. Tryk på Autofirm-knappen for at afbryde funktionen.



## Rengøring af madras og betræk

Bariatrisk vækselftrykmadras kan rengøres med vand, rengøringsmiddel og en tør, ren klud til aftørring.

Bariatrisk vækselftrykmadras kan også desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt 1000-1200ppm.

Betrækket og bundbetrækket kan maskinvaskes ved 95° C.


Betrækket kan tørretumbles ved lav varme eller hænges til tørre, hvis muligt. Betrækket må ikke stryges.

## Rengøring af strømforsyning, strømkabel og slanger

Tør de udvendige overflader på strømkablet, strømforsyningen og slanger af med en fugtig klud med vand og et rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud.

De forskellige dele kan også desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

Sprøjt ikke væske direkte på selve pumpen.

 Sluk altid for strømforsyningen inden rengøring.

Alle dele på Bariatrisk vækselftrykmadras skal desinficeres grundigt, når madras og pumpe overgår til en ny bruger. Det sker for at undgå krydskontaminering og infektioner.

## Transport

Hvis Bariatrisk vækselftrykmadras og/eller sengen skal flyttes, slukkes der på vippekontakten, før strømtikket hives ud af stikkontakten. Derefter trækkes luftslangerne ud af pumpen. Montér transportdækslet, der sidder på koblingen.

Bariatrisk vækselftrykmadras holder på luften i ca. 24 timer.


Når pumpen og Bariatrisk vækselftrykmadras igen tilsluttes strømforsyningen, skal den individuelle tilpasning til borger gentages.

Fastspændingsstropperne på hver side af vækselftrykmadrassen kan bruges som bærehåndtag.

## Opbevaring (herunder langtidsopbevaring)

Sluk pumpen på ON/OFF-knappen. Frakobl vækselftrykmadrassen og udløs CPR-ventilerne.

Vækselftrykmadrassen foldes sammen, når den er tømt for luft. Opbevares liggende.

 Tjek jævnligt, at vækselftrykmadrassen ikke er våd eller defekt.

<b>Specifikationer</b>	
Brugervægt	20-270 kg
Beregnet til sårkategori	1-4
ISO-klassifikation	04 33 06-05
Generelle krav og prøvningsmetoder i henhold til	DS/EN12182:2012
Estimeret holdbarhed	7 år
Risikoklasse	I
Manualen findes på website, hvor den kan skaleres op ved synshandicap	
Serienummeret findes påsyet på madrasslabel	
Miljøforsvarlig bortskaffelse	Aflever madras og pumpe til genanvendelse, da størstedelen af produkterne kan genbruges.

<b>Madras</b>	
Længde	200/220 cm
Bredde	100/220 cm
Højde	22 cm
Vægt	14/18 kg
Anvendelig direkte på sengebund	Ja
Anvendelig til indstillelig sengebund	Ja
Lyntømningsfunktion	Ja (CPR-ventil)
Autofirm funktion	Ja
Cellemateriale	Nylon/PU
Madrassbase materiale	PU
Brandhæmmende madras	Ja

<b>Betræk</b>	
Aftageligt, allergivenligt, vask- og desinficerbart inkontinensbetræk	Ja
Madrassbetræk	PU-coated Polyester
Brandhæmmende betræk	Ja

<b>Pumpe</b>	
Pumpens mål	35 x 24 x 13 cm
Pumpens vægt	3,8 kg
Lydsvag	Ja
Trykinterval	10-70 mm Hg
Cyklusinterval	10, 15, 20 og 25 min.
Audiovisuel alarm ved lufttab	Ja
Audiovisuel alarm ved strømtab	Ja
Strømkabel	5 m
Sikring (2 styks)	Ja. T1A/250V
Strøminput	AC220-240V/50 Hz
Strømforbrug	Normal brug: 15W
Temperaturkrav til pumpe i brug	5 - 45° C
Temperaturkrav til opbevaring	-25° - 70° C
Klassifikation pumpe	Elektrisk beskyttelse Klasse II, Type BF dobbelt isoleret med/uden funktionel jording
Apparatbeskyttelse	IPX0
Elektromedicinsk udstyr	Overholder EN 60601-1:1990 + A1+A2+A13
Beskyttelse for elektromedicinsk udstyr til anvendelse i hjemmet	IEC 60601-1: 1988 + A1+A2
Produceret under kvalitetskontrol	ISO13485
Model navn	Legacy XL Bariatric Series Alternating Pressure Pump and Low Air Loss Mattress



# **COBI REHAB<sup>®</sup>**

The Positioning Company

---



## **PRODUCENT**

**Compass Health Brands**  
21973 Commerce Parkway  
Strongsville  
Ohio 44149  
USA

## **FORHANDLER**

**Cobi Rehab**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
+45 7025 2522  
[cobirehab.com](http://cobirehab.com)