



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

PRODUKTARK

Bariatrisk Comfort Skummadras

Bariatrisk Comfort Skummadras med trykaflastende effekt til bariatriske borgere.

Anvendes til borgere med behov for trykaflastning på en ekstra bred skummadras. Comfort Skummadras bruges i hjemmeplejen, plejeboliger og institutioner.

Maks. brugervægt 325 kg.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Medical device

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Om dette produktark

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger om målgruppen for og anvendelsen af Bariatrisk Comfort Skummadras. Den indeholder også en specifikationsliste.

Den nyeste version af dette produktark finder du på vores website.

Hvis du har brug for et produktark skrevet med en større skriftstørrelse, findes den i PDF-form på cobirehab.com, som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på telefon 7025 2522, hvis du ønsker flere oplysninger om Bariatrisk Comfort Skummadras.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

Produktsikkerhedsmeddelelser og tilbagekaldelse af produkter kan ses på hjemmesiden.

Anvendelse

Bariatrisk Comfort Skummadras bruges i plejeboliger, i hjemmeplejen og på institutioner

Bariatrisk Comfort Skummadras er specialudviklet til forebyggelse af tryksår og til behandling af tryksår op til stadie 1.

Bariatrisk Comfort Skummadras er beregnet til borgere, der vejer op til 325 kg.

Bariatrisk Comfort Skummadras kan genbruges og er nem at rengøre.

Konstruktion

Bariatrisk Comfort Skummadras er opbygget af to forskellige lag kvalitetsskum.

Basislaget er et tykt bærelag af Heavy Duty PU-skum opskåret i fjedre.

Toplaget består af tre cm viskoelastisk skum, som giver komfort og trykaflastning.

Kontraindikationer

Konsultér altid en læge eller terapeut, før en borger tildeles en Bariatrisk Comfort Skummadras.

Betræk

Betrækket er aftageligt, åndbart, strækbart og anti-bakterielt behandlet på overfladen.

Betrækket er beskyttet mod væskeindtrængning og er flammehæmmende. Betrækket kan vaskes, tørretumbles og desinficeres.

Betrækket er forsynet med lynlås på tre sider. Lynlåsen er dækket af et overlap af betrækket.

Rengøring af betræk

Betrækket til Bariatrisk Comfort Skummadras kan rengøres med vand, rengøringsmiddel og en tør, ren klud til aftørring.

Betrækket kan også desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt 1000-1200ppm.

Betrækket kan maskinvaskes ved 95°C.

Betrækket kan tørretumbles ved lav varme eller hænges til tørre, hvis muligt. Betrækket må ikke stryges.

Bariatrisk Comfort Skummadras skal desinficeres grundigt, hvis skummadrassen skal overgå til en ny bruger.

Det sker for at undgå krydskontaminering og infektioner.

Opbevaring

Opbevaring (herunder langtidsopbevaring)

Bariatrisk Comfort Skummadras opbevares liggende fladt og uden noget andet liggende ovenpå, i temperaturer mellem 10° - 40°C.

Vedligeholdelse

Tjek jævnligt Bariatrisk Comfort Skummadras for skader for at sikre optimal effekt. Hvis betrækket er beskadiget, skal det skiftes med det samme.

Bestilling

Model	Længde X Bredde X højde cm	HMI-nr.	Varenr.
Bariatrisk Comfort Skummadras	200 X 100 X 18	47696	0240-100-200
Bariatrisk Comfort Skummadras	200 X 120 X 18	36579	0240-120-200
Bariatrisk Comfort Skummadras	220 X 100 X 18	70143	0240-100-220
Bariatrisk Comfort Skummadras	220 X 120 X 18	70144	0240-120-220
Bariatrisk Comfort Skummadras	220 X 140 X 18	127197	0240-140-220
Tilbehør			
Betræk til Bariatrisk Comfort Skummadras	200 X 100		0240-100-300
Betræk til Bariatrisk Comfort Skummadras	200 X 120		0240-100-301
Betræk til Bariatrisk Comfort Skummadras	220 X 100		0240-999-010
Betræk til Bariatrisk Comfort Skummadras	220 X 120		0240-999-011
Betræk til Bariatrisk Comfort Skummadras	220 X 140		0240-999-015

Specifikationer	
Brugervægt op til	325 kg
Beregnet op til sårkategori	1
ISO-klassifikation	18 12 18 - 25
Estimeret holdbarhed	7 år
Risikoklasse	I
Manualen findes på website, hvor den kan skaleres op ved synshandicap	
Miljøforsvarlig bortskaffelse	Afløber madras til genanvendelse

Madras	
Længde	200/220 cm
Bredde	100/120/140 cm
Højde	18 cm
Vægt	12/13 kg
Anvendelig direkte på sengebund	Ja
Anvendelig til indstillelig sengebund	Ja
Materiale base	Heavy Duty PU-skum
Materiale top	Viskoelastisk PUR-skum
Brandhæmmende madras	Ja

Betræk	
Aftageligt, allergivenligt, vask- og desinficerbart inkontinensbetræk	Ja
Betræk materiale	100% polyuretan
Brandhæmmende betræk	Ja
Betrækket overholder ROHS direktivet	Ja



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

**PRODUCENT OG
FORHANDLER**

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com