



Aktuatorer

Rise N Tilt är utrustad med fyra aktuatorer, placerade under sitsen. De fyra aktuatorerna ser till att Rise N Tilt kan lyftas och lutas.

Ta inte bort batteriet från kontrollboxen förrän fem sekunder efter att den sista aktuatoren har stannat. Om detta händer ändå måste Rise N Tilt kalibreras för att fungera igen. Se **Felsökning**.

Om två eller flera aktuatorer går snett stängs kontrollboxen av. Om detta händer måste Rise N Tilt kalibreras. Se **Felsökning**.

Felsökning

Vid driftsproblem är det viktigt att kontrollera att alla kontakter sitter rätt i både kontrollbox, fjärrkontroll och mellan batteri och kontrollbox.

Om aktuatorerna inte fungerar måste Rise N Tilt O-punkts kalibreras.

En O-punkts kalibrering

En O-punktskalibrering görs genom att hålla nere de två nedre knapparna på fjärrkontrollen tills Rise N Tilt har sänkts till "bottenläge".

Kalibreringen är nu klar och aktuatorerna kan köras igen.

Problem med laddning

Vid fel i laddarens funktion blinkar den gula lysdioden på batteriet.

1. Dra ur sladden.
2. Vänta två minuter och sätt sedan i sladden igen.


Om alla lysdioder blinkar beror det på driftsproblem i kontrollboxen. Det kräver en O-punktskalibrering av Rise N Tilt. Se **Felsökning**.

Kontakta Cobi Rehab på tel 08-7029774 vid driftsproblem.

Quick guide uppdaterat 07.03.22.

Fulladdat batteri med tre tända dioder.

Status	Batteri
Full laddat	>85%
Medium laddat	85 - 40%
Nästan tomt	40 - 20%

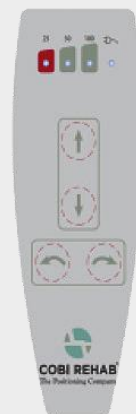

O-punkts kalibrering

Håll ned de två nedre knapparna tills Rise N Tilt har sänkts.

QUICK GUIDE

Rise N Tilt dusch- och toastol

Laddning och drift

Förberedelse

Ladda batteriet innan du använder Rise N Tilt. Batteriet sitter i kontrollboxen som är monterad på handtaget.

En laddning tar upp till 10 timmar.

När kontrollboxen med batteri är ansluten till ström via sladd tänds lampa i den gula dioden på batteriet. När batteriet är fullt laddat släcks den gula lysdioden.

Efter laddning lyser alla tre lysdioderna på fjärrkontrollen

samtidigt. Ladda batteriet varje dag efter användning.

Låg batterinivå

Med 25 % av batteriet kvar kan Rise N Tilt endast åka neråt. Detta säkerställer att brukaren alltid kan komma ner.

Hård belastning på batteri

Hård belastning på batteriet (många turer upp och ner efter varandra) gör att batteriet blir för varmt och att säkerhetstermostaten i batteriet aktiveras.

Det innebär att manöverboxen stängs ner och att batteriet måste svalna i minst en halvtimme innan det kan användas igen. Vänta minst en minut innan ett nytt batteri sätts in i styrenheten.

Ha alltid ett extra laddat batteri tillgängligt.



Batteri