



## PRODUKTARK

# Lasal Flydepuder

### Alle har glæde af gode oplevelser i vandet

Lasal Flydepuder anvendes til positionering i bassin under træning og vandterapi. Flydepuderne er udviklet specielt til funktionshæmmede børn og voksne, men kan også anvendes af personer med behov for ekstra støtte i vand.

Lasal Flydepuder kan bruges i bassiner med klorholdigt vand.



- Giver stor flydeeffekt.
- Sikrer stabilitet og tryghed, der giver øget bevægelighed og flere muligheder for træning.
- Hjælper terapeut med at kunne udføre relevante og gavnlige øvelser med bruger.
- Mange forskellige størrelser og former.



## Anvendelse

Lasal Flydepuder er udviklet specielt til funktionshæmmede børn og voksne, men kan også anvendes af personer med behov for ekstra støtte i vandet.

Flydepuderne anvendes til positionering i bassin under træning samt ved forskellige former for vandterapi. Puderne bidrager til flere træningsmuligheder og sikrer en behagelig vandoplevelse for bruger.

Lasal Flydepuder kan bruges i klorholdigt vand.

## Produktbeskrivelse

Flydepuderne fremstilles i flere modeller og størrelser til både børn og voksne. De forskellige modeller kan anvendes enkeltvis eller kombineres alt efter hver enkelt brugers behov.

Flydepuderne har en stor flydeevne. Når flydepuderne fyldes med vand, sikrer de stabilitet og støtte, hvilket betyder en tryk og behagelig oplevelse for bruger i vandet.

Flydepuderne kan placeres omkring bruger, inden bruger hjælpes ned i vandet.

Lasal Flydepuder må trods deres flydeevne ikke betragtes som redningsvest eller andet redningsudstyr.

Flydepuderne har en blå og en sort side. Det anbefales at den sorte side vendes ind mod kroppen.

### Lasal Flydepuder findes i følgende varianter:

- Halsflydekraver: 4 størrelser
- Nakkeflydekraver: 2 størrelser
- Bananformede flydepuder: 3 størrelser
- U-formet flydepude: 1 størrelse
- T-formet flydepude: 2 størrelser
- Badeblomst: 2 størrelser
- Stabilisator: 2 størrelser

## Rengøring og vedligeholdelse

Skyl flydepudernes yderside rene for klor med rigeligt rent ikke-klorholdigt vand efter brug.

Hæng flydepuderne til tørring. Den blå netside vendes nedad, så vandet frit kan løbe ud af flydepuden. Flydepudernes tørringstid er lang.

Flydepuderne kan håndvaskes med vand og sæbe eller sprittes af med et desinficeringsmiddel.

Vær opmærksom på, at pH-værdien på det anvendte desinficeringsmiddel ikke bør være højere end 11,4.



Halsflydekrave, T-formet flydepude og bananformet flydepude.



T-formet flydepude og bananformet flydepude.



Badeblomst.

Flydepuderne kan ved behov maskinvaskes på 60° i en industrivaskemaskine. Det gælder specifikt bananformet flydepude str. M og L. De andre flydepuder kan vaskes i almindelig vaskemaskine.

Brug evt. tørreskab på max. 70° C. Højere temperatur ødelægger fyldet, da polystyrenkuglerne smelter over 71° C.

Undgå blegemidler, skyllemidler og andre rengøringsprodukter, som indeholder opløsningsmidler.


# Lasal Flydepuder - oversigt

Størrelser angivet i længde x bredde x halshul



T-formet flydepude, S  
Str. 63x39 cm  
HMI: 64984

T-formet flydepude, L  
Str. 81x54 cm  
HMI: 64979

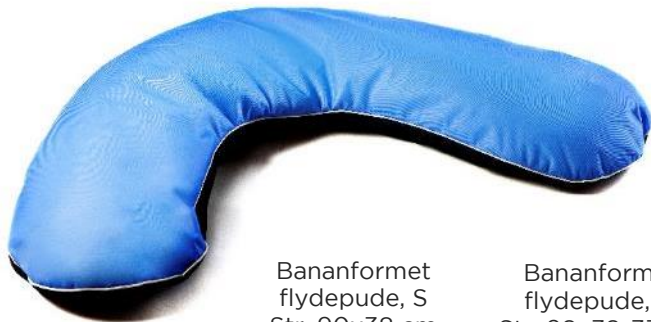

Bananformet flydepude, S  
Str. 90x38 cm  
HMI: 64982

Bananformet flydepude, M  
Str. 98x38-33 cm  
HMI: 64981

Bananformet flydepude, L  
Str. 125x30-37 cm  
HMI: 64983



U-formet flydepude  
Str. 55x19 cm  
HMI: 64986



Nakkeflydekrave, S  
Str. 41x41x26 cm  
HMI: 70141

Nakkeflydekrave, L  
Str. 51x51x27 cm  
HMI: 64985



Halsflydekrave, XS  
Str. 50x34x23 cm  
HMI: 64990

Halsflydekrave, S  
Str. 59x39x25 cm  
HMI: 64989

Halsflydekrave, M  
Str. 63x42x30 cm  
HMI: 64988

Halsflydekrave, L  
Str. 68x46x35 cm  
HMI: 64987



Badeblomst, S  
Str. 68x20 cm  
HMI: 72594

Badeblomst, L  
Str. 77x28 cm  
HMI: 72595



Flydestabilisator, S  
Str. 60-37x18-25 cm  
HMI: 72597

Flydestabilisator, L  
Str. 93-55x24-29 cm  
HMI: 72598

## Specifikationer

Kuglemateriale	Brandhæmmende EPS-perler (ekspanderet polystyren)
Yderbetræk - overside	100% polyester, ej flammehæmmet
Yderbetræk - underside	100% polyester, ej flammehæmmet
Rengøring	<p>Efter brug skylles flydepudernes yderside rene for klor med rigeligt ikke-klorholdigt vand.</p> <p>Hæng dem op og lad dem dryppe af.</p> <p>Flydepuderne kan håndvaskes med vand og sæbe eller sprittes af med et desinficeringsmiddel.</p> <p>Vær opmærksom på, at pH-værdien på det anvendte desinficeringsmiddel ikke bør være højere end 11,4.</p> <p>Flydepuder kan ved behov maskinvaskes på 60°C i industrivaskemaskine.</p> <p>Tørring i tørreskab må ikke overstige 70°C, da fyldet eller ødelægges.</p>
Opbevaring	Udsæt ikke puden for høj varme, langvarigt og intensivt sollys eller anden stråling.
ISO-klassifikation	09 33 39 01
Forventet levetid	2 år
Grundlæggende UDI-DI	5740000100022N4

---

Cobi Rehab deltager gerne i konkrete afprøvninger hos brugere med komplicerede lejringsproblematikker.

Kontakt os på **cobi@cobi.dk** eller **7025 2522**.

---

**Cobi Rehab**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
+45 7025 2522  
[cobirehab.com](http://cobirehab.com)

## Bestilling

Model	Længde cm	Bredde cm	Omkreds af halshul	HMI- nummer	Varenummer
T-formet flydepude, S	63	39		64984	3002-9027-000
T-formet flydepude, L	81	54		64979	3002-9017-000
Bananformet flydepude, S	90	38		64982	3002-9811-000
Bananformet flydepude, M	98	38/33		64981	3002-9111-000
Bananformet flydepude, L	125	30/37		64983	3002-9101-000
Nakkeflydekrave, S	41	41	26	70141	3002-9321-000
Nakkeflydekrave, L	51	51	27	64985	3002-9311-000
Halsflydekrave, XS	50	34	23	64990	3002-9421-000
Halsflydekrave, S	59	39	25	64989	3002-9415-000
Halsflydekrave, M	63	42	30	64988	3002-9411-000
Halsflydekrave, L	68	46	35	64987	3002-9401-000
U-formet flydepude	55	19		64986	3002-9911-000
Badeblomst, S	68		20	72594	3002-9600-000
Badeblomst, L	77		28	72597	3002-9610-000
Flydestabilisator, S	60/37	18/25		72597	3002-9620-000
Flydestabilisator, L	93/55	24/29		72598	3002-9630-000



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company