



## Opladning af Reden

**Batteriet skal tilsluttes en oplader, når der afgives en bib-lyd, ellers ødelægges batteriet.**

- Sæt batteriets ledning i stikkontakten. Opladningstiden er 10 timer.
- Reden må ikke benyttes under opladning.
- Et fuldt opladt batteri holder i op til fem timer.
- Rul ledningskablet sammen inden brug af Reden.
- Når Reden ikke er i brug, skal batteriet stadig oplades hver 12. måned.
- Indfør faste rutiner for opladning.

## LED Indikator

CA41 har en trefarvet LED indikator, som sidder på styreboksen. Indikatoren viser om Reden kører på batteri, eller om den får strøm via en stikkontakt.

LED-farvens betydning, når Reden er tilsluttet til stikkontakt	
Grøn	Reden er tilsluttet stikkontakt. Fjernbetjeningen har ikke været brugt. Styreboksen er i funktion, og Reden er klar til brug.
Gul	Reden er tilsluttet stikkontakt. Fjernbetjeningen er ikke blevet aktiveret. Styreboksen er ude af funktion. Kontakt Cobi Rehab.
Gul	Reden er tilsluttet stikkontakt. Fjernbetjeningen er blevet aktiveret. Styreboksen er i funktion.
LED-farvens betydning, når Reden er batteridreven	
Orange	Reden kører på batteri. Fjernbetjeningen er blevet brugt. Styreboksen er i funktion og er i brug.
Intet LED-lys	Batteriet virker. Fjernbetjeningen er ikke aktiveret eller også er styreboksen ikke tilsluttet stikkontakt.

## QUICK GUIDE

# Reden – Mobilt leje

## Anvendelse, opladning og elektrisk system



### Anvendelse

Redens hæve- og sænkefunktion samt justering af rygvinklen styres ved hjælp af fjernbetjeningen. Den anbefalede brugervægt er max. 90 kg. Reden er ikke beregnet til udendørs brug.

### Anvendelse af håndbetjening

Brug af Redens hæve- og sænkefunktioner.



Øverste: Vinkling af ryg.

Mellem: Hæv eller sænk fodmodulet.

Nederste: Hæv eller sænk hele Reden.

Quick guide opdateret 2022-07



## Forflytning til og fra Reden

Brug lift, når bruger forflyttes til og fra Reden. Ved brug af mobilift skal Reden hæves, så mobiliftens "ben" går fri af løftearmen under vognen.

## Montering af bælte

Brug altid bælte, når bruger opholder sig i Reden. Brug et eller to bæltter afhængigt af brugers motoriske uro.

Placer bæltet/bæltterne hen over hoften.

Bæltet/bæltterne fastgøres rundt om rammen eller i rillerne under sædet.

Sengehest kan tilkøbes.



## Indstilling af styrehåndtaget

Styrehåndtaget er monteret på rammen. På hver side af den lodrette styrestang findes et greb, som kan løsnes, så håndtagets vinkel kan indstilles.


Vip ikke Reden bagover, når den skal op ad eller over fx en rampe. Vippet kan ødelægge styrehåndtaget.

## Transport af Reden

Løft ikke Reden ind i et køretøj ved håndkraft. Brug lift eller rampe, hvis Reden skal transporteres i køretøj fra ét sted til et andet.

**⚠ Bruger må aldrig ligge i Reden under transport i køretøj.**

Reden er forsynet med seks bspændinger, der bruges til at fastgøre Reden til bunden af køretøjet. Se herunder.

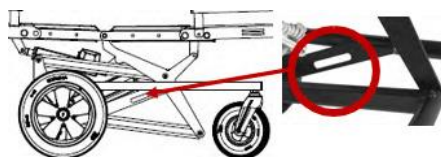

### ⚠ **Vigtig information**

Hæv ikke Reden, når den er kørt ind under et bord eller lignende.

Det kan medføre skade på Reden og bruger.

### ⚠ **Klemmerisiko**

Pas på, at bruger og tøjdele ikke kommer i klemme i hjul eller lignende.

## QUICK GUIDE

# Reden – Mobilt leje Betjening

### Længdejustering af Reden

Rammen kan længdejusteres i sædedel og rygdæl. Der er i alt ni indstillinger. Sådan gør du:

- Fjern indsatspuden.
- Tag fat på undersiden af rammen, hvor der på hver side er positioneringsbolte. Drej boltene i ulåst position.
- Træk og skub ud til ønsket position. Drej boltene tilbage i låst position og træk i rammen til der høres et "klik".
- Reden er nu klar til brug.



### Redens bremsesystem

Bremsegrebet på styrehåndtaget er forsynet med lås og fungerer som en parkeringsbremse.

Bremsen aktiveres ved at klemme på bremsehåndtaget. Frakobl bremsen ved at holde den røde plastdel inde.

