



COBI REHAB®
The Positioning Company

PRODUKTARK

Kamille Komfortkørestol

Enestående siddeenhed til sansestimulerende kropsafgrænsning

Den individuelle tilpasning og den høje komfort er med til at højne både aktivitetsniveauet, funktionsniveauet og livskvaliteten. Brugervægt maks. 140 kg.



OP TIL 140 KG

- Asymmetrisk justering af ryg- og sædestykke
- Exceptionelt fleksible armlæn
- Elektrisk indstilling af ryg samt tilt af sæde og ryg (som standard)
- Swing away benstøtter (som standard)
- Swing away armlæn (som standard)
- Specialudviklede flytbare, polstrede kropsstøtter (tilkøb)
- Aftagelige swing away benstøtter (tilkøb)



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Kamille komfortkørestol

Generelt

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger om anvendelsen af Kamille Komfortkørestol og målgruppen for kørestolen. Den indeholder også en lang række specifikationer på Kamille Komfortkørestol.

Den nyeste version af dette produktark finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er den nyeste.

Hvis du har brug for et produktark, skrevet med en større skriftstørrelse, findes produktarket i skalérbar PDF-form på cobirehab.com.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på telefon 7025 2522, hvis du ønsker flere oplysninger om Kamille Komfortkørestol.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

Kørestolens UDI-nummer fremgår af labelen, som er placeret på siden af stellet.

Produktsikkerhedsmeddelelser og tilbagekaldelse af produkter kan ses på hjemmesiden under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/>

Brugstemperatur

Kamille Komfortkørestol kan bruges i omgivelser med temperaturer fra -5 - 40°C og en luftfugtighed mellem 20-75%.

Overfladetemperaturen kan stige, når Kamille Komfortkørestol udsættes for eksterne varmekilder, fx sollys.

Anvendelse

Kamille Komfortkørestol bruges indendørs på plejehjem eller i plejeboliger og private hjem. Kørestolen kan også bruges udendørs.

Kamille Komfortkørestol har en bredde, der gør, at den kan komme igennem almindelige døråbninger

Enkelte modeller kan dog på grund af deres store bredde have vanskeligt ved at passere gennem almindelige døre og nødudgange.

Kamille Komfortkørestol er beregnet til at yde mobilitet til borgere, der er begrænset til siddende stilling. Maks. brugervægt op til 140 kg.

Den tilsigtede operatør af kørestolen er en sundhedsuddannet fagperson, fx en terapeut, sygeplejerske eller en sosu-assistent.

Kontraindikationer

Borgere med nedsat kognitive funktionsevner skal overvåges i forbindelse med anvendelsen af Kamille Komfortkørestol.

Kamille Komfortkørestol med drivmotor

Kamille Komfortkørestol findes også i en version med drivmotor (Kamille Power Komfortkørestol). Drivmotoren kan eftermonteres allerede indkøbte komfortkørestole.

Kontakt Cobi Rehab på telefon 7025 2522, hvis du ønsker flere oplysninger om Kamille Komfortkørestol med drivmotor.

Kamille komfortkørestol

Konstruktion

Kamille Komfortkørestol giver exceptionel støtte, fordi den i sin konstruktion er så fleksibel, at den kan understøtte kontrakturer i både OE og UE uden specialtilpasning.

Muligheden for maksimal individuel tilpasning er med til at højne både aktivitetsniveau, funktionsniveau og livskvalitet.

Kamille Komfortkørestol kan indstilles efter borgers hofte-, knæ- og ankelled. Kørestolen kan tiltes op til 45°, hvilket letter fx forflytninger. Ryggen kan vinkles op til 40°.

El-indstillelig ryg og el-tilt af sæde/ryg

Kamille Komfortkørestol kommer som standard med el-indstillelig ryg og el-tilt af sæde/ryg som enhed. De forskellige el-funktioner er trinløse, hvilket gør, at borger ikke oplever generende ryk.

El-funktionen giver også mulighed for justering af hoftevinkel og vinklingen på sæderyggen.

Funktionen el-indstillelig ryg låser automatisk.

Elektrisk tilt og indstilling af ryg sikrer bedre arbejdsforhold for hjælper, som undgår brug af egen kropsvægt i håndteringen af kørestolen.

De elektriske funktioner aktiveres med et joystick, der både kan være borger- og hjælperbetjent.

Større livskvalitet

Den tryghed og ro, som borger kan opleve i den komfortable Kamille Komfortkørestol kan være med til at højne funktionsniveauet.

Med det øgede funktionsniveau kommer også en højere grad af fleksibilitet, livskvalitet og lyst til at indgå i sociale relationer og aktiviteter.

Gentilpasning og tilbehør

Kamille komfortkørestol kan genbruges, fordi det store udvalg af tilbehør gør det nemt at gentilpasse kørestolen.

Kørestolen kan opgraderes med bord, stretchcovers og forskellige typer af tyngdepuder, nakkestøtter, flexarme og benstøtter. Alt tilbehør tilpasses den enkelte borger.

Gentilpasninger bør altid foregå i samarbejde med de terapeutuddannede konsulenter fra Cobi Rehab.

Eftermontering af drivmotor

Kamille Kørestol kan eftermonteres drivmotor til fremdrift. Drivmotoren betjenes via fjernbetjening, som både kan være borger og hjælperbetjent.

Kontakt Cobi Rehab på 7025 2522 og hør mere om gentilpasninger og drivmotor.

For oversigt over tilbehør se side 19.



1. Nakke
2. Rygsystem
3. Skubbebøjle
4. Håndbremse
5. Armlæn
6. Sædesystem
7. Frakkeskåner
8. Fodstøtte
9. Anti-tip

Sædesystem

Sædesystemet kan indstilles til borgere med asymmetriske problemstillinger. Sædesystemet består af to selvstændige plader, som via slidser kan placeres uafhængigt af hinanden.

De to selvstændige plader i sædesystemet sikrer en præcis indstilling, der matcher borgers individuelle anatomiske behov.

Det gavner borgere, som er udfordret af fx anisomeli (forskellige benlængder), difference i mængden af væv på UE eller af abduktion over hoftelid. Muligheden for asymmetrisk justering imødekommer også udfordringer med windswept benstillinger.

Sædepladernes placering kan manuelt indstilles med almindelig værktøj.

Kørestolens pudesystem er placeret direkte oven på sædepladerne.

Kamille Komfortkørestol er udstyret med polstrede frakkeskånere, der følger sædepladens bevægelser og vinkel.

Til forskel fra andre komfortkørestole, er størrelsen ikke fast, men et interval. På den måde kan bredde og dybde justeres til bedst muligt at imødekomme brugers dimensioner.



Selvstændige plader i sædesystemet sikrer en præcis indstilling.

Rygssystem

Ryggen kan justeres asymmetrisk. Det gør det nemmere at imødekomme anatomiske udfordringer såsom scolioser, øget lateral fleksion over truncus eller asymmetrisk væv fx ved overvægt, brok eller ødemer.


Asymmetrisk justering sker takket være de tre aluminiumsplader, der udgør rygsystemet. To af pladerne kan flyttes uafhængigt af hinanden, selvom alle tre plader er forbundet.

Rygssystemet består af rygbasen, som er monteret på seks slidser. Slidserne gør, at rygbasen kan justeres i højden.

Sidepladerne, monteret på to slidser, kan løses ved brug af almindeligt værktøj.

Rygssystemets recline funktion er konstrueret, så det mindsker risikoen for shear, når rygvinklen ændres. Højden på ryggen kan øges 80 mm (ved hjælp af en rygforhøjer) uden at gå på kompromis med rygsystemets indstilling.

Rygforhøjer (tilkøb) består af tre plader monteret på rygsystemet. Rygforhøjer kan justeres asymmetrisk.

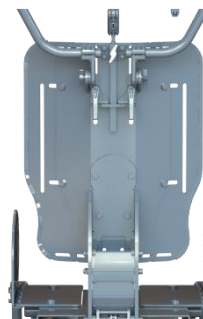

Konstruktionen på rygsystemet mindsker risikoen for shear ved ændring af ryg vinkel.

Polstrede kropsstøtter (tilkøb)

Specialudviklede kropsstøtter, placeret i slidser på rygsystemet, bidrager til en stabil og kropsnær truncusstabilitet, uanset om borger har scolioser eller nedsat/øget tonus thorakalt.

Kropsstøtternes placering på rygsystemet gør, at de kan placeres helt tæt på borger, så borger ikke kan "falde ud til" eller "falde ud over" kropsstøtten.

Der kan placeres flere kropsstøtter i hver side ved komplicerede behov.

Kropsstøtterne på Kamille Komfortkørestol er polstret med latex skum og Krøyer-kugler.

Benstøtter

Kamille Komfortkørestol er som standard udstyret swing away benstøtter. Swing away benstøtter understøtter, at borger i længere tid kan fastholde aktiviteten "Manuel forflytning" fra plejeseng til kørestol.

Benstøtterne kan højdejusteres og vinkeljusteres over knæ- og ankelled.

Benstøtterne er polstrede med skum på ydersiden og med en pude (latex skum og Krøyer-kugler) på indersiden. Polstringen på ydersiden er af skum for at mindske risikoen for u hensigtsmæssig kontakt med stellet.

Fodstøtterne kan ved hjælp af små indsatser (tilkøb) gå fra todelt til samlet, til brug ved fx kraftig adduktion.

Swing away funktionen kan yderligere låse benstøtterne i en mere åben vinkel, som gør, at borgere med abduceret position kan sidde fuldt understøttet.

Aftagelige swing away benstøtter kan tilkøbes.



Benstøtterne kan højdejusteres og vinkeljusteres over knæ- og ankelled.

Armlæn

Armlænet kan forholdsvis simpelt indstilles i dybden ved brug af unbraco værktøj.

Armlænet kan ved hjælp af fingerskruer vinkles ind ad, ned ad, op ad og justeres i højden. Det gør, at armlænet kan vinkles, så det således tilgodeser øget muskelkontraktion eller over-/underaktivitet i musklerne i overekstremiteterne.

Polstringen på armlænet indeholder samme type fyld som de øvrige puder på Kamille Komfortkørestol.

Polstringen højner mængden af sansestimuli og minimerer risikoen for tryksår.

Armlænene kan vinkles til naturlig hvileposition.

Swing away armlæn er standard på alle udgaver af Kamille Komfortkørestol.

Der kan tilkøbes flexarme med tyngde, som understøtter borgers arme og bidrager til yderligere tryghed, ro og komfort.



Swing away armlæn er standard på alle udgaver af Kamille Komfortkørestol.

Pudesystem

Kamille Komfortkørestol er udstyret med et komplet og unikt pudesystem, der sikrer optimal trykfordeling og kropsnær positionering. Puderne er fyldte med en blanding af Krøyer-kugler og skum, som tilsammen bidrager til forøget sansestimuli. Hver pude har sin egen lynlås.

Den punktberøring, som Krøyer-kuglerne leverer, resulterer i en lang række "beskeder" til hjernen.

Bearbejdningen af "beskederne" fører til en "samlende" effekt og til fornemmelsen af kropsafgrænsning og velvære hos borger.

Puderne er modellerbare og kan løbende justeres individuelt til den enkelte borger. Det giver høj genbrugsværdi i tråd med kravet om bæredygtighed.

Puderne er nøje udformet til at passe den kropsdel, som de understøtter. Puderne er holdt i en neutral tone, da erfaring viser, at mørke farver kan virke "bundløse" for borgere med visuel-kognitive funktionsproblemer.



Puderne er modellerbare og kan justeres manuelt til den enkelte borger.

Nakkestøtte

Nakkestøtten består af udskiftelige og kraftige kugleled. Kugleleddene er med til sikre fleksibilitet uden af nakkestøtten forskubber sig.

Kugleleddene indstilles med en unbraco nøgle.

Der er påmonteret to pudeelementer på nakkestøtten, en blød skumbase betrukket med neopren og en blød pude med tre kamre fyldt med Krøyer-kugler og latex skum. De enkelte kamre kan justeres efter behov.



Nakkestøtten består af udskiftelige, kraftige kugleled.

Skubbebøjle

Kamille Komfortkørestol er udstyret med en skubbebøjle for nem manøvrering. Skubbebøjlen er udformet, så den kan bruges i flere positioner.

Skubbebøjlen vinkel kan justeres ved hjælp af de to fingerskruer, placeret på højre og venstre side af skubbebøjlen.

Bremser

Bremsegrebene er monteret på skubbebøjlen. Grebene er udstyret med en lås, som kan låses op ved at holde bremsegrebet inde, mens den røde udløserknap trykkes ind.



Skubbebøjlen monteres på beslagene, hvor fingerskruerne ses i siderne.

Hjultype

Kamille Komfortkørestol er som standard udstyret med 12½" massive hjul, i gråt nylon gummi, der ikke efterlader mærker på gulvet.

De massive hjul er udstyret med en tromlebremse som betjenes af bremsegrebene, placeret på skubbebøjlen.

Der kan tilvælges 24" drivhjul. Dette kan kræve justeringer af stellet. Drivhjul kan tilvælges, hvis borger selv kan manøvrere eller drive kørestolen frem. Drivhjulene er udstyret med tromlebremser, som også betjenes af bremsegrebene placeret på skubbebøjlen.

Kamille Komfortkørestol findes også i en variant med elektrisk fremdrift. Alternativt kan der eftermonteres en hjælpemotor på en allerede indkøbt Kamille Komfortkørestol.

Power varianten har motoren indbygget i 12½" hjulene. Derfor er totalbredden større end varianten uden hjælpemotor.

For mere information om Kamille Power Komfortstol kontakt Cobi Rehab på 7025 2522 eller cobi@cobi.dk.



Massive hjul, 12½" (tv) og 24" med drivringe (th), i gråt nylon gummi, der ikke efterlader mærker på gulvet.

Oplader

Styreboksen sidder fastmonteret under sædet. Ladekablet, der hænger fra styreboksen, tilsluttes en normal stikkontakt.

Elektronikken monteret på Kamille Komfortkørestol kan ikke forstyrre driften af enheder i kørestolens miljø, som udsender elektromagnetiske felter, fx alarmsystemer i butikker, automatiske døre med mere.

Elektrisk tilt og indstilling af ryg

Kamille Komfortkørestol kommer som standard med el-indstillelig ryg (recline) og el-tilt af sæde/ryg som enhed. Det giver en trinløs, rolig og komfortabel justering af siddeenheden, som kan foregå med borger siddende i kørestolen.

Anti-shear recline funktionen på Kamille Komfortkørestol er unik. Konstruktionen af den el-indstillelige ryg er udformet således, at den minimerer risiko for shear, da rotationsakslen er placeret ud fra bækkenets udgangspunkt.

Fjernbetjening

Kamille Komfortkørestol vækkes fra "dvale" ved tryk på en tilfældig knap på fjernbetjeningen.

Øverst på fjernbetjeningen ses batteriindikatoren. Kamille Komfortkørestol skal oplades, når batteriet blinker i det røde felt.

Kamille Komfortkørestol oplader, når ledningen i styreboksen tilsluttes en stikkontakt. En fuld opladning tager op til seks timer.

Under batteriindikatoren på fjernbetjeningen findes recline funktionen (indstilling af ryg). Piletasterne styrer recline funktionen fra 96°- 131°.

Under recline funktionen findes tilt funktionen. Sædet på Kamille Komfortkørestol kan tiltes fra 0° - 45°.

Aktuatorer

Der findes to aktuatorer under sædet på Kamille Komfortkørestol. En sæde-aktuatorer og en rygaktuator.

Elektronikken er IPX6 klassificeret. Det betyder, at Kamille Komfortkørestol og dens komponenter tåler væskespuling.

Kamille Komfortkørestol er ikke udstyret med en nødstopanordning, da kørestolen ikke kan køre af sig selv.

El-tilten aktiveres, når sæde/ryg som enhed skal vinkles. Denne funktion er vigtig for borgere med behov for varierede siddestillinger i løbet af dagen for:

- at undgå smerter
- at forbygge tryksår
- at opnå truncusstabilitet
- at opnå hovedkontrol.

El-tilt er desuden vigtig, når der skal opnås en vinkling i sidestillingen, der sikrer, at borgers hovedstillingen så vidt muligt er i lod.

El-tilt er tilsvarende en vigtig funktion i forhold til spisefunktion og synkning.

Fjernbetjeningen ses:

1. Batteriindikator
2. Recline funktion
3. Tilt funktion
4. RESET funktion



Rengøring og vedligeholdelse

Stretchcovers (anbefalet tilkøb) til Kamille Komfortkørestol kan vaskes ved 60°C og tørretumbles.

Puderne kan tørres af med en klud vredet op i mildt sæbevand.

Alle puder kan skiftes ved overgang til ny borger.

Kamille Komfortkørestol kan bruges indendørs og udendørs.

Hvis stellet er snavset, kan det tørres af med en klud vredet op i mildt sæbevand.

Det anbefales, at Kamille Komfortkørestol aftørres og støvsuges mindst én gang om ugen, og hjulene tjekkes for snavs.

Opbevaring og transport

Når Kamille Komfortkørestol ikke er i brug, bør den opbevares tørt og i temperaturer mellem -10 – 50°C.

Kamille Komfortkørestol er (uden borger) egnet til transport på land. Kamille Komfortkørestol kan ikke klappes sammen, da den har en fast ramme.

For at undgå skader i fx ryggen, frarådes det, at hjælper/plejepersonale bærer den 47 kg tunge kørestol.

Kamille Komfortkørestol tåler at blive løftet op i rammen, hvis den skal transporteres uden bruger i motoriseret køretøj.

 Kamille Komfortkørestol må ikke bruges som et sæde i et motoriseret køretøj.

Langtidsopbevaring

Ved langtidsopbevaring (over tre måneder) af Kamille Komfortkørestol bør kørestolen opbevares mellem 0-30°C og i en luftfugtighed, under 75%.

Det anbefales, at batteriet er 40-60% opladt før opbevaringen.

Når kørestolen tages i brug igen efter langtidsopbevaring, skal tilsluttes strøm og oplades i minimum 30 minutter.

Hold øje med batterikapaciteten, da batteriet vil aflade over tid.

Desinfektion

Stel, puder og skubbebøjle kan også desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

 Desinficér altid Kamille Komfortkørestol, hvis den skal overgå til ny borger. Det skal ske for at undgå krydskontamination.



Alle puder på Kamille Komfortkørestol kan udskiftes. Der er lynlås på hver eneste pude.

Specifikationer

Maks. brugervægt	140 kg
Klasse A	Primært til indendørsbrug
Grundlæggende UDI DI	5740000100024N8
Forventet holdbarhed	Minimum 7 år
Crash testet	Forventes crash testet primo 2023
Sædedybde	400-560 mm
Rygvinkel	96° - 131°, trinkløst
Sædevinkel	0° - 45°, trinkløst
Ryglænhøjde	500-525 mm
Sædebredde	340-520 mm
Totalbredde	640-830 mm
Maks. vægt af kørestol	47 kg
Maks. vægt af tungeste komponent på kørestolen	4 kg
Maks. hældning op ad bakke	6°
Massive drivhjul	12½", PU
Stellet	Stål og aluminium
Pudefyld (ryg, fod)	Granuleret latex og Krøyer-kugler
Pudefyld (sæde)	Granuleret latex og bund af skum
Pudepolstring	Strækbar gummipolstring
Skubbebøjle, indstillelig	Ja
Venderadius (pivot)	1100-1300 mm
Sammenklappelig	Nej
Generelle krav og prøvningsmetoder	ISO/EN 12182:2012, ISO/EN 12183:2014, ISO/EN 12183:2014
Modstandsdygtighed i forhold til vand	IPX6
Skubbebøjle, fodstøtterør, fod- og lægplade	Stål
Hjulgafler	Aluminium
Batteri	Li-Ion 24V 2,6 Ah
To aktuatorer	LINAK LA23
Styreboks	LINAK
Fjernbetjening	LINAK HB30

Bestilling

Model	Sædebredde mm	Sædedybde mm	Varenummer	HMI-nummer
Manuel kørestol med fjernbetjening	340-400	400-440	0350-142-000	133281
Manuel kørestol med fjernbetjening	340-400	460-500	0350-148-000	133512
Manuel kørestol med fjernbetjening	400-460	400-440	0350-242-000	133515
Manuel kørestol med fjernbetjening	400-460	460-500	0350-248-000	133518
Manuel kørestol med fjernbetjening	400-460	520-560	0350-254-000	133521
Manuel kørestol med fjernbetjening	460-520	460-500	0350-348-000	133524
Manuel kørestol med fjernbetjening	460-520	520-560	0350-354-000	133527
Power kørestol med joystick	340-400	400-440	0351-142-000	133528
Power kørestol med joystick	340-400	460-500	0351-148-000	133529
Power kørestol med joystick	400-460	400-440	0351-242-000	133627
Power kørestol med joystick	400-460	460-500	0351-248-000	133629
Power kørestol med joystick	400-460	520-560	0351-254-000	133718
Power kørestol med joystick	460-520	460-500	0351-348-000	133720
Power kørestol med joystick	460-520	520-560	0351-354-000	133722

Tilbehør

Tilbehør	Varenummer
Led til montering af aftagelige swing away benstøtte, H	0350-999-282
Led til montering af aftagelige swing away benstøtte, V	0350-999-283
Nakkestøtte, S	0350-999-040
Nakkestøtte, M	0350-999-041
Nakkestøtte, L	0350-999-042
Flexarme med tyngde	0350-999-430
Flexarme med tyngde	0350-999-431
Fodpude samlet, S	0350-999-455
Fodpude samlet, M	0350-999-456
Fodpude samlet, L	0350-999-457
Lægpude hel, S	0350-999-445
Lægpude hel, M	0350-999-446
Lægpude hel, L	0350-999-447
Rygforhøjer Plade	0350-999-218
Rygforhøjer Midt Base	0350-999-220
Rygforhøjer Side, S	0350-999-225
Rygforhøjer Side, M	0350-999-226
Rygforhøjer Side, L	0350-999-227
Rygforhøjer pude	0350-999-495
Anatomic Sitt Antirotationsbælte, S	0350-999-600
Anatomic Sitt Antirotationsbælte, M	0350-999-605
Anatomic Sitt Support, Sternumstøtte Soft Pro, M	0350-999-608
Anatomic Sitt Soft Pro, Sternumstøtte, M, speciallavet + 6 cm	0350-999-610
Anatomic Sitt Support, Sternumstøtte Soft Pro, L	0350-999-612
Anatomic Sitt Support, Thoraxsele Pro, S (bredde 25 cm)	0350-999-615
Anatomic Sitt Support, Thoraxsele Pro, M (bredde 33 cm)	0350-999-617
Anatomic Sitt Support, Thoraxsele Pro, L (bredde 40 cm)	0350-999-619
Kropsstøtte, H	0350-999-485
Kropsstøtte, V	0350-999-487
Nakkepude med tyngde	0350-999-475
Lårpudetæppe med tyngde	0350-999-477

Knæpude	0350-999-490
Bord	Kontakt Cobi Rehab
Komplet pudesæt Kamille Komfortkørestol, S	0350-999-402
Komplet pudesæt Kamille Komfortkørestol, M	0350-999-404
Komplet pudesæt Kamille Komfortkørestol, L	0350-999-406
Rygpude 1, S	0350-999-410
Rygpude 1, M	0350-999-411
Rygpude 1, L	0350-999-412
Rygpude 2, S	0350-999-415
Rygpude 2, M	0350-999-416
Rygpude 2, L	0350-999-417
Rygpude 3, S	0350-999-420
Rygpude 3, M	0350-999-421
Rygpude 3, L	0350-999-422
Ryg sidepude, H	0350-999-425
Ryg sidepude, V	0350-999-427
Frakkeskånerpude, H	0350-999-435
Frakkeskånerpude, V	0350-999-437
Lægpude delt, H	0350-999-440
Lægpude delt, V	0350-999-442
Fodpude delt, H	0350-999-450
Fodpude delt, V	0350-999-452
Fodstøtte rørpude, H	0350-999-460
Fodstøtte rørpude, V	0350-999-462
Sædepude, S	0350-999-465
Sædepude, M	0350-999-466
Sædepude, L	0350-999-467
Nakkestøttepude, S	0350-999-470
Kile til sædepude	0350-999-492
Nakkestøttepude, M	0350-999-471
Nakkestøttepude, L	0350-999-472
Armlæenspude, H	0350-999-480

Armlænsput, V	0350-999-482
Nakkestøtte stretchcover, S	Kontakt Cobi Rehab
Nakkestøtte stretchcover, M	Kontakt Cobi Rehab
Nakkestøtte stretchcover, L	Kontakt Cobi Rehab
Ryg stretchcover, M	Kontakt Cobi Rehab
Ryg stretchcover, L	Kontakt Cobi Rehab
Sæde/benstøtte samlet stretchcover, S	Kontakt Cobi Rehab
Sæde/benstøtte samlet stretchcover, M	Kontakt Cobi Rehab
Sæde/benstøtte samlet stretchcover, L	Kontakt Cobi Rehab
Sæde/benstøtte delt, stretchcover	Kontakt Cobi Rehab
Armlæn stretchcover	Kontakt Cobi Rehab
Flexarme stretchcover	Kontakt Cobi Rehab



COBI REHAB[®]

The Positioning Company



FORHANDLER OG FABRIKANT

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com