



## PRODUKTARK

# NEST® madras

- Åndbar, tryksårsreducerende og antibakteriel.

## NEST® madras

NEST® madrassen bruges på hospitaler og plejecentre til svækkede borgere med behov for en åndbar, vaskbar og trykaflastende madras.

Brugervægt max 180 kg.



- Hæmmer ophobning og vækst af skadelige bakterier.
- Let fjedrende effekt giver mulighed for, at borger kan fastholde mobilitet i liggende position.
- Let at anvende, ingen pumpe.
- Tryksårsforebyggende og trykaflastende.
- 3D-fjederstruktur sikrer konstant lav temperatur inde i madrassen.



Scan koden og find produktet på vores website.



## NEST® madras

### Konstruktion - madras

NEST® er en helmadras bestående af to lag. Begge lag er lavet af polyesterbaserede termoplastiske elastomer, forkortet TPE.

Det øverste lag er 4 cm højt, mens det nederste lag er 9 cm højt, hvilket giver en samlet højde med betræk på 15 cm.

Forskellen mellem de lag er tykkelsen på TPE tråden, som madrassen er spundet af. Det øverste lag er spundet af en tyndere tråd, hvilket giver en høj liggekomfort.

NEST® madrassen består af 90% luft. Det sikrer en meget høj åndbarhed, der klart overgår åndbarheden i en konventionel madras.

### Anvendelse


#### Forbedring af mikroklimaet

NEST® madrassen er oplagt til borgere, der oplever store varmemproblematikker i den liggende stilling.

En anden målgruppe er borgere med nedsat immunforsvar, som er sårbare overfor infektioner forårsaget af fx udefrakommende bakterier.

NEST® madrassens antimikrobielle egenskaber og unikke struktur kan hæmme ophobningen og væksten af skadelige bakterier. Færre bakterier sænker risikoen for sundhedsrelaterede infektioner.

NEST® madrassen anvendes desuden til borgere med risiko for tryksår og til borgere med nedsat funktion i bevægeapparatet, der stadig kan og vil vende sig alene. NEST® madrassens materiale har nemlig i sig selv en let fjedrende effekt.

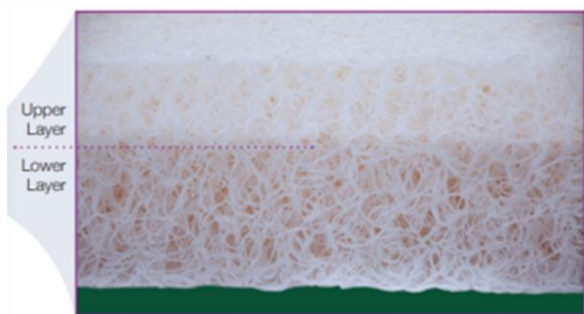

NEST® madrassen sikrer lavere hudtemperatur og lavere fugtighed. Det betyder en reduktion af risikoen for fugtinduceret vævsskader.

Den lave temperatur og fugtighed inde i madrassen forhindrer også den varmeopbygning, der kan opstå i fx en konventionel madras.

### Betræk

Det grønne yderbetræk er et inkontinensbetræk, som desuden er strækbart, åndbart og vaskbart. Yderbetrækket dækker hele madrassen og lynes med lynlås.

Yderbetrækket er flammehæmmende (crib5). Under brug dækkes yderbetrækket af et almindeligt hospitalslagen.

### Rengøring og vedligeholdelse

Daglig rengøring af det heldækkende yderbetræk kan ske med vand, rengøringsmiddel og en tør, ren klud til aftørring. Yderbetrækket kan også desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt 1000-1200ppm.

Ved svær kontamination kan der renses med et klorprodukt op til 10000 ppm. Skyl efter med vand.

Yderbetræk kan vaskes med i vaskemaskine ved 80°C og tørres i tørretumbler ved lav varme 40°C i maksimalt 10 minutter. Hæng til tørre, indtil betrækket er helt tørt.

Betrækket må ikke stryges.

NEST® madrassen kan modstå meget høje temperaturer, hvilket gør den velegnet til fx industriel maskinvask (120°C), højtryksvask og dampdesinfektion. NEST® madrassen kan lufttørres eller tørres i varmeskab.

### Transport og opbevaring

NEST® madrassen er udstyret med fire bærehåndtag. To på hver side. Hold i bærehåndtagene ved flytning eller transport. NEST® madrassen kan ikke rulles sammen og skal opbevares liggende.

NEST® madrassen skal opbevares køligt og tørt.

Placer ikke meget tunge dele på et lille område af madrassen under transport eller langtidsopbevaring.

Specifikationer	
Brugervægt	180 kg
Længde	1980 mm
Bredde	860 mm
Højde	150 mm
Madrassens vægt	11 kg
Anvendelig direkte på (indstillelig) sengebund	Ja
Brandhæmmende madras	Ja
Inkontinensbetræk	Ja
Allervernligt vask- og desinficerbart betræk	Ja (OEKO-TEK)
Brandhæmmende yderbetræk	Ja
Yderbetræk grønt	PU coated polyester
Madras materiale	TPE
ISO-standard	EN 980:2003, BS EN 14971:2007, EN 1021-1/-2:2006, EN 10993-5:2009
Forventet levetid	5 år
Produktark findes på website, hvor det kan skaleres op til stor størrelse ved synshandicap	
EU Direktiv	93/42/EEC
Genanvendelig	Ja
Klasse	1 CE MD

Model	Længde	Bredde	Højde	Varenummer	HMI-nummer
NEST® madras med betræk	1980 mm	860 mm	150 mm	2400-086-198	
<b>Reserve dele</b>					
Betræk	1980 mm	860 mm		2400-999-001	

Kontakt Cobi Rehab på [cobi@cobi.dk](mailto:cobi@cobi.dk) eller 7025 2522, hvis du ønsker mere information, undervisning, produktfremvisning eller gratis afprøvning af ét eller flere hjælpemidler.



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

---



**FABRIKANT**

**Meditec Medical Ltd**  
Unit 28, Whitestown  
Drive  
Tallaght, Dublin 24  
Ireland  
[Medtitechmedical.com](http://Medtitechmedical.com)

**FORHANDLER**

**Cobi Rehab**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
+45 7025 2522  
[cobirehab.com](http://cobirehab.com)