



SLITAGE- OG VEDLIGEHOLDELSESOVERSIGT

Kamille Power Komfortkørestol

Unik danskudviklet komfortkørestol til sansestimulering

Den individuelle tilpasning og den høje komfort er med til at højne både aktivitetsniveauet, funktionsniveauet og livskvaliteten. Med indbyggningsmotor til fremdrift og mulighed for to joystick. Brugervægt maks. 140 kg.





OP TIL 140 KG

- Asymmetrisk justering af ryg- og sædestykke
- Exceptionelt fleksible armlæn
- Elektrisk indstilling af ryg samt tilt af sæde og ryg (som standard)
- Elektrisk fremdrift (indbyggningsmotor), der betjenes med joystick
- Swing away benstøtter (som standard)
- Swing away armlæn (som standard)
- Specialudviklede flytbare, polstrede kropsstøtter (tilkøb)
- Aftagelige swing away benstøtter (tilkøb)



Slitage & vedligeholdelsesoversigt

| Del | Handling | Sikkerhed |
|---|--|--|
| <p>Vedligehold af dette produkt skal ske i forhold til, hvor meget produktet anvendes. Produktets levetid kan påvirkes af, hvor godt det vedligeholdes.</p> <p>I nedenstående tabel anvises, hvilke dele der i forhold til vedligehold og slitage er sikkerhedskritisk, sikrer produktets funktionalitet, hvordan disse vedligeholdes og repareres, og hvordan dele udskiftes.</p> <p>Vær opmærksom på, at rengøring med klorholdige midler kan få metaller til at ruste/korrodere.</p> | | |
| Dæk | <p>Kontrollér jævnlige visuelt på yder- og inderside for slid og skader.</p> <p>Beskadigede eller meget slidte dæk skal skiftes ud.</p> <p>Hvis dæk er over 5 år, SKAL de skiftes, da der kan opstå usynlige skader med tiden.</p> | <p>⚠ Skift slidte og skadede dæk.</p> |
| Hjul | <p>Hjulene skal køre parallelt og må ikke slingre eller være eksede. Hjulene skal under kørslen køre let og lydløst. Løft hvert hjul fra gulvet og mærk om hjulet sidder fast og er uden slør på akslen.</p> <p>Ved beskadigelse skal hjulene skiftes ud.</p> | <p>⚠ Det kan være sikkerhedskritisk, hvis hjulene ikke er intakte og vedligeholdt.</p> |
| Bremser | <p>Bremserne er indbygget i motoren. Det vil sige, når joysticket slippes, stopper kørestolen.</p> <p>Ved kørsel uden motor skal det sorte frigear-håndtag være trykket ned på begge hjul.</p> <p>Når motoren er i frigear, kan systemet ikke benyttes. Joysticket blinker, hvis systemet tændes i frigear.</p> <p>Bring motoren ud af frigear ved at skubbe håndtag på begge hjul op. Nu aktiveres parkeringsbremsen automatisk. Sluk for systemet, og tænd det igen.</p> | <p>⚠ Kørestolen må aldrig sættes i frigear under transport i motoriseret køretøj. Systemet skal slukkes under transport.</p> |
| Tilt & Recline | <p>Ændring af hoftevinkel eller sædevinkel er elektronisk styret.</p> <p>Motorerne (aktuatorerne) er vedligeholdelsesfrie.</p> <p>Beskadigede ledninger eller batterier, styreboks og motorer med revner eller skader skal udskiftes.</p> | <p>⚠ Under opladning af kørestolen SKAL kørestol, lader og ledning være tørre.</p> |
| Skrueforbindelser | <p>Alle skrueforbindelser skal være fastspændt</p> <p>Alle skrueforbindelser, der ikke skal løsnes jævnlige for justering, SKAL være påført BLÅ Loctite (gevindsikring) for at sikre, at de ikke rasler ud i løbet af produktets levetid.</p> <p>Skrueforbindelser, der jævnlige løsnes for justering, skal være påført GRØN Loctite (gevindsikring).</p> <p>Selvlåsende møtrikker og skruer mister med tiden deres effekt pga. gentagende justeringer.</p> <p>Derfor skal de udskiftes af en autoriseret forhandler ved større gennemgange af produktet, f.eks. hvert andet år ved almindelig og hyppig brug.</p> | <p>⚠ Det kan være fatalt at anvende en kørestol, der ikke er spændt korrekt sammen.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | Alle funktioner på Kamille Power Komfortkørestol skal fungere. Ellers skal den repareres af faguddannet personale før ibrugtagning. | |
| Sædepolstring, ryg-, ben- og polstrede frakkeskånere | <p>I tilfælde af snavs skal polstring og puder rengøres iht. rengøringsanvisningerne.</p> <p>Tjek al polstring og tekstil jævnligt for revner og beskadigelse.</p> <p>Vær opmærksom på, at mængden af fyldet i puderne skal tilpasses borgers behov og siddestilling. Fyldet vil med tiden falde sammen og skal udskiftes/efterfyldes ca. en gang om året.</p> <p>Ved slitage eller beskadigelse skal polstring og puder udskiftes.</p> | <p> Puder, der ikke er fyldte korrekt, tilpasset borger, kan nemt forårsage skader på borger. Beskadiget tekstil er svært at desinficere og kan skabe infektioner.</p> |
| Rengøring | <p>I tilfælde af snavs skal polstring og puder rengøres iht. rengøringsanvisningerne.</p> <p>Hvis kørestolen overgår til anden borger, skal kørestolen altid desinficeres for at undgå krydskontaminering. Kørestole med revner eller skader må ikke overgå til ny borger, før de er repareret.</p> <p>Anvendes Kamille Power Komfortkørestol udenfor kan kørestolen med fordel rengøres oftere. Det forlænger kørestolens levetiden.</p> <p>Husk også at rengøre og desinficere joysticket.</p> <p>Hvis Kamille Power Komfortkørestol skal vaskes i vaskehal på fx depot eller hospital skal alle elektriske komponenter afmonteres. Kontakt da Cobi Rehab på 7025 2522.</p> | <p> De elektriske komponenter på Kamille Power tåler ikke vand i store mængder (IPX4). Ved behov for vask kontakt da Cobi Rehab.</p> |



COBI REHAB[®]
The Positioning Company



FORHANDLER OG FABRIKANT

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com