



BRUGERVEJLEDNING

Dual nakkestøtte

Nakkestøtte med flere indstillingsmuligheder.

Dual Nakkestøtte til kørestol er udviklet til komplet støtte af hovedet. Nakkestøttens seks fingre er foret med gelpuder for maksimal komfort.

Fingrene støtter tre forskellige niveauer på hovedet og kan afhjælpe u hensigtsmæssig lateral fleksion og rotation.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed.....	3
2. Symbolforklaring.....	4
3. Generelt	5
4. Anvendelse.....	5
5. Montering	6
6. Transport og opbevaring	7
7. Rengøring og vedligeholdelse	7
8. Bortskaffelse	7
9. Garanti.....	8
10. Specifikationer	9
11. Tilbehør.....	9

1. Sikkerhed



ADVARSEL

Dual nakkestøtte må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen og justeringen af Dual nakkestøtte. Ved forkert anvendelse kan borger lide skade.

Brugervejledningen skal læses grundigt, før Dual nakkestøtte tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod Sikkerhedsvejledninger mærket med .

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert anvendelse af Dual nakkestøtte.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis nakkestøtten er beskadiget eller har mangler. Brug aldrig egne erstatningsreservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader eller u hensigtsmæssige situationer, der opstår efter reparationer, der er foretaget uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.



SIKKERHEDSVEJLEDNINGER










Sørg for at skruer og hardware er strammet.

Dual Nakkestøtte bør ikke bruges, hvis begrænsning af bevægelsesområdet for hoved og nakke vil medføre vejrtrækningsbesvær, synkebesvær eller forværring af en allerede eksisterende tilstand.

Brug kun godkendt tilbehør.

Desinficer ved overgang til ny bruger.

2. Symbolforklaring

Følgende symboler findes i brugervejledningen eller på produktets label.	
	Advarsel!
	Overensstemmelseserklæring ifølge Direktivet for medicinsk udstyr, EU 2017/745
	Cobi varenummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Fabrikant
	Medicinsk udstyr, klasse 1
	Brugervægt
	Læs manual
CE-Label er placeret på nakkestøttens nederste ramme. Eksempel på label kan ses herunder.	



3. Generelt

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om målgruppen for og anvendelsen af Dual nakkestøtte. Brugervejledningen indeholder også en specifikationstabel.

Den nyeste version af denne brugervejledning finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er den nyeste.

Hvis du har brug for en brugervejledning, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes produktarket i PDF-form på [cobirehab.com](https://www.cobirehab.com), som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på telefon +45 7025 2522 eller cobi@cobi.dk, hvis du ønsker flere oplysninger om Dual nakkestøtte.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

Produktsikkerhedsmeddelelser og tilbagekaldelse af produkter kan ses på hjemmesiden under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/>

4. Anvendelse

Dual Nakkestøtte til montering på standard kørestole er udviklet til komplet støtte af hovedet.

Nakkestøttens seks fingre er foret med gelpuder for maksimal komfort. Fingrene støtter tre forskellige niveauer på hovedet og kan afhjælpe uhensigtsmæssig lateral fleksion og rotation.

Nakkestøttens design muliggør luftcirkulation, da den ikke slutter tæt, men i stedet tillader luft mellem de seks fingre. Fingrene er nemme at positionere.

Pandebånd

Et diskret, smalt pandebånd giver støtte foran. Fix lock (klemmespænde) holder pandebåndet på plads. Nakkestøtten kan også bruges uden pandebåndet.

Størrelser

Dual Nakkestøtte findes i tre størrelser: Small, large og pædiatrisk (barn).

Tilpasning og specialløsninger

Kontakt os på cobi@cobi.dk eller på 7025 2522 for at høre mere om bestilling og indstilling af Dual Nakkestøtte.

Kontakt os også gerne omkring specialløsninger i forhold til Dual Nakkestøtte og Kamille eller Kelvin Komfortkørestol.

5. Montering

Montering

Dual Nakkestøtte er let at montere på forskellige typer af kørestole og er nem at frigøre ved behov for småjusteringer.

Dual Nakkestøtte er konstrueret med en unik legeringskerne, der muliggør selektiv justering uden værktøj.

Monteringskiven rummer en 1" (25mm) kugle. Skiven kan fjernes for at påsætte brugerdefineret hardware ved hjælp af m5-skruer. Der er tre hardware adaptore tilgængelige.

Kontakt os på cobi@cobi.dk eller på 7025 2522 for at høre mere om montering af Dual Nakkestøtte.




Dual nakkestøtte leveres med et pandebånd til støtte fortil på hovedet.

Dual nakkestøtte kan bruges med og uden pandebånd



Puderne omformes let med hånden, når brugeren flyttes.

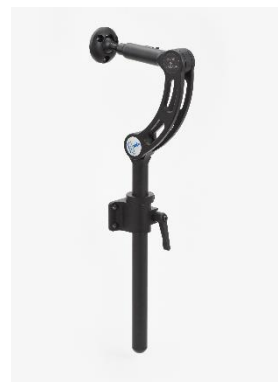

Dual nakkestøtte kan kombineres med flere forskellige typer af nakkestøtte arme.

6. Transport og opbevaring

Når Dual nakkestøtte ikke er i brug, bør den opbevares tørt og beskyttet mod stærkt sollys ved temperaturer mellem 0°C til +45°C og ved en relativ luftfugtighed på 20 - 75%.

Ovennævnte anbefalinger for opbevaring gælder også ved opbevaringsperioder over 4 måneder.

Transport

Dual nakkestøtte alene er egnet til land- og/eller lufttransport.

Når Dual nakkestøtte er påmonteret en kørestol, afhænger egnetheden til transport af den pågældende kørestol.

7. Rengøring og vedligeholdelse

Dual Nakkestøtte er let at holde ren. Nakkestøtten rengøres med en klud med sæbe og vand.

Lad nakkestøtten lufttørre efter vask.

Desinfektion

Dual nakkestøtte og puder kan desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

8. Bortskaffelse

Når Dual nakkestøtte ikke længere er i brug, skal den bortskaffes på miljøforsvarlig vis.

Kontakt Cobi Rehab eller kommunen for yderligere information om bortskaffelse.

Genanvendelse

Dele af Dual nakkestøtte kan genanvendes. Kontakt Cobi Rehab for mere information.

9. Garanti

Garantiperioden for Dual nakkestøtte er **et år fra købsdato** og dækker produktionsfejl eller defekter ved levering. Fakturaen gælder som garantibevis.

Cobi Rehab garanterer, at Dual nakkestøtte er fejlfri, når den leveres. Skulle der mod forventning være mangler eller skade på Dual nakkestøtte ved modtagelsen, så kontakt Cobi Rehab med det samme.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt.

- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale.

9.1 Utilsigtet hændelse

Enhver hændelse, der er indtruffet i forbindelse med brugen af Dual nakkestøtte, skal indberettes til Cobi Rehab.

9.2 Efter forventet levetid

Efter den forventede levetid er det vigtigt, at der foretages en samlet vurdering af produktet, inden fortsat brug.

Efter den forventede levetid kan Cobi Rehab ikke garantere egnethed og sikkerhed for produktet, da Cobi Rehab ikke har kontrol over, hvordan produktet er brugt og slidt.

Den samlede vurdering af produktet skal udføres af kvalificeret fagpersonel, og som et minimum

Garantien omfatter ikke:
- sliddele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at Dual nakkestøtte er blevet håndteret på en uhensigtsmæssig måde.

Ved skade på grund af forkert brug, faktureres både service og anvendte reservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader af nogen art.

⚠ Mangel på vedligeholdelse kan skade produktet, forkorte holdbarheden eller have indvirkning på eller påvirke ryggens kvalitet.

skal der tages højde for, hvordan produktet er blevet brugt, produktets tilstand og dets komponenter.

Cobi Rehab kan altid foretage en sådan vurdering.

10. Specifikationer

Vægt nakkestøtte	400-800 gr.
Nakkestøtte skelet	Aluminium
Nakkestøtte polstring	Blødt og slidstærkt nylon/lycra strikstof
Indhold gelpuder	Blød silikonegel
Højde	12 - 15 cm
Bredde	34 - 52 cm
Kompatibel med Kamille og Kelvin Komfortkørestol	Ja
Genanvendelig	Ja
Rengøring	Rengør med en klud med vand og sæbe. Lufttørres efterfølgende.
Desinficerbar	Ja
Produktets forventede levetid	3 år
Brugervejledning og produktark findes på website og kan skaleres op til stor skriftstørrelse ved synshandicap.	

11. Tilbehør

Tilbehør	Varenummer
Dual arm	0311-999-023
Axion Rotationsarm, 60 grader	0311-999-030
Axion Rotationsarm, 90 grader	0311-999-031



COBI REHAB[®]

The Positioning Company



FABRIKANT OG FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com