



PRODUKTARK

NEST[®] sædepude

- Åndbar, tryksårsreducerende og antibakteriel.

NEST[®] sædepude

NEST[®] sædepuden bruges på plejecentre til svækkede borgere med behov for en åndbar, vaskbar og trykaflastende sædepude.

Brugervægt max 120 kg.



- Hæmmer ophobning og vækst af skadelige bakterier.
- Let fjedrende effekt giver mulighed for, at borger kan fastholde mobilitet i siddende position.
- Let at anvende.
- Tryksårsforebyggende og trykaflastende.
- 3D-fjederstruktur sikrer konstant lav temperatur inde i sædepuden.



Scan koden og find produktet på vores website.



NEST® sædepude

Konstruktion - sædepude

NEST® er en sædepude lavet af polyesterbaserede termoplastiske elastomer, forkortet TPE.

NEST® sædepuden består af 90% luft. Det sikrer en meget høj åndbarhed, der klart overgår åndbarheden i en konventionel sædepude.

NEST® sædepuden sikrer lavere hudtemperatur og lavere fugtighed. Det betyder en reduktion af risikoen for fugtinduceret vævsskader.

Den lave temperatur og fugtighed inde i sædepuden forhindrer også den varmeopbygning, der kan opstå i fx en konventionel sædepude.

Anvendelse

Forbedring af mikroklimaet

NEST® sædepuden er oplagt til borgere, der oplever store varmemproblematikker i den siddende stilling.

En anden målgruppe er borgere med nedsat immunforsvar, som er sårbare overfor infektioner forårsaget af fx udefrakommende bakterier.

NEST® sædepudens antimikrobielle egenskaber og unikke struktur kan hæmme ophobningen og væksten af skadelige bakterier. Færre bakterier sænker risikoen for sundhedsrelaterede infektioner.

NEST® sædepuden anvendes desuden til borgere med risiko for tryksår og til borgere med nedsat funktion i bevægeapparatet, da sædepudens materiale i sig selv har en let fjedrende effekt.



Betræk

Det grønne yderbetræk er et inkontinensbetræk, som desuden er strækbart, åndbart og vaskbart. Yderbetrækket dækker hele sædepuden og lynes med lynlås.

Yderbetrækket er flammehæmmende (crib5). Under brug dækkes yderbetrækket af et almindeligt lagen.

Rengøring og vedligeholdelse

Daglig rengøring af det heldækkende yderbetræk kan ske med vand, rengøringsmiddel og en tør, ren klud til aftørring. Yderbetrækket kan også desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt 1000-1200ppm.

Ved svær kontamination kan der renses med et klorprodukt op til 10000 ppm. Skyl efter med vand.

Yderbetræk kan vaskes med i vaskemaskine ved 80°C og tørres i tørretumbler ved lav varme 40°C i maksimalt 10 minutter. Hæng til tørre, indtil betrækket er helt tørt.

Betrækket må ikke stryges.

NEST® sædepuden kan modstå meget høje temperaturer, hvilket gør den velegnet til fx industriel maskinvask (120°C), højtryksvask og dampdesinfektion. NEST® sædepuden kan lufttørres eller tørres i varmeskab.

Transport og opbevaring

NEST® sædepuden vejer cirka 600 gr. og er derfor let at flytte rundt.

NEST® sædepuden kan ikke foldes sammen og skal opbevares liggende.

NEST® sædepuden skal opbevares køligt og tørt.

Placer ikke meget tunge dele på et lille område af sædepuden under transport eller langtidsopbevaring.

Specifikationer	
Brugervægt	120 kg
Længde	400 - 460 mm
Bredde	400 - 460 mm
Højde	70 mm
Sædepudens vægt	600 gr.
Anvendelig direkte på kørestol	Ja
Brandhæmmende materiale sædepude	Ja, Crib 5
Inkontinensbetræk	Ja
Allervernligt vask- og desinficerbart betræk	Ja (OEKO-TEK)
Brandhæmmende yderbetræk	Ja, Crib 5
Yderbetræk grønt	Polyurethan
Sædepude materiale	TPE
ISO-standard	EN 980:2003, BS EN 14971:2007, EN 1021-1/-2:2006, EN 10993-5:2009
Forventet levetid	5 år
Produktark findes på website, hvor det kan skaleres op til stor størrelse ved synshandicap	
EU Direktiv	93/42/EEC
Genanvendelig	Ja
Klasse	1

Model	Længde	Bredde	Højde	Varenummer	HMI-nummer
NEST® sædepude med betræk	400 mm	400 mm	70 mm	0235-040-040	-
NEST® sædepude med betræk	430 mm	430 mm	70 mm	0235-043-043	-
NEST® sædepude med betræk	460 mm	460 mm	70 mm	0235-046-046	-

Kontakt Cobi Rehab på cobi@cobi.dk eller 7025 2522, hvis du ønsker mere information, undervisning, produktfremvisning eller gratis afprøvning af ét eller flere hjælpemidler.



COBI REHAB[®]
The Positioning Company



FABRIKANT

Meditec Medical Ltd
Unit 28, Whitestown
Drive
Tallaght, Dublin 24
Ireland
Medtitechmedical.com

FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com