



PRODUKTARK

Spex Manta ryg til kørestol

Spex Manta rygstøtte er designet til at sikre komfort, stabilitet og funktionalitet for kørestolsbrugere med behov for moderat til svær rygstøtte.

Rygstøttens udformningen gør det muligt at foretage ergonomisk justeringer, som kan forbedre borgers kropsstilling og/eller forebygge/reducere fysiske udfordringer forbundet med stillesiddende arbejde og aktiviteter.

Brugervægt op til 90/136 kg.



- Indstillelig sidestøtter.
- Placering af ryggen kan justeres i højde og dybde.
- Let at tage af/sætte ryggen på.
- Fås i forskellige størrelser og bredder.
- Sikker og stabil positioneringsløsning.
- Kan monteres med og uden kropsstøtter.
- Kompatibel med de fleste standard kørestole.
- Kan udstyres med flere typer af nakkestøtter.



Scan koden og se produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Om dette produktark

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger om anvendelsen af Spex Manta ryg. Det indeholder også visse specifikationer for Spex Manta ryg.

Den nyeste version af dette produktark finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er det nyeste.

Hvis du har brug for et produktark, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes det i PDF-form på cobirehab.com, som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Spex Manta ryg

Spex Manta er fremstillet i aluminium og har huller i skallen til ventilation og vertikale slidser til placering af kropsstøtter. Slidsernes placering gør det muligt at ændre placeringen af kropsstøtterne i højden og dybden.

Spex Manta kan vinkles over en horisontal akse, hvilket betyder, at borgere med fx asymmetri i OE opnår fuld understøttelse.

Skum

Skummet, der dækker rygskallen er overdimensioneret, hvilket sikrer, at der ingen hårde kanter er.

Der kan indsættes skumkiler flere steder på ryggen ved fx scoliose, som igen sikrer bedst mulig understøttelse.

Rengøring og vedligeholdelse

Spex Manta ryg og betrækket kan tørres af med en klud opvredet i mildt sæbevand.

Betrækket uden skumstykke kan vaskes på 40° og tørretumbles på lav varme.

Skumstykket fjernes ved at lyne op i bunden af betrækket. Luk lynlåsen under vask.

Opbevaring og transport

Når Spex Manta ryg ikke er i brug, bør den opbevares tørt og beskyttet mod stærkt sollys ved temperaturer mellem 0°C til + 45°C og ved en relativ luftfugtighed på 20 - 75%.

Ovennævnte anbefalinger for opbevaring gælder også ved opbevaringsperioder over 4 måneder.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på tel. 7025 2522 eller på cobi@cobi.dk, hvis du ønsker flere oplysninger om Spex Manta ryg.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

Kropsstøtterne

Kropsstøtterne (tilkøb) monteres direkte på rygskallen og kan derfor placeres i flere højde og dybder afhængigt af borgers behov.

Kropsstøtterne er også foret med overdimensioneret skum.

Nakkestøtte

Spex Manta ryg er kompatibel med flere forskellige nakkestøtter, heriblandt Kamille nakkestøtte.

Nakkestøtten kan ligeledes placeres forskellige på rygge, så den også tilgodeser borgere med behov for fx en højreorienteret nakkestøtte.

Betræk og skum bør skiftes ved overgang til ny bruger.

Desinfektion

Spex Manta ryg uden betræk kan desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

Transport

Spex Manta ryg alene er egnet til land- og/eller lufttransport.

Når Spex Manta ryg er påmonteret en kørestol, afhænger egnetheden til transport af den pågældende kørestol.

Specifikationer

Brugervægt	90/136 kg
Materiale	Aluminium
Højde	35,5 – 51 cm
Bredde	30,5 – 51 cm
Vægt rygskal	1,5 – 4 kg
Vaskbart betræk	82% nylon og 18% spandex
Pudeoverflade	PU
Skum (i betrækket)	100% polyurethan
Kompatibel med nakkestøtte og flexarme	Ja
Forlængerbeslag til yderligere vinkeljustering af ryg	Tilkøb
Produktets forventede levetid	5 år
Brugervejledning og produktark findes på website og kan skaleres op til stor skriftstørrelse ved synshandicap.	

Bestilling

Model	Bredde cm	Højde cm	Varenummer	Varenummer betræk
Spex kilesæt til rygge, små			1209-2713-300	
Spex kilesæt til rygge, store			1209-2720-300	
Spex Manta Ryg	30,5	35,5	1254-1214-000	1254-1214-000C
Spex Manta Ryg	30,5	40,6	1254-1216-000	1254-1216-000C
Spex Manta Ryg	35,5	40,6	1254-1416-000	1254-1416-000C
Spex Manta Ryg	35,5	45,7	1254-1418-000	1254-1418-000C
Spex Manta Ryg	40,6	45,7	1254-1618-000	1254-1618-000C
Spex Manta Ryg	40,6	51	1254-1620-000	1254-1620-000C
Spex Manta Ryg	43,2	45,7	1254-1718-000	1254-1718-000C
Spex Manta Ryg	43,2	51	1254-1720-000	1254-1720-000C
Spex Manta Ryg	45,7	45,7	1254-1818-000	1254-1818-000C
Spex Manta Ryg	45,7	51	1254-1820-000	1254-1820-000C
Spex Manta Ryg	51	45,7	1254-2018-000	1254-2018-000C
Spex Manta Ryg	51	51	1254-2020-000	1254-2020-000C
Spex Supershape	40,6	51	1256-1620-OSS	

Tilbehør

Model	Bredde cm	Varenummer
Spex Manta monteringsbeslag, Quad Mount komplet		1259-2430-100
Spex Manta monteringsbeslag, Heavy Duty Quad Mount komplet		1259-2435-100
Spex - Manta ryg - Sidestøtte Small, passer på	25,4 - 31	1267-2700-100
Spex - Manta ryg - Sidestøtte Medium, passer på	33 - 38	1267-2710-100
Spex - Manta ryg - Sidestøtte Large, passer på	41+	1267-2720-100
Spex - Nakkestøtte Kugleled til plade		1272-4172-100
Spex - Nakkestøtte Arm - stylo 260		1274-0082-100
Spex - Nakkestøtte Stang		1274-1200-100
Spex - Nakkestøtte Stang med swing away		1274-2200-100
Spex - Nakkestøtte Beslag		1274-4140-100
Spex - Lateral justerbar nakkestøtte, small		1275-0361-300
Spex - Lateral justerbar nakkestøtte, medium		1275-0362-300
Spex - Lateral justerbar nakkestøtte, large		1275-0661-600
Spex - Nakkestøtte		1275-0662-600