



Produktark

Posigo hoftesele

Unik og justerbar hoftesele.

En blød, bred og elastisk hoftesele, der sikrer høj komfort for brugeren.

Den unikke løsning med drejkeknapper gør, at der kan finjusteres eller justeres asymmetrisk. De forskellige del på hofteselen kan udskiftes, hvilket sikrer en høj genbrugsværdi.



- Individuelt justerbare drejkeknapper til finjustering.
- Flere typer af låsemekanismer (klikspænde eller stift lukning).
- Høj genbrugsværdi, da POSIGO kan gentilpasses til ny bruger.
- Sikker og stabil positioneringsløsning.
- Aftagelige 4-punktstropper til at fastholde hofteselen i den korrekte højde.
- Flere forskellige størrelser.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Om dette produktark

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger om anvendelsen af POSIGO hoftesele. Det indeholder også visse specifikationer for POSIGO hoftesele.

Den nyeste version af dette produktark finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er det nyeste.

Hvis du har brug for et produktark, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes det i PDF-

form på cobirehab.com, som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på 7025 2522 eller på cobi@cobi.dk, hvis du ønsker flere oplysninger om POSIGO hoftesele.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

POSIGO hoftesele

Det hollandske hoftebælte POSIGO er udviklet af et team af ergoterapeuter, produktdesignere og rehabiliteringsspecialister, med udgangspunkt i brugeren.

Det betyder, at hofteselen er et gennemtestet hjælpemiddel med fokus på autonomi, brugervenlighed og komfort.

POSIGO hoftesele kan justeres asymmetrisk. Det gør det muligt at imødekomme anatomiske udfordringer.

Drejknapper til finjustering

De individuelt justerbare drejknapper giver fleksibilitet, så hofteselen kan blive løsere eller strammere på begge sider (også under brug) for optimal støtte og balance. Selv ved asymmetrisk siddestilling.

Drejknapperne er placeret, så de kan betjenes af både bruger og terapeut.

Rengøring og vedligeholdelse

Håndvask ved maks. 30°C. Brug ved behov en blød vaskemiddel for sarte stoffer. Må ikke stryges, centrifugeres eller tørretumbles.

Opbevaring og transport

Når POSIGO hofteselen ikke er i brug, bør den opbevares tørt og beskyttet mod stærkt sollys ved temperaturer mellem 0°C til +45°C og ved en relativ luftfugtighed på 20 - 75%.

Ovennævnte anbefalinger for opbevaring gælder også ved opbevaringsperioder over 4 måneder.

Låseindstillinger

Hoftesele er individuelt justerbar og kan anvendes på mange måder afhængigt af brugers behov. Monteringen af hofteselen er relativt let, men bør altid udføres af en terapeut eller en sundhedsprofessionel med tilsvarende faglighed.

Forskellige typer af låsemekanismer (klikspænde eller stift lukning) er tilgængelige som tilkøb. Det gør, at det som regel altid vil være en konfiguration tilgængelig som passer bruger.

Aftagelige 4-punktstropper

4-punktstropperne sikrer ekstra fikseringsstøtte ved behov. Stropperne monteres og justeres nemt. Stropperne kan genbestilles, hvis de bliver væk.

Udskiftelige dele

De fleste dele på hofteselen kan udskiftes ved slitage.

Desinfektion

POSIGO hofteselen kan desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

Transport

POSIGO hofteselen er ikke et transportbælte til brug i motoriseret køretøj.

Specifikationer

Størrelse	XS, S, M og L
Materiale	Blød polstring og nylon stropper
Længde	33-66 cm
Udviklet til børn	Nej
Beregnet til brug i vand	Nej
Dele af hofteselen er mellem benene	Nej
Sikret mod utilsigtet åbning	Ja/Nej (afhængigt af model)
Genanvendelig	Ja
Desinficerbar	Ja
Produktets forventede levetid	2 år
Brugervejledning og produktark findes på website og kan skaleres op til stor skriftstørrelse ved synshandicap.	



Bestilling

Model	Bæltelængde cm	Varenummer	HMI-nummer
POSIGO 4-punkt hoftese med standardspænde str. XS	33	0355-999-021	137187
POSIGO 4-punkt hoftese med standardspænde str. S	33	0355-999-022	137190
POSIGO 4-punkt hoftese med standardspænde str. M	44	0355-999-024	137193
POSIGO 4-punkt hoftese med standardspænde str. L	56	0355-999-026	137196
POSIGO 4-punkt hoftese med sikkerhedsspænde str. XS	33	0355-999-020	137178
POSIGO 4-punkt hoftese med sikkerhedsspænde str. S	33	0355-999-023	137181
POSIGO 4-punkt hoftese med sikkerhedsspænde str. M	44	0355-999-025	137182
POSIGO 4-punkt hoftese med sikkerhedsspænde str. L	56	0355-999-027	137186