



PRODUKTBLATT

Bariatrische Unterarmgehstütze

Starke und funktionelle Unterarmgehstütze, die für den bariatrischen Benutzer entwickelt wurde.

Die Unterarmgehstütze ist für Benutzer mit einem Gewicht von bis zu 325 kg ausgelegt. Sie wird in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Privathaushalten eingesetzt. Die bariatrische Unterarmgehstütze kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden.



- Höhenverstellbar
- Entworfen von Cobi Rehab
- Anatomischer Handgriff
- Starke Rohrkonstruktion
- Tragfähigkeit bis zu 325 kg
- Drei Modelle: Universal-, Rechts- und Linksmodell

Bariatrische Unterarmgehstütze

Anwendung und Konstruktion

Bei der bariatrischen Unterarmgehstütze handelt es sich um einen verstärkten Gehstock aus Stahl, der speziell entwickelt wurde, um Benutzern mit einem Gewicht von bis zu 325 kg Unterstützung und Sicherheit beim Gehen zu bieten.

Die Unterarmgehstütze hat eine breite Unterarmstütze und wird mit universellen oder anatomischen Handgriffen mit eingebauten Reflektoren geliefert.

Die Unterarmgehstütze hat eine 25 mm starke Rohrkonstruktion und ist über ein Clipsystem mit einem durchgehenden Stahlstift höhenverstellbar.

Reinigung und Wartung

Die bariatrische Unterarmgehstütze wird mit Wasser und einem normalen Reinigungsmittel gereinigt oder mit einem Chlorprodukt mit einer Chlorkonzentration von 1000-1200 ppm desinfiziert.

Desinfizieren Sie die bariatrische Unterarmgehstütze immer, wenn Sie sie an einen neuen Benutzer weitergeben. Dadurch wird eine Kreuzkontamination vermieden.

Einstellung

Um die Höhe der Unterarmgehstütze einzustellen, entfernen Sie den Clip und schieben Sie das Innenrohr des Stockbeins in die gewünschte Position. Stecken Sie dann den Stift des Clips durch die Löcher und drücken Sie anschließend den Clip in die korrekte Position.

Die Unterarmgehstütze darf erst dann verwendet werden, wenn der Clip für die Höheneinstellung vollständig eingerastet ist

Der Clip und der durchgehende Stift müssen regelmäßig geprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. Wenn der Clip nicht wie vorgeschrieben geprüft wird, kann dies zu Fehlfunktionen führen

Modell	Artikelnummer
Unterarmgehstütze mit Universalhandgriff	0205-000-000C
Unterarmgehstütze mit anatomischem Handgriff rechts	0205-000-000RC
Unterarmgehstütze mit anatomischem Handgriff links	0205-000-000LC

Technische Daten	
Benutzergewicht max.	325 kg
Höhenverstellbar	68-110 cm
Gewicht	1,5 kg
Reflektoren	Ja
Unterarmstütze	15 cm
Handgriff	14 cm
Material	Chrom-Molybdän-Stahl/SAE41-30
Gabel	Nylon mit Fasern
ISO-Klassifizierung	ISO 12 03 06 - 04
Lebenserwartung des Produkts	7 Jahre
Risikoklasse	I
Basis UDI	5740000100010MV
UDI-DI	5740000102889, 5740000102896, 5740000102902
Gebrauchsanleitung und Produktblatt sind auf der Website verfügbar und können für sehbehinderte Benutzer auf eine große Schriftgröße skaliert werden.	

