



## PRODUKTBLATT

# Dusch- und Toilettenstuhl mit Rädern

**Kräftiger und breiter Dusch- und Toilettenstuhl mit Freiraum für das Gewebe im Gesäßbereich unter der Rückenlehne. Verstellbare Fußstützen, damit auch Benutzer mit viel Gewebe an den Oberschenkeln bequem sitzen können.**

Der Dusch- und Toilettenstuhl mit Rädern wird in Pflegeheimen, Einrichtungen und Krankenhäusern eingesetzt. Benutzergewicht von bis zu 325 kg.



- Bremsen an zwei Rädern, auf Wunsch auch an allen vier Rädern.
- Möglichkeit von Butterfly-Armlehnen, die zwischen den Armlehnen für zusätzliche Breite sorgen.
- Erhältlich in zwei Größen: 61 cm und 71 cm.
- Sorgt für eine bessere Arbeitsumgebung für das Pflegepersonal und für ein angenehmes und sicheres Baderlebnis für den Benutzer.



## Dusch- und Toilettenstuhl mit Rädern

Der Dusch- und Toilettenstuhl mit Rädern ist für bariatrische Benutzer bestimmt, und zwar in Verbindung mit der Beförderung ins und aus dem Bad, in die Dusche und beim Besuch der Toilette.

Der Dusch- und Toilettenstuhl mit Rädern ist für den Einsatz im Innenbereich, z. B. in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Einrichtungen, vorgesehen.

Der Dusch- und Toilettenstuhl mit Rädern ist für Benutzer mit eingeschränkten körperlichen Fähigkeiten bis zu einem Körpergewicht von 325 kg ausgelegt.

## Konstruktion

Der bariatrische Dusch- und Toilettenstuhl mit Rädern ist in zwei Sitzbreiten erhältlich, 61 cm und 71 cm. Der Stuhl hat einen 5 cm hohen Sitz aus PU-Schaum und eine 7 cm große Öffnung zwischen Sitz und Armlehnen.

Die Fußstützen sind für ein Gewicht von jeweils 100 kg ausgelegt und können in Höhe und Breite bis zu einem Außenmaß von 110 cm verstellt werden. Das bedeutet, dass auch Nutzer mit viel Gewebe an der Innenseite der Oberschenkel bequem im Stuhl sitzen können.

Unter der Rückenlehne ist ein 32 cm breiter Freiraum zum Sitz für das Gewebe im Gesäßbereich vorgesehen. Dadurch wird der Rücken gestützt und das Pflegepersonal kann nach einem Gurt zur korrekten Positionierung des Benutzers greifen.

## Reinigung und Wartung

Das Gestell, der Sitz und die Armlehnen des Dusch- und Toilettenstuhls können mit Wasser und einem herkömmlichen Reinigungsmittel gereinigt werden.

### Desinfektion

Der Sitz kann entfernt und mit Ethanol (70–85 %) oder einem chlorhaltigen Produkt mit einer Chlorkonzentration von mindestens 1000 ppm bis maximal 10000 ppm desinfiziert werden.

## Transport und Aufbewahrung

Bei Nichtgebrauch sollte der Dusch- und Toilettenstuhl mit Rädern an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen -10 °C und +40 °C aufbewahrt werden.

Der Dusch- und Toilettenstuhl mit Rädern ist (ohne Benutzer) für den Land- und/oder Lufttransport geeignet. Der Dusch- und Toilettenstuhl mit Rädern kann nicht zusammengeklappt werden, da der Rahmen fest ist.

Um z. B. Rückenverletzungen zu vermeiden, wird davon abgeraten, dass Pflegekräfte den 27 kg schweren Dusch- und Toilettenstuhl tragen.

Der Dusch- und Toilettenstuhl mit Rädern kann in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen -10 °C und +40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 20–80 % eingesetzt werden.

 Der Dusch- und Toilettenstuhl mit Rädern ist nicht zum Überfahren von Hindernissen wie Türschwellen usw. geeignet.

Der Dusch- und Toilettenstuhl mit Rädern sollte nur auf ebenem, hartem Untergrund gefahren werden, um die Gefahr des Umkippens zu vermeiden.


## Funktionelle Armlehnen

Bariatrische Menschen haben oft Schwierigkeiten, die Armlehne eines Stuhls zu greifen, wenn sie sich auf den Stuhl setzen wollen, weil sie viel Gewebe an den Armen haben.

Deshalb ist der Dusch- und Toilettenstuhl mit extra langen Armlehnen ausgestattet, die 64 cm lang sind und 7 cm über den Sitz hinausragen.

Dies erleichtert dem Benutzer beim Hinsetzen und Aufstehen mit den Händen nach den Armlehnen zu greifen, was sowohl für die Pflegekraft als auch für den Benutzer von Vorteil ist. Die Armlehnen sind abnehmbar und schwenkbar.

Wenn zusätzliche Breite benötigt wird, kann der Dusch- und Toilettenstuhl mit Butterfly-Armlehnen ausgestattet werden, die zusätzlichen Platz in der Sitzbreite bieten.

 Desinfizieren Sie den Dusch- und Toilettenstuhl mit Rädern vor jedem Benutzerwechsel. Dies ist wichtig, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

Der Dusch- und Toilettenstuhl mit Rädern kann im Waschtunnel des Krankenhauses oder des Depots gewaschen werden.

Der Dusch- und Toilettenstuhl mit Rädern kann am Rahmen hochgehoben werden, wenn er in einem motorisierten Fahrzeug transportiert werden soll.

## Langfristige Aufbewahrung

Bei langfristiger Aufbewahrung (mehr als drei Monate) sollte der Dusch- und Toilettenstuhl mit Rädern bei Temperaturen zwischen -10°C und +40 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80 % aufbewahrt werden.

# Technische Daten

Max. Benutzergewicht	325 kg
Risikoklasse	I
Basis-UDI-DI	5740000100004N2
Erwartete Lebensdauer	7 Jahre
Gesamtlänge	1170 mm
Gesamtbreite mit Standard-Armlehnen (ohne Fußstützen)	780/880 mm
Gesamtbreite mit Butterfly-Armlehnen (ohne Fußstützen)	870/970 mm
Sitzbreite mit Standardarmlehnen	610/710 mm
Sitzbreite Butterfly-Armlehne	750/850 mm
Sitztiefe	560 mm
Sitzhöhe	550 mm
Breite der Armlehne	60 mm
Breite Toilettenöffnung	Ø 240 mm, 350 mm lang
Abstand vom Boden bis zur Unterseite des Sitzes	445 mm
Abstand vom Boden bis zum Schiebebügel	1000 mm
Abstand vom Sitz bis zur Oberkante des Rückens	450 mm
Abstand vom Sitz bis zu den Fußstützen	400/420/440/460/480 mm
Gesamtgewicht des Dusch- und Toilettenstuhls mit Rädern	27 kg
Schwenkbare Armlehnen	Ja
Schwenkbare und höhenverstellbare Fußstützen	Ja
Auflage für Fußstützen	PU-Schaumstoff
Feststellbare Räder	Ja, 2 Stück
Wenderadius	1580 mm
Rahmen	Pulverbeschichteter Chrom-Molybdän-Stahl
Räder	Ø125 mm, fest
Sitz/Rückenlehne/Armlehnen	Polyurethan
IP-Schutzart	IPX4
ISO-Klassifizierung	09 12 03 21
Risikobewertung	EN/ISO 14971: 2012
Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren	EN 12182
Die Oberflächentemperatur des Dusch- und Toilettenstuhls kann steigen oder fallen, wenn er äußeren Kälte- und Wärmeeinflüssen ausgesetzt ist.	

# Bestellung, Zubehör und Ersatzteile

Modell, Zubehör und Ersatzteile	Artikelnummer
Dusch- und Toilettenstuhl mit Standard-Armlehnen, Standard-Fußstützen und Eimer, 61 cm	0150-061-000
Dusch- und Toilettenstuhl mit Standard-Armlehnen, Standard-Fußstützen und Eimer, 71 cm	0150-071-000
Dusch- und Toilettenstuhl mit Butterfly-Armlehnen, Standard-Fußstützen und Eimer, 61 cm	0151-061-000
Dusch- und Toilettenstuhl mit Butterfly-Armlehnen, Standard-Fußstützen und Eimer, 71 cm	0151-071-000
Butterfly-Armlehne rechts (bietet 7 cm zusätzliche Breite zwischen den Armlehnen)	0150-999-012R
Butterfly-Armlehne links (bietet 7 cm zusätzliche Breite zwischen den Armlehnen)	0150-999-012L
Sitz komplett mit Deckel für den Dusch- und Toilettenstuhl, 61 cm	0150-999-022
Sitz komplett mit Deckel für den Dusch- und Toilettenstuhl, 71 cm	0150-999-023
Steckbecken mit Deckel aus Kunststoff	0140-999-001
Fußstütze Standard Dusch- und Toilettenstuhl rechts	0150-999-008
Fußstütze Standard Dusch- und Toilettenstuhl links	0150-999-009
Höhenverstellbare Beinstütze für den Dusch- und Toilettenstuhl rechts.	0156-999-030
Höhenverstellbare Beinstütze für den Dusch- und Toilettenstuhl links.	0156-999-031

