



PRODUKTBLATT

Rollator King

Starker und funktionaler Rollator, der für den bariatrischen Benutzer entwickelt wurde.

Der Rollator King ist für bariatrische Benutzer mit einem Gewicht von bis zu 325 kg ausgelegt. Der Rollator kann im Außen- und Innenbereich von Einrichtungen, Pflegezentren und Privathaushalten eingesetzt werden. Erhältlich in zwei Breiten,



- Passt durch viele Türöffnungen
- Starke Konstruktion
- Auch als Ruhesessel geeignet
- Tragfähigkeit bis zu 325 kg



Einer der stärksten Rollatoren auf dem Markt

Der Rollator King hat ein funktionelles und leichtes Design. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 325 kg ist der Rollator einer der stärksten auf dem Markt.

Rollator King ist in zwei Breiten erhältlich, 61 cm und 71 cm. Die Zahl bezieht sich auf die Öffnung zum Sitz und entspricht dem Abstand zwischen den Griffen.

Beide Modelle haben eine Sitzbreite von 51 cm, eine Sitzhöhe von 51 cm und eine Sitztiefe von 37 cm.

Konstruktion

Der Rollator King ist mit einem großen gepolsterten Sitz ausgestattet, auf dem Sie sich unterwegs ausruhen können.

Die sehr robuste und langlebige Konstruktion sowie die massiven Räder mit Stahlgabeln bieten dem Benutzer große Sicherheit und Unterstützung.

Sicherheitsrückenbügel

Wenn sich der Benutzer schwer auf den Rollator setzt, sorgt der Rückenbügel dafür, dass der Benutzer richtig auf dem Ruhesitz sitzt. Dadurch

Reinigung und Wartung

Rahmen, Sitz, Griffe, und Sicherheitsrückenbügel des Rollators müssen mit Wasser und einem handelsüblichen Reinigungsmittel gereinigt werden.

Desinfektion

Der Rahmen, der Sitz, die Griffe und der Rückenbügel des Rollators können auch mit z. B. Wet Wipe 70 % oder einem chlorhaltigen Produkt mit einer Chlorkonzentration von 1000-1200 ppm

Transport mit dem Auto

Für den Transport in einem motorisierten Fahrzeug lässt sich der Rollator King leicht zusammenfallen.

1. Greifen Sie mit einer Hand an die Vorderkante des Sitzes. Halten Sie mit der anderen Hand einen der Griffe fest.

Die Gesamtbreite der beiden Modelle beträgt 13 cm mehr als der Abstand zwischen den Griffen.

Bitte beachten Sie, dass Modelle mit einer Gesamtbreite von 84 cm möglicherweise nur schwer durch bestimmte Türöffnungen passen.

Die Wahl des Modells hängt von der Körperform des Benutzers ab. Für Benutzer mit viel Fülle an Becken und Oberschenkeln empfehlen wir eine Größe von 71 cm.

Der Rollator King hat stabile Bremsen, die als Feststellbremse arretiert oder als Handbremse verwendet werden können. Die beiden Arten von Bremsen sorgen für Kontrolle und sicheres Manövrieren.

Der Rollator ist mit einem Korb und Reflektoren an den Griffen ausgestattet.

wird verhindert, dass der Benutzer nach hinten fällt, und er kann sich bequem hinsetzen.

Schrauben und Muttern müssen alle drei Monate überprüft werden. Ziehen Sie sie bei Bedarf fest.

(z. B. Wet Wipe Chlorine Desinfection) desinfiziert werden.

Der Ruhesitz und der Rückenbügel können bei einem Benutzerwechsel ausgewechselt werden.

2. Heben Sie den Sitz an und falten Sie nun den Rollator zusammen.

Soll der Rollator weniger Platz einnehmen, können Korb und Sicherheitsrückenbügel abgenommen werden.

 Der Rollator King darf nicht als Sitz in einem motorisierten Fahrzeug verwendet werden.

Technische Daten	
Benutzergewicht max.	325 kg
Gesamtlänge	850 mm
Gesamtbreite	740/840 mm
Breite zwischen den Griffen	610/710 mm
Höhenverstellbar in Stufen von 2,5 cm	770,5-990 mm
Sitzbreite	510 mm
Sitztiefe	370 mm
Öffnung zum Sitz	610/710 mm
Sitzhöhe	510 mm
Gewicht	15,7 kg
Gewicht im Korb max.	5 kg
Zusammenklappbar	Ja
Ruhesitz	Ja
Massive Räder	Ja
Rahmen	Stahl/SAE4130
Sitz- und Rückenpolster	Polyurethan
Räder	8" massiv
Erwartete Lebensdauer	7 Jahre
ISO-Klassifizierung	ISO 12 06 06 - 11
Risikoklasse	I
UDI-DI	5740000102490 (610 mm) / 5740000102506 (710 mm)
Basis-UDI	5740000100007N8
Gebrauchsanleitung und Produktblatt sind auf der Website verfügbar und können für sehbehinderte Benutzer auf eine große Schriftgröße skaliert werden.	

Modell	Öffnung zum Sitz	Gesamtbreite	Artikelnummer
Rollator King, 610 mm, inkl. Korb	610 mm	740 mm	0172-050-000
Rollator King, 710 mm, inkl. Korb	710 mm	840 mm	0172-071-000