



PRODUKTBLATT

Rollator Support

Starker und funktionaler Rollator, der für den bariatrischen Benutzer entwickelt wurde.

Der Rollator Support ist für Benutzer mit einem Gewicht von bis zu 200 kg ausgelegt.

Der Rollator kann im Außen- und Innenbereich von Einrichtungen, Pflegezentren und Privathaushalten eingesetzt werden. Erhältlich in zwei Breiten.



- Passt durch viele Türöffnungen
- Auch als Ruhesessel geeignet
- Starke Konstruktion
- Tragfähigkeit bis zu 200 kg



Der Rollator, der die Handgelenke entlastet

Der Rollator Support darf nur von mobilen Nutzern verwendet werden, die über die physischen und kognitiven Fähigkeiten verfügen, das Gehen und Bremsen sicher zu kontrollieren.

Die höhenverstellbaren Unterarmstützen helfen dem Benutzer beim aufrechten Gang und entlasten die Handgelenke.

Rollator Support ist in zwei Breiten erhältlich, 61 cm und 71 cm.

Konstruktion

Der Rollator Support ist mit einem großen gepolsterten Sitz ausgestattet, auf dem Sie sich unterwegs ausruhen können.

Die sehr robuste und langlebige Konstruktion sowie die massiven Räder mit Stahlgabeln bieten dem Benutzer große Sicherheit und Unterstützung.

Der Rollator Support hat stabile Bremsen, die als Feststellbremse arretiert oder als Handbremse verwendet werden können. Die beiden Arten von

Reinigung und Wartung

Rahmen, Sitz, Griffe, Unterarmstützen und Sicherheitsrückenbügel des Rollators müssen mit Wasser und einem handelsüblichen Reinigungsmittel gereinigt werden.

Desinfektion

Rahmen, Sitz, Griffe, Unterarmstützen und Sicherheitsrückenbügel des Rollators können auch mit z. B. Wet Wipe 70 % oder einem chlorhaltigen

Transport mit dem Auto

Für den Transport in einem motorisierten Fahrzeug lässt sich der Rollator Support leicht zusammenfallen.

Rollator King

Unser zweiter bariatrischer Rollator (King) ist ähnlich aufgebaut wie der Rollator Support.

Der Rollator King hat jedoch Griffe anstelle von Unterarmstützen.

Wenn der Benutzer stattdessen einen Rollator King benötigt, können die Unterarmstützen entfernt und durch Griffe ersetzt werden.

Die Zahl entspricht dem Abstand zwischen den Griffen.

Bitte beachten Sie, dass Modelle mit einer Gesamtbreite von 84 cm möglicherweise nur schwer durch bestimmte Türöffnungen passen.

Die Wahl des Modells hängt von der Körperform des Benutzers ab. Für Benutzer mit viel Fülle an Becken und Oberschenkeln empfehlen wir eine Größe von 71 cm.

Bremsen sorgen für Kontrolle und sicheres Manövrieren.

Der Rollator ist mit einem Korb und Reflektoren an den Griffen ausgestattet.

Sicherheitsbügel

Wenn sich der Benutzer auf den Rollator setzt, sorgt der Sicherheitsrückenbügel dafür, dass der Benutzer auf dem Ruhesitz sitzt. Dadurch wird verhindert, dass der Benutzer nach hinten fällt, und er kann sich bequem hinsetzen.

Schrauben und Muttern müssen alle drei Monate überprüft werden.

Produkt mit einer Chlorkonzentration von 1000-1200 ppm desinfiziert werden.

Der Ruhesitz und der Sicherheitsrückenbügel können bei Bedarf bei einem Benutzerwechsel ausgewechselt werden.

Soll der Rollator weniger Platz einnehmen, können Korb und Sicherheitsrückenbügel abgenommen werden. ⚠ Der Rollator Support darf nicht als Sitz in einem motorisierten Fahrzeug verwendet werden.

Kontaktieren Sie Cobi Rehab, um weitere Informationen zur Demontage von Unterarmstützen zu erhalten.



Spezifikationen, Modelle 61 cm und 71 cm	
Benutzergewicht max.	200 kg
Gesamtlänge	850 mm
Gesamtbreite	740/840 mm
Breite zwischen den Griffen	610/710 mm
Höhenverstellbar in Stufen von 2,5 cm	100 - 130 mm
Sitzbreite	510 mm
Sitztiefe	370 mm
Öffnung zum Sitz	610/710 mm
Sitzhöhe	510 mm
Gewicht	17 kg
Gewicht im Korb max.	5 kg
Zusammenklappbar	Ja
Ruhesitz	Ja
Massive Räder	Ja
Rahmen	Chrom-Molybdän-Stahl/SAE41-30
Unterarmstützen sowie Sitz- und Rückenpolster	Polyurethan
Räder	8" massiv
Erwartete Lebensdauer	7 Jahre
ISO-Klassifizierung	ISO 12 06 06 - 11
Risikoklasse	I
Basis UDI	5740000100007N8
Gebrauchsanleitung und Produktblatt sind auf der Website verfügbar und können für sehbehinderte Benutzer auf eine große Schriftgröße skaliert werden.	

Modell	Sitzbreite	Gesamtbreite	Artikelnummer
Rollator Support, 610 mm, inkl. Korb	610 mm	740 mm	0173-050-000
Rollator Support, 710 mm, inkl. Korb	710 mm	840 mm	0173-071-000
Griff, links			0170-999-010L
Griff, rechts			0170-999-010R