



Produktark

FLO2 sternumsele

Fleksibel sternumsele med stabil support.

En fleksibel sternumsele, som sikrer, at bruger trækker vejret frit uden at have følelsen af at være "spærret inde" i selen.

Materialet i selen følger brugers konturer og bidrager dermed til optimal trykfordeling. Sternumselen giver trods dens fleksibilitet stadig maksimal support.



- Individuelt justerbar sternumsele i Unisex eller kvindemodell.
- Uhørt fleksibilitet, der sikrer at vejrtrækningen ikke påvirkes af selens placering på sternum.
- Flere typer af spænde til fæste på kørestolens ramme.
- Høj genbrugsværdi, da sternumselen kan gentilpasses til ny bruger.
- Sikker og stabil positioneringsløsning.
- Flere forskellige størrelser.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Om dette produktark

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger om anvendelsen af FLO2 sternumsele. Det indeholder også visse specifikationer for FLO2 sternumsele.

Den nyeste version af dette produktark finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er det nyeste.

Hvis du har brug for et produktark, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes det i PDF-

form på cobirehab.com, som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på 7025 2522 eller på cobi@cobi.dk, hvis du ønsker flere oplysninger om FLO2 sternumsele.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

FLO2 sternumsele

Den hollandske FLO2 sternumsele er udviklet af et team af ergoterapeuter, produktdesignere og rehabiliteringsspecialister, med udgangspunkt i brugeren.

Det betyder, at sternumselen er et gennemtestet hjælpemiddel med fokus på autonomi, brugervenlighed og komfort.

FLO2 sternumsele kan justeres asymmetrisk. Det gør det muligt at imødekomme anatomiske udfordringer.

Montering af skulderstropper

Skulderremmene kan monteres på flere forskellige måder. De kan fæstes højt på kørestolens ramme ved hjælp af fixlock spænder. De kan også fæstes længere nede på kørestolens ramme med samme type spænde, hvilket giver et større pres på skuldrene.

Spænderne monteres med M5 bolte eller rørklemmer.

Hvis kørestolsrammen ikke egner sig til, at der monteres fixlock spænder og rørklemmer/M5 bolte kan skulderremmene også sikres ved hjælp af de medfølgende tri-glide spænder.

Udskiftelige dele

Stropperne på sternumselen kan udskiftes ved slitage.

Rengøring og vedligeholdelse

Sternumselen kan håndvaskes ved maks. 30°C. Brug ved behov et blød vaskemiddel for sarte stoffer. Sternumselen må ikke stryges, centrifugeres eller tørretumbles.

Desinfektion

FLO2 sternumselen kan desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

Opbevaring og transport

Når FLO2 sternumsele ikke er i brug, bør den opbevares tørt og beskyttet mod stærkt sollys ved temperaturer mellem 0°C til +45°C og ved en relativ luftfugtighed på 20 - 75%.

Ovennævnte anbefalinger for opbevaring gælder også ved opbevaringsperioder over 4 måneder.

Transport

FLO2 sternumsele er ikke et transportbælte til brug i motoriseret køretøj.

Specifikationer

Størrelse	S, M og L samt M og L i kvindemodel
Materiale	Blød polstring og nylon stykker (bånd)
Længde	30,5 - 42,5 cm
Bredde mellem spænder på ryggen	16,5 - 24 cm
Udviklet til børn	Nej
Beregnet til brug i vand	Nej
Dele af sternumselen er mellem benene	Nej
Sikret mod utilsigtet åbning	Ja
Genanvendelig	Ja
Desinficerbar	Ja
Produktets forventede levetid	2 år
Brugervejledning og produktark findes på website og kan skaleres op til stor skriftstørrelse ved synshandicap.	



Bestilling

Model	Selen længde mm	Brede mellem spænder mm	HMI-nummer	Varenummer
FLO2 sternumsele, S	305	165	139380	0355-999-002
FLO2 sternumsele, M	365	205	139383	0355-999-003
FLO2 sternumsele, L	425	240	139386	0355-999-004
FLO2 sternumsele, M (Kvinde)	365	205	139389	0355-999-005
FLO2 sternumsele, L (Kvinde)	425	235	139392	0355-999-006