



Klargøring af madras og pumpe

1. Læg topmadrasen direkte ovenpå Cobi skummadras T6. Tjek at cellerne vender opad. Fastgør madrassens stropper.
2. Tjek, at CPR-ventilen er lukket. Den sidder i venstre side i hovedenden.
3. Hæng pumpen på sengegavlen. Slut topmadrassens luftslanger til koblingen på siden af pumpen.
4. Sæt strømstikket i stikkontakten.
5. Tænd pumpen på kontakten på højre side. Tryk så på ON/OFF på frontpanelet (figur 6).
6. Autofirm knappen (figur 5) blinker, indtil det maksimale lufttryk er fundet.
7. Vent til topmadrasen er fyldt op. Læg så borger på topmadrasen.
8. Skift til VEKLENDE og tryk på SOFT og FIRM samtidig for automatisk indstilling.

Angivelsen af "kg" kan afvige fra borgers præcise vægt!

Når lampen mellem Soft- og Firm-knappen stopper med at blinke, og pumpen afgiver et kort signal, er trykket i topmadrasen indstillet.

Kontakt Cobi Rehab på 70 25 25 22 ved driftsforstyrrelser.

Lås betjening

Frontpanelet låser efter 25 sek. uden brug. Tryk 3 sek. på Lås betjening (figur 3) for at tænde.

Håndprøven

Før hånden ind mellem cellerne under borgers tungeste del, som regel bækket.

Borger skal ligge/sidde halvvejs ned i madrassen. Justér trykket i madrassen med SOFT og FIRM.

Gentag håndprøven jævnligt.



QUICK GUIDE

Cobi Cura X5 vekseltrykstopmadras og pumpe

Autofirm

Autofirm fylder topmadrasen maksimalt. Det gør pleje og forflytning nemmere. Funktionen stopper efter 20 minutter.

Vekslende - Statisk - Siddende

Tryk på Skift (figur 4) for at veksle mellem de tre funktioner.

Vekslende veksler topmadrassens lufttryk i forskellige intervaller.

Statisk bevarer topmadrassens lufttryk konstant.

Siddende øger trykket i madrassen under borgers bagdel, når bruger sidder op. Pumpen veksler fortsat.

Husk at slå funktionen **Siddende** fra, når borger lægges ned igen.

I tilfælde af hjertestop

Tøm straks topmadrasen ved at dreje CPR-ventilen i hovedenden hen på OPEN. Træk slanger ud af pumpen.

Driftsforstyrrelser

Alarmknappen på frontpanelet bipper og lyser (figur 7) ved manglende strøm eller for lavt tryk. Tjek, at luftslanger og CPR-ventilen er sat rigtigt i.

Indstilling af brugervægt

Pumpen indstiller sig automatisk til borgers behov og kroppsform. Tallet kan afvige fra borgers præcise vægt!

Tryk på Soft-knappen (figur 1), hvis der er brug for en blødere madras. Tryk på Firm-knappen (figur 2), hvis der ønskes en hårdere madras.

Rengøring

Brug vand, en ren klud og et mildt rengøringsmiddel.

Desinficer madras og pumpelede med ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 og max. 10000 ppm.

