



BRUGERVEJLEDNING

# Skummadras T6

Underliggende skummadras til fx vekseltryk topmadrassen Cobi Cura X5

Maks. brugervægt 200 kg.



Medical device

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

# Indhold

1. Sikkerhed.....	3
2. Symbolforklaring.....	4
3. Specifikationer .....	5
4. Anvendelse.....	6
5. Skummadras T6 i brug .....	6
6. Bortskaffelse.....	7
7. Garanti.....	7

# 1. Sikkerhed

---



## ADVARSEL

Skummadras T6 må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af madrassen. Ved forkert betjening kan bruger komme til skade.

Bruges Skummadras T6 til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, øges risikoen for at beskadige produktet.

Brugsanvisningen skal læses grundigt, før Skummadras T6 tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod sikkerhedsvejledninger mærket med

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af Skummadras T6.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis der er dele, som er beskadigede eller mangler. Brug aldrig egne erstatningsreservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer, der er lavet uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.



## SIKKERHEDSVEJLEDNINGER

Skummadras T6 bør desinficeres grundigt, hvis den skal bruges af en anden bruger. Det sker for at undgå krydskontamination.

Eksterne kilder til varme og kulde (fx sollys eller andre miljøfaktorer) kan have indvirken på Skummadras T6 overflade temperaturer.

Kontakt Cobi Rehab ved alle former for service og reparation.

## 2. Symbolforklaring

---

	Vær opmærksom!
	Overensstemmelseserklæring i henhold til EU's Direktiv 93/42/EØF
	Cobi varenummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Producent
	Medicinsk udstyr
	Max. brugervægt
	Læs manual
<b>Se eksempel på label herunder</b>	



### Generelt

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om målgruppen for og anvendelsen af Skummadras T6. Den indeholder også en specifikationsliste.

Den nyeste version af denne brugervejledning finder du på vores website.

Hvis du har brug for en brugervejledning skrevet med en større skriftstørrelse, findes den i PDF-form på [cobirehab.com](http://cobirehab.com), som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på telefon 7025 2522, hvis du ønsker flere oplysninger om Skummadras T6.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

Produktsikkerhedsmeddelelser og tilbagekaldelse af produkter kan ses på hjemmesiden.

### 3. Specifikationer

---

<b>Generelt</b>	
Brugervægt op til	200 kg
Beregnet op til sårkategori	1
ISO-klassifikation	18 12 18 - 25
Estimeret holdbarhed	5 år
Risikoklasse	I
Manualen findes på website, hvor den kan skaleres op ved synshandicap	
Miljøforsvarlig bortskaffelse	Aflever madrassen til genanvendelse
Eksterne kilder til varme og kulde (fx sollys eller andre miljøfaktorer) kan have indvirken på skummadrassens overflade temperaturer.	

<b>Madras</b>	
Længde	200 cm
Bredde	83/85/88/90 cm
Højde	6 cm
Vægt	3,2/3,3/3,4/3,5 kg
Anvendelig direkte på sengebund	Ja
Anvendelig til indstillelig sengebund	Ja
Materiale	Koldskum
Brandhæmmende madras	Ja

<b>Betræk</b>	
Aftageligt, allergivenligt, vask- og desinficerbart inkontinensbetræk	Ja
Betræk materiale	100% polyuretan
Brandhæmmende betræk	Ja
Betrækket overholder ROHS direktivet	Ja

## 4. Anvendelse

---

Skummadras T6 bruges som underlagsmadras til fx vekseltrykstopmadrassen Cura X5.

Skummadras T6 kan genbruges og er nem at rengøre.

### Kontraindikationer

Skummadras T6 er en underliggende madras og må ikke bruges alene som helmadrass.

### Betræk

Betrækket er aftageligt, åndbart, strækbart og anti-bakterielt behandlet på overfladen.

Betrækket er beskyttet mod væskeindtrængning og er flammehæmmende.

Betrækket kan vaskes ved 95°C og tørretumbles ved lav varme eller hænges til tørre, hvis muligt. Betrækket må ikke stryges.

## 5. Skummadras T6 i brug

---

### 5.1 Før, under og efter brug

#### Før brug

Læg Skummadras T6 på sengen. Se efter, at betrækket er lynet korrekt på skummadrassen. Placer topmadrassen ovenpå.

#### Under brug

Skummadras T6 kan vendes (fodende <-> hovedende), hvilket kan forlænge skummadrassens levetid. Madrassen kan ligeledes vendes 180 grader.

#### Opbevaring (herunder langtidsopbevaring)

Opbevares liggende fladt og uden noget andet liggende ovenpå, i temperaturer mellem 10° - 40°C.

#### Vedligeholdelse

Tjek jævnligt Skummadras T6 for skader for at sikre optimal effekt. Hvis betrækket er beskadiget, skal det skiftes med et samme.

#### Rengøring af betræk til Skummadras T6

Betrækket kan maskinvaskes på maksimum 95°C. Der må ikke anvendes blegemidler. Betrækket tåler tørretumbler, men må ikke stryges.

#### Desinfektion af betræk

Skummadras T6 kan desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm. Betrækket skal desinficeres grundigt, hvis det overgår til en ny bruger. Det sker for at undgå krydskontaminering og infektioner. Lokale rengørings- og desinfektionsprocedurer skal overholdes.

## 6. Bortskaffelse

---

Produkter, der ikke længere er i brug, skal bortskaffes på miljøforsvarlig vis.

Kontakt kommunen for vejledning om korrekt bortskaffelse.

## 7. Garanti

---

Cobi Rehab garanterer, at Skummadras T6 er fejlfri, når den leveres. Skulle der mod forventning være mangler eller skade på Skummadras T6 ved modtagelsen, kontakt da Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for Skummadras T6 er et år fra købsdato og dækker både madras og pumpe. Fakturaen gælder som garantibevis.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt
- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale
- normal vedligeholdelse fx rengøring, tilpasning, smøring og opdatering af udstyr eller dele.

Garantien omfatter ikke:  
- sliddele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at Skummadras T6 er blevet håndteret på en ureglementeret måde.

Ved skade på grund af uheldsmæssig brug, faktureres der både service og anvendte reservedele.

Garantien, beskrevet ovenover, er den eneste gældende garanti. Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlige for skader af nogen slags.

### 7.1 Uheldigt hændelse

Enhver hændelse, der er indtruffet i forbindelse med brugen af Skummadras T6, skal indberettes til Cobi Rehab.

### 7.2 Efter forventet levetid

Efter den forventede levetid er det vigtigt, at der foretages en samlet vurdering af produktet, inden fortsat brug.

Efter den forventede levetid kan Cobi Rehab ikke garantere egnethed og sikkerhed for produktet, da Cobi Rehab ikke har kontrol over, hvordan produktet er brugt og slidt.

Den samlede vurdering af produktet skal udføres af kvalificeret fagpersonel, og som et minimum skal der tages højde for, hvordan produktet er blevet brugt, produktets tilstand og dets komponenter.

Cobi Rehab kan altid foretage en sådan vurdering.



# COBI REHAB

---

**PRODUCENT OG  
FORHANDLER**

**Cobi Rehab**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
+45 7025 2522  
cobirehab.com

**Country of origin**

SPM  
Cumhuriyet Mh Orhan Alp  
Yörük  
35875 Izmir  
Tyrkiet