

Håndtering af Cobi Cura X10 vekseltryksmadras ved strømsvigt

Strømsvigt

Ved strømsvigt holder Cobi Cura X10 vekseltryksmadras luft i maksimalt 24 timer.

Madrassen kan ikke veksle trykket, mens den er uden strøm. Madrassen holder dog det tryk, som den var indstillet på, da strømmen blev afbrudt.

Bemærk, at hvis luften forsvinder helt fra de vekslede luftceller, vil den indbyggede luftfyldte madras under cellerne sikre, at borger ikke ligger direkte på sengebunden.

Husk, at madrassen skal være:


- Intakt og vedligeholdt
- Ikke for gammel.

Madrassens forventede levetid er 7 år.

Hvad skal du gøre ved strømsvigt?

Hvis strømmen afbrydes til Cobi Cura X10 madrassens pumpe på grund af strømafbrydelse eller afkobling af strøm fra kontakten, lyder der en alarmtone fra pumpen.

Alarmtonen lyder, indtil den bliver slået fra på pumpen.

Du slår alarmen fra ved at trykke på knappen med symbolet  på pumpens betjeningspanel.

Når alarmen er slået fra, skal du holde øje med, om madrassen holder trykket. Det vil sige, at der ikke siver luft ud af madras eller CPR-ventil.

Nu holder madrassen lufttrykket, indtil strømmen vender tilbage.

Vær opmærksom på, at pumpens funktioner ikke virker ved strømsvigt. Det vil sige, at repositionering og vendinger skal udføres manuelt, da vekseltryksfunktionen sættes ud af spil ved strømsvigt.

Når strømmen kommer tilbage

Når strømmen er tilbage, pumper pumpen automatisk madrassen op til det maksimale tryk. Hvis borger stadig ligger på madrassen, indstiller pumpen sig til borgers vægt og genstarter vekseltryksfunktionen.

Kontrollér dog altid, at brugervægt og indstillinger på pumpen er korrekte.

Ved driftsproblemer eller behov for hjælp til indstilling af pumpen, kan vi kontaktes på telefon 7025 2522.