



### Rengøring

Daglig rengøring kan foretages med et mildt rengøringsmiddel, vand og en ren, tør klud.

Betrækket kan maskinvaskes på 95° C. Brug ikke klor eller lignende i vasken. Betrækket kan tørres i tørretumbler ved lav varme.

Betrækket kan også desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 ppm og max. 10000 ppm.

Inkontinensbetrækket skal være helt tørt, før brugeren igen må ligge på det.

Find brugsanvisningen på [cobirehab.com](https://cobirehab.com)



Brugsanvisning  
Cobi skummadras T6

## Cobi skummadras T6

### Opsætning af madras

- 1 Læg skummadrasen direkte på sengebunden.
- 2 Læg en topmadras ovenpå. Cobi Rehab anbefaler Cobi Cura X5 vekseltryk topmadras.
- 3 Tjek, at sengens elevationsfunktion virker, efter at madrasserne er blevet lagt på.
- 4 Læg et løst lagen på topmadrasen, og læg brugeren centreret på madrassen.

