



Elektriske funktioner

Kørestolen vækkes fra "dvale" ved tryk på en tilfældig knap på fjernbetjeningen.

Fjernbetjening

Øverst på fjernbetjeningen ses batteriindikatoren. Oplad kørestolen, når batteriet blinker i det røde felt.

Kørestolen oplades, når ledningen i styreboksen tilsluttes strøm. En fuld opladning tager op til seks timer. Oplad gerne kørestolen ved modtagelsen.

Under batteriindikatoren på fjernbetjeningen findes recline funktionen. Piletasterne styrer recline funktionen fra 96°- 131°.

Af sikkerhedsmæssige årsager er recline funktionen låst. For at tage denne i brug skal "recline op" og "tilt ned" holdes ned i 10 sek. Der vil nu være et bip som bekræfter at funktion kan tages i brug. Efter at denne er inaktiv i 30 sek., låser funktion igen.

Herunder findes tilt funktionen. Sædet kan tiltes fra 0° - 45°.

Brug altid tilt og recline funktionerne forsigtigt, så hurtige ryk undgås.

Der findes to aktuatorer under sædet på Kamille Komfortkørestol; en sæde-aktuatorer og en rygaktuator.

Hvis aktuatorerne "går i stå" skal fjernbetjeningen RESETTES.

Vær opmærksom på, om begge aktuatorer kører under RESET.

Bremser


Bremserne betjenes ved hjælp af et bremsehåndtag monteret på skubbebøjlen.

Daglig rengøring af kørestolen

Kørestolens stel, sæde og armlæn rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Puderne kan fjernes og desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 ppm og max. 10000 ppm.

Fjernbetjeningen kan desinficeres med samme produkter som puderne.

 Klemningsrisiko for borger i kørestolen under justeringer.



RESET - fjernbetjening

Hold begge piletaster, markeret med rød prik, nede i 5 sekunder. Det får de to aktuatorer til at køre i bund.

Når RESET er gennemført, virker de elektriske funktioner igen.

QUICK GUIDE

Kamille Komfortkørestol

Guide til forflytning, elektriske funktioner og opladning.

Fra seng til kørestol aktiv borger

1. Fodstøtter svinges ud til siden.
2. Sædehøjde justeres til borgers behov.
3. Borger sætter sig i kørestolen.
4. Hoftevinkel justeres.
5. Fodstøtter svinges tilbage.

Fra seng til kørestol passiv borger

1. Fodstøtter svinges ud til siden.
2. Sædevinkel justeres til borgers behov.
3. Hoftevinkel justeres på fjernbetjening.
4. Tilt kørestolen godt tilbage.
5. Sving det ene armlæn tilbage.
6. Lift bruger ind fra siden.
7. Sving fodstøtter og armlæn tilbage.

Tag kørestolen i brug

Vurdér om, der er behov for ekstra fyld i pudemoduler, når bruger sidder i kørestolen.

Skubbebøjle's vinkel justeres vha. fingerskruer på højre og venstre side af skubbebøjle. Højden justeres ved brug af de to italienergreb på ryggen.

Armlæn justeres i højde og vinkel ved hjælp af fingerskruer på siderne.

Benstøtter kan indstilles i højde og position. Benstøtterne har også swing away funktion.

Fodpladen og benstøttens vinkel samt lægpladens vinkel kan justeres med værktøj.

Scan koden og få mere info om Kamille Komfortkørestol.

