



Joystick

På joysticket ses:

- en tænd- og slukknop
- en knop med et horn
- et display, som viser batterikapacitet, tidspunkt, hastighed, og kørselsprofil
- to knapper mærket med *Mode* og *Profile*
- en dobbeltknop, der styrer hastigheden.

Tryk på *Mode* for at skifte mellem kørsel og sæde- og rygjustering. Før styrepinden op eller ned for at styre tiltfunktionen.

Skub styrepinden til højre eller venstre for at skifte mellem tilt-in-space (0-45°) og kip (96-131°).

Brug tilt og recline funktionerne forsigtigt, så hurtige ryk undgås.

Der er tre kørselstyper (manøvre, indendørs og udendørs) med fem hastighedstrin til hver type.

Maks. hastighed er fem km i timen og maks. rækkevidde er ti km.

Kørestolen **skal** oplades, når batteriindikatoren rammer det røde felt.

Oplad til 100% hver dag uanset batteristatus.

Kørestolen oplader, når opladeren sluttes til bagsiden af joysticket og til strøm.

⚠ Kørestolen kan ikke køre under opladning.

⚠ Hvis batteriet aflades fuldstændigt, går det i "beskyttelsesmode" i 3 dage og kan ikke bruges i perioden.

⚠ Garantien dækker ikke, hvis batteriet ikke oplades regelmæssigt som beskrevet ovenfor.

Bremser

Bremserne er indbyggede i motoren (i hjulene). Det vil sige, når joysticket slippes, stopper kørestolen.

Daglig rengøring af kørestolen

Kørestolens stel, sæde og armlæn rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Puderne kan fjernes og desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 ppm og max. 10000 ppm.

Joysticket desinficeres på samme måde som puderne.



QUICK GUIDE

Kamille Power Komfortkørestol

Guide til forflytning, elektriske funktioner og opladning.

Fra seng til kørestol aktiv borger

1. Fodstøtter svinges ud til siden.
2. Sædehøjde justeres til borgers behov.
3. Borger sætter sig i kørestolen.
4. Hoftevinkel justeres.
5. Fodstøtter svinges tilbage.

Fra seng til kørestol passiv borger

1. Fodstøtter svinges ud til siden.
2. Sædevinkel justeres til borgers behov.
3. Hoftevinkel justeres på fjernbetjening.
4. Tilt kørestolen godt tilbage.
5. Sving det ene armlæn tilbage.
6. Lift bruger ind fra siden.
7. Sving fodstøtter og armlæn tilbage.

Tag kørestolen i brug

Vurdér om, der er behov for ekstra fyld i pudemoduler, når bruger sidder i kørestolen.

Skubbebøjleens vinkel justeres vha. fingerskruer på højre og venstre side af skubbebøjle. Højden justeres ved brug af de to italienergreb på ryggen.

Armlæn justeres i højde og vinkel ved hjælp af fingerskruer på siderne.

Benstøtter kan indstilles i højde og position. Benstøtterne har også swing away funktion.

Fodpladen og benstøttens vinkel samt lægpladens vinkel kan justeres med værktøj.

Scan koden og få mere info om Kamille Power Komfortkørestol.

(Senest opdateret 04-2024)

