



PRODUKTBLATT

Minimaxx Rollstuhl

Faltbarer und robuster manueller Rollstuhl für den bariatrischen Benutzer.

Der Minimaxx Rollstuhl ist für Benutzer mit einem Gewicht von bis zu 325 kg ausgelegt. Der Rollstuhl wird im Außen- und Innenbereich in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Einrichtungen eingesetzt.

Erhältlich in vier Sitzbreiten, 56 cm, 61 cm, 66 cm, and 71 cm.



- Starke Konstruktion
- Zusammenklappbar
- Mehrere Sitzbreiten
- Verstellbare Rückenlehne (optional)
- Scheibenbremsen (optional)
- Verschiedene Armlehnen
- Höhen- und breitenverstellbare Fußstützen
- Desinfizierbar



Verwendung

Der Minimaxx Rollstuhl wird für bariatrische Benutzer verwendet, die über die körperlichen und kognitiven Fähigkeiten verfügen, den Rollstuhl sicher zu bewegen.

Der Minimaxx Rollstuhl ist für ein Benutzergewicht von maximal 325 kg ausgerichtet. Der Rollstuhl kann im Außen- und Innenbereich von Einrichtungen, Krankenhäusern und Pflegeheimen eingesetzt werden.

Die Beinstützen des Minimaxx Rollstuhls sind mit je 100 kg belastbar.

Das Antriebsrad des Rollstuhls kann entsprechend dem Schwerpunkt des Benutzers eingestellt werden. Das Design der Schiebegriffe erleichtert dem Pflegepersonal das Manövrieren des Rollstuhls.

Allgemeines

Dieses Produktblatt enthält wichtige Informationen über die Zielgruppe und den Gebrauch des Minimaxx Rollstuhls. Das Produktblatt enthält auch eine Liste mit den Spezifikationen.

Die neueste Version dieses Produktblatts finden Sie auf unserer Website. Prüfen Sie, ob die jetzt vorliegende Version die neueste ist.

Wenn Sie ein Produktblatt in einer größeren Schriftgröße benötigen, steht Ihnen das Produktblatt im PDF-Format auf cobirehab.com zur Verfügung, bei der die Schriftgröße skalierbar ist.



Minimaxx Rollstuhl mit Sportarmlehnen.



Minimaxx Rollstuhl mit Tisch.

Der Minimaxx Rollstuhl ist in vier Sitzbreiten erhältlich: 56 cm, 61 cm, 66 cm und 71 cm.

Allen Modellen gemeinsam ist eine Sitzhöhe von 43 cm und eine Sitztiefe von 46 cm.

Die Gesamtbreite ist bei allen Modellen 14 cm größer als die Sitzbreite.

Wahl der Größe für den Benutzer

Die Wahl der Größe hängt von der Körperform des Benutzers ab.

Den Benutzer immer im Sitzen auf festem Untergrund messen. Legen Sie z. B. ein Buch oder etwas Ähnliches auf jede Seite des Benutzers, an die Stelle, wo dieser am breitesten ist. Messen Sie dann den Abstand zwischen den beiden Büchern.

Kontraindikationen

Es gibt keine Kontraindikationen für die Verwendung des Produkts.

Wenn Sie weitere Informationen über den Minimaxx Rollstuhl wünschen, können Sie sich jederzeit an Ihren Minimaxx-Rollstuhlhändler vor Ort wenden.

Cobi Rehab behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Das Sitzkissen ist nicht im Lieferumfang des Minimaxx Rollstuhls enthalten. Bitte erwerben Sie das Kissen separat. Unsere bariatrischen Rollstuhlkissen finden Sie unter „Rollstühle und Stühle“ auf unserer Website. Alternativ können Sie uns unter cobi@cobi.dk kontaktieren.

Konstruktion

Der Minimaxx-Rollstuhl wurde mit dem Ziel entwickelt, einen Rollstuhl mit hoher Tragfähigkeit und geringem Eigengewicht zu schaffen.

Der Rollstuhl wird mit der gleichen Rohrtechnologie hergestellt, die auch für MTB und Rennräder verwendet wird. Daher wiegt der Minimaxx Rollstuhl nur 9 % seiner Tragfähigkeit.

Dank der Positionierung der Vorder- und Hinterräder ist der Rollstuhl leicht manövrierbar. Die Hinterräder tragen den Großteil des Gewichts des Benutzers, was das Schieben des Rollstuhls für die Pflegekräfte erleichtert.

Die Vorderräder sind weit vorne positioniert, wodurch die Kippgefahr minimiert wird.

Die niedrige Sitzhöhe erleichtert das Ein- und Aussteigen sowie das Fortbewegen des Rollstuhls.

Die höhenverstellbaren Schiebegriffe sind so konzipiert, dass das Pflegepersonal den Rollstuhl mit geringem Kraftaufwand leicht drehen und schieben kann. Die gepolsterten Griffe sind abgewinkelt, um den Druck auf Handgelenke und Schultern zu minimieren.

Faltmechanismus

Der Minimaxx Rollstuhl ist leicht zu falten und zu transportieren. Der Faltmechanismus lässt sich leicht aktivieren und bietet eine gute Unterstützung für den Sitz. Die Konstruktion des Faltmechanismus macht den Rollstuhl im ausgeklappten Zustand sehr stabil.

Scheibenbremsen

Der Minimaxx Rollstuhl ist auch mit Scheibenbremsen erhältlich, sodass zum Bremsen nur ein geringer Kraftaufwand erforderlich ist. Die Scheibenbremsen wurden mit einer Feststellbremse ergänzt, und der Rollstuhl ist serienmäßig mit Radfeststellern ausgestattet.

Armlehnen

Extra lange Armlehnen erleichtern das Ein- und Aussteigen.

Zusätzlich zu den abnehmbaren Standardarmlehnen kann Minimaxx auch mit Sportarmlehnen ausgestattet werden. Diese sind hilfreich bei Transfers und Aktivitäten an einem Tisch, weil der Rollstuhl weiter unter den Tisch geschoben werden kann.

Fußstützen

Die Fußstützen können jeweils bis zu 100 kg tragen und sind in Höhe und Breite verstellbar, sodass sie individuell an den Benutzer angepasst werden können. Zusätzlich zu den mitgelieferten Standard-Fußstützen können Amputationsbeinstützen (rechts und links) erworben werden.

Rückenmodul

Minimaxx hat zwei Arten von Rückenlehnen: Ein nicht verstellbares Standard-Rückenmodul und eine verstellbare Rückenlehne, die mit Klettverschluss-Trägern verstellt wird.

Die einstellbare Rückenlehne bietet unter anderem Benutzern mit großem Gesäß eine gute Lendenwirbelstütze.

Sitzkissen

Der Minimaxx Rollstuhl wird ohne Sitzkissen geliefert. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, wenn Sie ein Sitzkissen für den Benutzer benötigen.

Reinigung und Desinfektion

Der Rahmen, der Sitz, die Schiebegriffe und die einstellbare Rückenlehne des Rollstuhls müssen mit Wasser und einem herkömmlichen Reinigungsmittel gereinigt werden.

Desinfektion

Der Rahmen, der Sitz, die Schiebegriffe und die einstellbare Rückenlehne des Rollstuhls können auch mit z. B. Wet Wipe 70% oder einem chorhaltigen Produkt mit einer Chlorkonzentration von mindestens 1000 bis maximal 1200 ppm desinfiziert werden.



Minimaxx Rollstuhl mit Amputationsbeinstützen.

Aufbewahrung und Transport

Bei Nichtgebrauch sollte der Minimaxx Rollstuhl an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen -10 °C und +50 °C aufbewahrt werden. Decken Sie den Rollstuhl bei langfristiger Lagerung zusätzlich mit einer dunklen Decke oder Ähnlichem ab.

Transport

Der Minimaxx Rollstuhl ist (ohne Benutzer) für den Land- und/oder Lufttransport geeignet. Der Rollstuhl kann am Rahmen hochgehoben werden, wenn er ohne den darin- sitzenden Benutzer in einem Fahrzeug transportiert werden soll.

Der Minimaxx Rollstuhl kann zusammengeklappt werden, da er keinen festen Rahmen hat.

Er darf **nicht** angegurtet und als Beifahrersitz in einem motorisierten Fahrzeug verwendet werden.



Minimaxx Rollstuhl mit Scheibenbremsen.

Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	325 kg
Gesamtbreite	800 / 850 / 900 / 950 mm
Gesamtbreite gefaltet (eingeklappt)	410 mm
Gesamthöhe mit/ohne Schiebegriff	1100 / 1003 mm
Gesamtlänge ohne Beinstützen	700 mm
Sitzbreite	560 / 610 / 660 / 710 mm
Sitzhöhe	430 mm
Rückenhöhe	510 mm
Gewicht	27 kg
Armlehnen abnehmbar	Ja
Beinstützen und Schiebegriffe höhenverstellbar	Ja
Feuerhemmender Bezug	Ja
Antriebsrad mit Schnellspanner	24", massiv
Einstellbarer Balancepunkt	Ja
Fester Sitz	Ja
Schwungrad	125 mm Nylon/PU
Rahmen	Pulverbeschichteter Chrom-Molybdän-Stahl
Sitz/Rückenlehne	Polyester
Armlehne	Polyurethan
Fußstützen	PU-Schaum
Erwartete Lebensdauer	7 Jahre
ISO-Klassifizierung	12 22 03 08
Risikoklasse	I
Basis-UDI	5740000100001MU
Die Oberflächentemperatur des Minimaxx Rollstuhls kann steigen oder fallen, wenn der Rollstuhl äußeren Kälte- und Wärmeeinflüssen ausgesetzt ist.	

Bestellung, Zubehör und Ersatzteile

Modell/Sitzbreite/Sitztiefe	Artikelnummer
Minimaxx Standard, inkl. Fußstützen /56 cm/ 46 cm	0100-056-000
Minimaxx Standard, inkl. Fußstützen /61 cm/ 46 cm	0100-061-000
Minimaxx Standard, inkl. Fußstützen /66 cm/ 46 cm	0100-066-000
Minimaxx Standard, inkl. Fußstützen /71 cm/ 46 cm	0100-071-000
Minimaxx mit Scheibenbremsen, inklusive Fußstützen /56 cm/ 46 cm	0109-056-000
Minimaxx mit Scheibenbremsen, inklusive Fußstützen /61 cm/ 46 cm	0109-061-000
Minimaxx mit Scheibenbremsen, inklusive Fußstützen /66 cm/ 46 cm	0109-066-000
Minimaxx mit Scheibenbremsen, inklusive Fußstützen /71 cm/ 46 cm	0109-071-000
Zubehör	
Sportarmlehnen, Set	0100-999-006
Tisch universal	0100-999-001
Sauerstoffflasche Ø10 cm	0100-999-021 O2
Infusionsständer	0180-999-007
Sportarmlehnen, Set	0100-999-022
Amputationsbeinstützen	0100-999-016
Ersatzteile	
Fußstütze Standard, rechts	0100-999-010
Fußstütze Standard, links	0100-999-011
<p>Das Sitzkissen ist nicht im Lieferumfang des Minimaxx Rollstuhls enthalten. Bitte erwerben Sie das Kissen separat.</p> <p>Unsere bariatrischen Rollstuhlkissen finden Sie unter „Rollstühle und Stühle“ auf unserer Website. Alternativ können Sie uns unter cobi@cobi.dk kontaktieren.</p>	



COBI REHAB



HERSTELLER UND HÄNDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Dänemark
+45 7025 2522