

Invacare® Soft Tilt




GENERELT INFORMATION

Tænd og sluk



Genstart system (flad liggeflade)

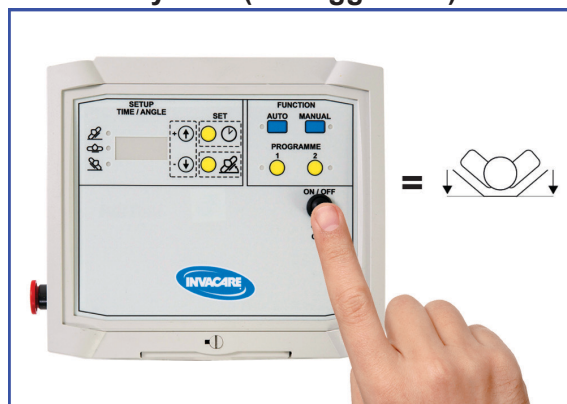


Nødstopknap



MANUEL BRUG - AKTIV ANVENDELSE

Anvendes i pleje- og forflytningssituationer. Vinkling 0-80 grader.

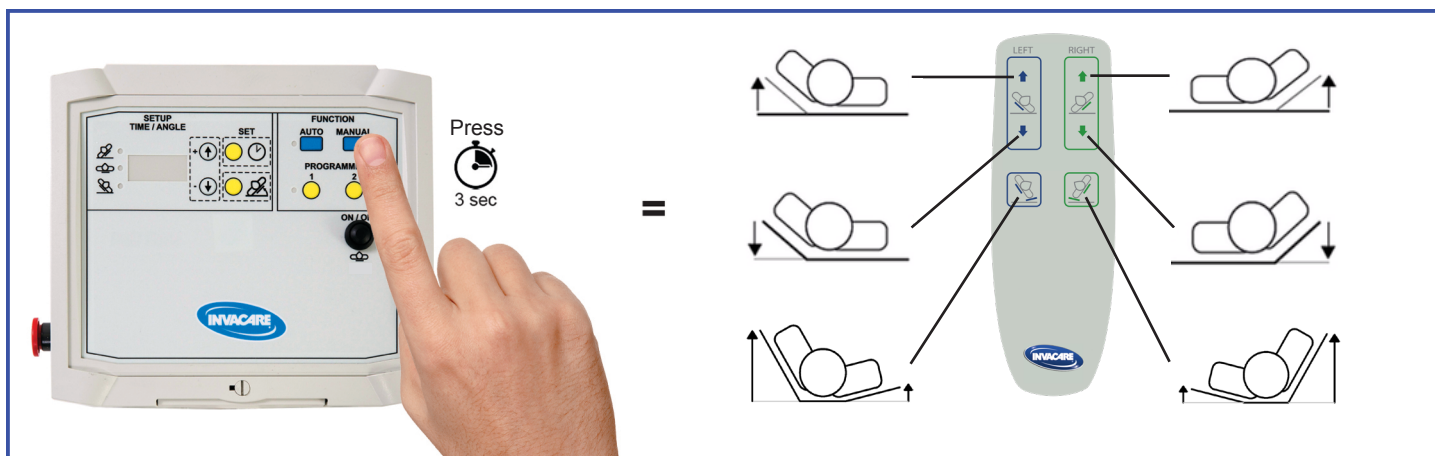


AUTOMATISK BRUG - FABRIKSINDSTILLING




OBS!

Denne funktion bør alene anvendes kortvarigt ind til P1 og/eller P2 er programmeret til individuel repositionering. Samme procedure for aktivering af P1 og P2 som Auto. Vinkling 0-40 grader.

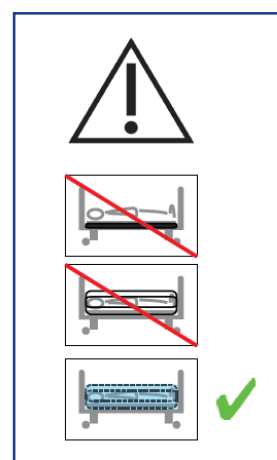

PAUSE ET AUTOMATISK PROGRAM

Hvis P1, P2 eller Auto er aktiveret er det muligt at sætte programmet på pause og derved aktivere brug af håndbetjeningen som i manuel mode. Denne funktion anbefales hvis det automatiske program skal fortsætte efterfølgende.

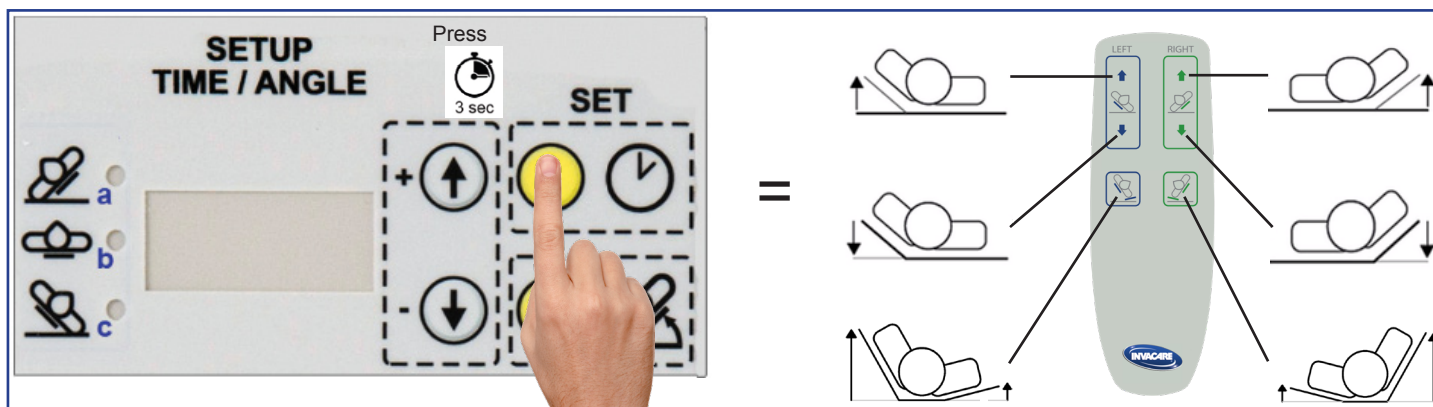


OBS!

Det før-aktiverede automatiske program vil genoptage efter 20 minutters inaktivitet.

GENOPTAG DET AUTOMATISKE PROGRAM FØR PAUSEN.

Det automatiske program før pausen er mulig at aktivere med det samme. Herefter kan håndbetjeningen ikke længere bruges.

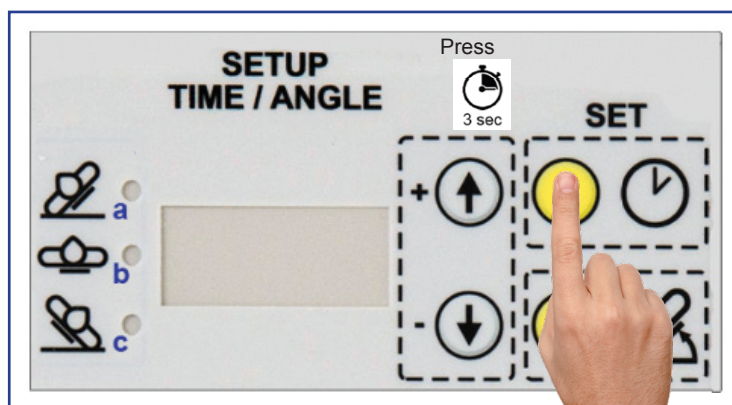

IVCMA755220519 / 2019-05-22



GDV Technology A/S
Værkstedsgården 15, st. th.
2620 Albertslund
Denmark



Yes you can®.