



COBI REHAB®
The Positioning Company

PRÆSENTATION

Cobi Cruise 2.0 bariatrisk komfort kørestol

Første og eneste bariatriske komfort kørestol på markedet som ved hjælp af unikke og gennemtænkte principper kan tilpasses alle kropsformer. Den stærkeste kørestol på markedet til bariatrisk rehabilitering.



OP TIL 325 KG

- Findes i to udgaver, en manuel og en elektrisk udgave.
- Bruges i alle faser af rehabiliteringen, fra den sengeliggende bruger til den mobile bruger.
- Elektrisk tilt og recline.
- Passer til de fleste døråbninger. Det betyder stor grad af frihed og mobilitet for bruger.
- Armlæn, der kan vinkles og skubbes væk ved fx forflytninger.
- Desinficerbar og vaskbar i vaskehal på fx depot eller hospital.

En del af Cobi Rehabs bariatriserie.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Cobi Cruise komfort kørestol

Cobi Cruise er udviklet i tæt samarbejde mellem danske ingeniører, ergoterapeuter og bariatriske brugere. Cobi Cruise er blandt andet testet i Praksis- og Innovationshuset på Københavns Professionshøjskole. Kørestolen er produceret i EU.

Cobi Cruise betyder frihed. Frihed til at komme rundt og til at komme videre, fra sengeliggende til selvstændig bruger.

Cobi Cruise er designet, så den matcher den bariatriske brugers daglige rutiner.

Et utal af justeringsmuligheder og funktioner gør kørestolen til det foretrukne hjælpemiddel i både den tidlige rehabiliteringsfase og i den sene, hvor bruger er mere selvhjulpne og kan gøre brug af den frihed, som Cobi Cruise bidrager til.

Funktioner som kombineret skubbebøjle og håndtag, elektrisk tilt og recline reducerer risikoen for overbelastning hos plejepersonalet.

Cobi Cruise er testet op til 500 kg.

Bred indvendig og smal udvendig

Med en totalbredde på under 80 cm (modeller med en sædebredde på 50-65 cm) kan Cobi Cruise komme igennem de fleste standarddøre i private hjem eller på afdelinger.



24 tommer drivhjul gør den manuelle udgave af Cobi Cruise retningsstabil og nemmere at manøvrere rundt for plejepersonale eller den selvstændige bruger.



Æbleformet eller pæreformet bruger? Et innovativt sele- og pudesystem på ryggen gør det nemt at indstille ryggen til begge kropstyper med drejeknapper, helt uden brug af værktøj.

Det betyder en uhørt grad af mobilitet og mulighed for socialt liv for brugeren og nem transport fra en afdeling til en anden for plejepersonalet.



Den elektriske udgave af Cobi Cruise er udstyret med 12,5 tommer hjul og et joystick, som kan betjenes af både bruger og plejepersonale. Den maksimale hastighed er 7,5 km i timen.

Cobi Cruise komfort kørestol

- Beregnet til brugere op til 325 kg.
- Bruges på hospitaler, institutioner, plejecentre og i private hjem.
- Kan tilpasses præcis til den enkeltes brugers behov.
- Justerbare armlæn gør Cobi Cruise velegnet som spisebordsstol eller kontorstol.
- Designet til at reducere risikoen for overbelastningsskader hos plejepersonale.
- Cobi Cruise manuel udgave er testet i overensstemmelse med EN 12183:2014.
- Cobi Cruise elektrisk udgave er testet i overensstemmelse med EN 12184:2014.
- Maks. distance på fuldt opladet batteri er ca. 15,71 km i overensstemmelse med ISO-7176-4 2008.

Cobi Cruise benstøtter

- Benstøtter, der kan hæves.
- Benstøtter, der kan svinges ud til siden.
- Benstøtter med en maksimum vægtpå kapacitet på 150 kg hver.
- Polstrede ben- og fodstøtter for brugere uden fodtøj.
- Benstøtter tilkøbes. Ej standard tilbehør.

Cobi Cruise armlæn

- Ekstra lange armlæn (længde 61,5 cm) sikrer stabilitet og et godt greb, når bruger forflytter sig fra stående til en siddende position eller omvendt.
- Armlæne kan svinges ud til siden. Det gør forflytning af bruger fra fx stol til seng nemmere.
- Armlæne er polstret for mere komfort.
- Hvert armlæn tåler en maksimum belastning på op til 200 kg.
- Armlæne er "skålformede", hvilket reducerer risikoen for tryksår.

For mere information om bariatriske produkter, bariatrisk rehabilitering eller måltagning af bariatriske brugere, kontakt Cobi Rehab på cobi@cobi.dk eller på +45 7025 2522.



Negativ tilt hjælper den selvstændige bruger med at komme sikkert ind og ud af kørestolen. Funktionen negativ tilt aktiveres med joystick.



Recline gør det muligt for den æbleformede bruger at sidde støttet og komfortabelt. Funktionen recline aktiveres med joystick.

Specifikationer

Vægtpacitet	325 kg
Sædedybde	480-600 mm, i 30 mm intervaller
Rygvinkel	90°- 120°, trinløst
Højde fra sædets bagkant til gulv (højden uden pude er plus 100 mm)	337-511 mm, trinløst
Ryglænsenhøjde	613 mm
Maks. længde ekskl. fodstøtter, inkl. fodstøtter	ca. 1246 mm ca. 1773 mm
Min. længde ekskl. fodstøtter, Inkl. fodstøtter	ca. 987 mm ca. 1054 mm
Sædebredde	550-800 mm, i 50 mm intervaller. 100 mm mellem 700 and 800 mm
Maks. bredde	700-950 mm
Maks. højde	1115 mm
Maks. vægt af kørestol	100-120 kg
Stabilitet op ad bakke	Maks. 15°
Massive hjul	PU Massive
Rammerør (materiale)	S355 højstyrkestål
Sædepolstring	CMHR 50250 (base), Visco 45060 (kerne), CMHR 4038 (top)
Rygpude (materiale)	CM 2740 (base), Cut latex og EPS-kugler (fronten)
Puder og polstring	Flammehæmmende
Skubbebøjle	S355 Højstyrkestål
Hjulgafler	Aluminium
Fodstøtterør	Stål
Fodplade	S355 højstyrkestål
Risikoklasse	I
UDI DI	TBA
Basic UDI	TBA
Forventet holdbarhed	10 eller mere