



COBI REHAB
The Positioning Company

Elektriske funktioner

Kørestolen vækkes af "dvale" ved tryk på en tilfældig knap på fjernbetjeningen.

Fjernbetjening

Øverst på fjernbetjeningen ses batteriindikatoren. Oplad kørestolen, når batteriet blinker i det røde felt.

Kørestolen oplades, når ledningen i styreboksen sættes til strøm. En fuld opladning tager op til seks timer. Oplad gerne kørestolen ved modtagelsen.

Under batteriindikatoren på fjernbetjeningen findes recline funktionen. Piletasterne styrer recline funktionen fra 90°- 120°.

Herunder findes tilt funktionen. Sædet kan tiltes fra -4° - 13°.

Brug altid tilt og recline funktionerne forsigtigt, så hurtige ryk undgås.

Aktuator

Der findes tre aktuatorer under sædet på Cobi Cruise. To sæde-aktuatorer og en rygaktuator.

De to sædeaktuatorer styrer tilt funktionen.

Rygaktuatoren styrer recline funktionen.

Hvis aktuatorerne "går i stå" skal fjernbetjeningen RESETTES. Vær opmærksom på, om alle tre aktuatorer kører under RESET.

Bremser

Cobi Cruise har to håndbremsere placeret på hver side af stellet. De kan betjenes af både bruger og plejepersonale.

Skivebremserne betjenes ved hjælp af et bremsehåndtag monteret på skubbebøjlen.

Daglig rengøring af kørestolen

Kørestolens stel, sæde og armlæn rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Sædet kan fjernes og desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 ppm og max. 10000 ppm.

Fjernbetjeningen desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 ppm og max. 10000 ppm.

 Vær altid opmærksom på, ikke at klemme brugers væv, fingre og fødder ved justering.



RESET - fjernbetjening

Hold begge piletaster, markeret med rød prik, nede i 5 sekunder. Det får de tre aktuatorer til at køre i bund.

Når RESET er gennemført, virker de elektriske funktioner igen.

QUICK GUIDE

Cobi Cruise bariatrisk komfortkørestol

Guide til forflytning, elektriske funktioner og opladning.

Fra seng til kørestol aktiv bruger

1. Fodstøtter svinges ud til siden.
2. Sædehøjde justeres til brugers behov.
3. Bruger sætter sig i kørestolen.
4. Hoftevinkel justeres af bruger.
5. Fodstøtter svinges tilbage.

Fra seng til kørestol passiv bruger

1. Fodstøtter svinges ud til siden.
2. Sædevinkel justeres til brugers behov.
3. Hoftevinkel justeres på fjernbetjening.
4. Tilt kørestolen godt tilbage.
5. Sving det ene armlæn tilbage.
6. Lift bruger ind fra siden.
7. Sving fodstøtter og armlæn tilbage.

Tag kørestolen i brug

Vurdér om, der er behov for ekstra fyld i de ni rygmoduler, når bruger sidder i kørestolen.

Rygmodulerne finjusteres vha. FitGo drejeknap-systemet placeret på rygpladerne.

Drejeknappen aktiveres, når den trykkes ind. Skal knappen løsnes, trækkes den ud, så snoretrækket frigives.

Flere justeringsmuligheder

Skubbebøjlen justeres vha. af et klikssystem.

Benstøtter kan indstilles i højde og position. Benstøtterne har også swing away funktion.

Fodpladen og benstøttens vinkel samt lægpladens vinkel kan justeres uden værktøj. Andre justeringer foretages med værktøj.



Scan QR-koden og find al information om Cobi Cruise komfort kørestol.