

Brugervejledning til alle Spex-Hovedstøtter (produktkoden begynder med '1274')

Revision: Headrest_20250618_DA_v1



spex

Hovedstøtte

Installations- og brugervejledning

EU	REP
BEO MedConsulting Berlin GmbH Helmholtzstr. 2 D-10587 Berlin, Tyskland Tel: +49-30-318045-30	

Spex Ltd
Telefon +64 3 307 9790
solutions@spexseating.com
spexseating.com

VIGTIG KUNDEINFORMATION:

Denne manual indeholder vigtige instruktioner, der skal gives til brugeren af produktet. Fjern ikke denne brugermanual før levering til slutbrugeren.

LEVERANDØR: Denne manual skal gives til brugeren af produktet.

BRUGER/PLEJEPERSON: Læs venligst hele denne manual før brug, og gem den til senere brug. Afsnittet om transportsikkerhed SKAL læses, før ryglænet bruges i et køretøj.

MD: Dette produkt er medicinsk udstyr i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745 (MDR).


Brugernavn

Serienummer



Indhold

Introduktion	2	Justering af horisontale, laterale og vinklede positioner	7
Tilsigtet brug, kontraindikationer		Betjening af Flip-back (hvis monteret)	7
Sikkerhedsinstruktioner, vægtpacitet	3	Justerbare sidevinger (hvis monteret)	8
Miljø, Kompatibilitet, advarsler	4	Vedligeholdelse	9
Hovedstøtte Indhold	5	Transitsikkerhed - montering, brug,	
Genudstedelse til en anden bruger	5	vedligeholdelse og begrænsninger	10
Bortskaffelse og genbrug	5	Sikkerhed i trafikken - korrekt placering	
Installation af monteringsblok	6	af sikkerhedsseler	11
Fastgør pude til mekanisme	6	Advarsler	12
Justering af højde på spindel	6	Garanti	15

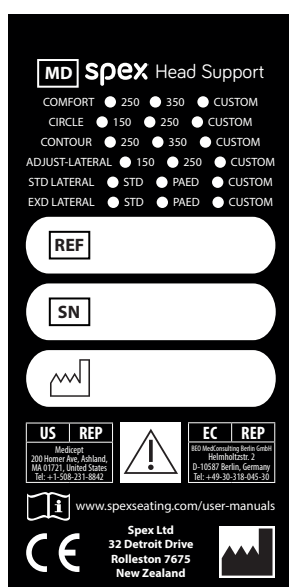

Symboler for medicinsk udstyr (EU) 2017/745 (MDR) og ISO 15223-1

	Advarsel, se vedhæftede dokumenter	US REP	Autoriseret repræsentant i det amerikanske samfund
	Katalognummer	EU REP	Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab
	Serienummer		Vaskemaskinens temperatur
	Fremstillingsdato		Må ikke falme
	Fabrikant		Tørretumbles ved lav temperatur
	Overensstemmelseserklæring, forordning om medicinsk udstyr, EU 2017/745		Må ikke stryges
	Medicinsk udstyr indsat in vitro-diagnostik		Må ikke renses

Indledning

Spex Hovedstøtte er en modulær og justerbar støtte til hovedet. Bemærk: Kontroller, at alle dele er fri for transportskader. Kontakt Spex eller din leverandør for yderligere instruktioner, hvis det er nødvendigt. Spex anbefaler, at en fagperson som f.eks. en ergoterapeut eller fysioterapeut, der har kompetence inden for tilpasning af kørestolssæder og -positionering, konsulteres for at afgøre, om Spex-hovedstøtte er egnet til brugeren.

Denne brugermanual indeholder vigtige oplysninger om brugen af dette Spex-produkt og målgruppen. Den indeholder også specifikationer. Den seneste version af denne brugermanual er tilgængelig på vores hjemmeside. Kontroller venligst, om den version, du læser, er den seneste. Hvis du har brug for en brugermanual skrevet i en større skriftstørrelse, er produktarket tilgængeligt i PDF-format på spexseating.com, som kan skaleres op til den ønskede skriftstørrelse.

Tilsigtet anvendelse

Spex Seating er beregnet til mennesker med handicap (fysisk eller psykisk), der har brug for specifik støtte til kropsholdning og kroppens funktion i siddende stilling i kørestole under daglige aktiviteter og til transport i køretøjer. Den er designet med ergonomiske justeringer for at give forbedrede personaliserede kroppsstillinger og/eller hjælpe med at forebygge/reducere fysiske problemer forbundet med stillesiddende arbejde eller aktiviteter.

Kontraindikationer

1. Brug af Spex-kørestolssædeprodukter kan påvirke tyngdepunktet og få kørestolen til at tippe, hvilket potentielt kan forårsage skade. Vurder altid behovet for, at der føjes anti-vippebeslag eller amputationsaksel-adapterbeslag til kørestolen for at øge stabiliteten.
2. Tjek jævnligt for rødme i huden, og at der ikke udvikles tryksår. Hvis din hud udvikler rødme, skal du stoppe med at bruge produktet og kontakte din læge eller behandler.

Sikkerhedsinstruktioner

For at undgå personskade skal du læse, forstå og følge alle instruktioner og advarsler i denne vejledning, før du installerer og bruger Spex-hovedstøtten. Der er farer forbundet med brugen af kørestole og adaptivt udstyr. Hvis du bruger din kørestol eller din hovedstøtte forkert, kan du komme alvorligt til skade. Hvis din hovedstøtte holder op med at fungere efter hensigten, skal du kontakte din autoriserede leverandør af Spex-sædesystem øjeblikkeligt, før du fortsætter brugen af hovedstøtten. Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med dette produkt, skal rapporteres til Spex Ltd.

Spex-hovedstøtte opfylder kravene i ISO 7176-16; kørestole – modstandsdygtighed over for antændelse af posturale støtteanordninger. Betrækket og skummet opfylder brændbarhedskravene i California Technical Bulletin 117. I sjældne tilfælde kan de stoffer, der bruges i dette produkt, forårsage hudirritation for personer med følsom hud. Kontakt din læge, hvis du oplever rødmen eller kløe i huden.

Ansvarsfraskrivelse: *Spex påtager sig intet ansvar for de terapeutiske virkninger af vores produkter. Vores krav er begrænset til produktets evne til at give sikker og pålidelig positionering og siddeplads på det udstyr, det er installeret på.*

I tilfælde af alvorlige hændelser med denne enhed skal brugere og/eller patienter etableret i EU rapportere hændelsen til producenten, Spex Ltd (solutions@spexseating.com), og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret. Informer også din lokale distributør, hvis oplysninger findes på bagsiden af denne brugermanual.

Viktkapacitet

- Stylo 130 maksimal brugervægt: 300 lbs. (136 kg)
- Stylo 160/260 maksimal brugervægt: 660 lbs. (300 kg)



ADVARSEL

Overskrid aldrig hovedstøttens, rygstøttens eller kørestolens vægtpapacitet som angivet af kørestolsproducenten. Udfør aldrig motionsvægttræning, der får brugeren til at overskride kørestolens vægtpapacitet.

Miljø

Fugt: Hold hele tiden din hovedstøtte tør, da kontakt med vand eller overskydende fugt kan forårsage korrosion, forringelse af funktionaliteten af din hovedstøtte eller potentiel fejl. Hvis din hovedstøtte bliver fugtig eller våd, skal du tørre grundigt af med en tør klud så hurtigt som muligt. Brug ikke din hovedstøtte i et brusebad eller poolanlæg.

Temperatur: Din hovedstøtte fungerer muligvis ikke efter hensigten, når den bruges ved ekstreme temperaturer. Hold hovedstøtten væk fra kilder med ekstrem varme eller ekstrem kulde for at undgå forbrændinger fra metalkomponenterne.

Snavs: Små partikler som støv, snavs og sand kan begrænse den optimale funktionalitet. Tjek jævnligt din hovedstøtte for at sikre, at der ikke er ophobninger omkring åbninger og bevægelige dele.

Kompatibilitet

- Spex hovedstøtte kan monteres på andre kørestolsryglæn, hvilket sikrer, at der er en stærk og stiv monteringsflade, som muliggør effektiv installation og løbende brug.
- Spex hovedstøtte er testet og certificeret til Spex-mærket og er muligvis ikke egnet til montering på andre mærker af kørestolssæder.
- Spex hovedstøtte må ikke bruges på en anden måde end det, de er designet til.
- Hvis Spex hovedstøtte-udstyr monteres på en hovedstøttepude af et andet mærke, der ikke er fremstillet af Spex, anses denne konfiguration for ikke at være testet og certificeret, hvorved den ordinerende læge/køber påtager sig det fulde ansvar for resultatet.



ADVARSLER

RISIKO FOR ULYKKE, SKADE, SMERTE ELLER DØD, HVIS ADVARSLER IKKE OVERHOLDES

Søg hjælp, hvis du er usikker på nogen af følgende punkter

1. Udstyr leveres adskilt og med løst monterede beslag. Det er installatørens ansvar at sikre, at alt udstyr er installeret korrekt og strammet, før kørestolen tages i brug.
2. Installation og justering af din Spex hovedstøtte må kun udføres af
 - a) En autoriseret Spex-distributør eller -tekniker
 - b) En kvalificeret sundhedsfaglig person, der har gennemgået en passende biomekanisk uddannelse
3. Hovedstøtten må ikke modificeres eller ændres, da dette gør garantien ugyldig.
4. Brug kun originalt Spex-tilbehør, -komponenter og udstyr.
5. Løft aldrig kørestolen i hovedstøtten.
6. Brug aldrig din hovedstøtte, hvis en del af udstyret mangler, fungerer forkert eller er i stykker. Søg kvalificeret hjælp til eventuelle reparationer, udskiftninger eller justeringer.
7. En dårligt tilpasset hovedstøtte kan forværre holdningsproblemer og den generelle sikkerhed for brugeren.
8. Brugeren må ikke bruge for stor kraft mod hovedstøtten.
9. Fastgør ikke hovedstøtten til rygstøtten mere end 2" (5cm) over rygstøttens øverste fastgørelsespunkter på kørestolen. Hvis hovedstøtten er monteret for højt over rygstøttens øverste fastgørelsespunkt til kørestolens ramme, vil rygstøttens levetid blive kraftigt reduceret.
10. Sørg for, at alle skruer er spændt godt fast, før brugeren sættes i kørestolssædet.


11. Hovedstøtten skal placeres tæt bag brugerens hoved for at mindske risikoen for skader fra piskesmæld i tilfælde af en ulykke.
12. Der skal udvises forsigtighed, når der foretages en brugeroverførsel fra sædesystemet. Brugeren kan falde ud af kørestolen eller komme til skade, når støtterne fjernes.
13. Vær opmærksom på faldgruber og farlige steder. Sørg for, at alle kropsdele holdes fri under disse bevægelser og justeringer.
14. Brug aldrig hovedstøtten uden dens betræk. Udvis forsigtighed i nærheden af åben ild eller tændte cigaretter. Brug af hovedstøtten uden dens betræk øger risikoen for antændelighed og hudskader.

Hovedstøttens indhold

Din hovedstøtte indeholder følgende:

	Beskrivelse	Mængde
A	Hovedstøttepude	1
B	Svingbar kugle + fastgørelseselementer	1
C	Positioneringsmekanisme	1

	Beskrivelse	Mængde
D	Stamme	1
E	Drop stopper	1
F	Monteringsblok	1
G	Fastgørelseselementer	2

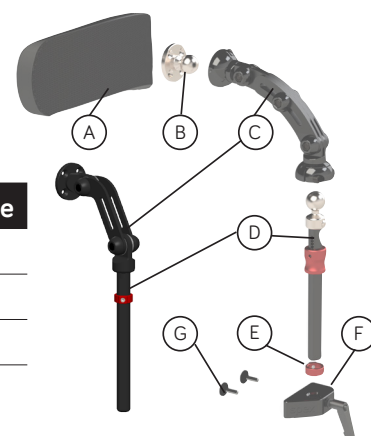

Genudstedelse til en anden bruger

Når brugeren er færdig med at bruge Spex-hovedstøtte, skal den renoveres og rengøres grundigt, hvis den udleveres til en anden bruger. Nedenfor er de strenge retningslinjer for renovering af Spex-hovedstøtte. Spex påtager sig intet ansvar for kontaminering, krydsinfektion eller skade. Spex anbefaler at bruge brintoverilte desinfektionsservietter. Desinfektionsproduktet skal bruges i henhold til producentens anvisninger. Spex påtager sig intet ansvar for effektiviteten af desinfektionsprocessen.

Del	Procedure
Sikkerhedstjek	Alle komponenter skal kontrolleres for tegn på tryk eller revner.
Betræk	Betrækket skal udskiftes uanset tilstand.
Udstyr og komponenter	Sørg for, at mekanismens komponenter er på plads og fungerer sikkert. Hvis der mangler nogle, skal de bestilles. Tjek for tegn på tryk eller revner. Hvis der konstateres tryk/revner, skal hovedstøtten tages ud af brug og skal bortskaffes. Rengør udstyr og komponenter med et mildt rengøringsmiddel og et kvalitetsdesinfektionsmiddel, og sørg for, at alle områder er fri for snavs.
Skum	Skumpuden skal udskiftes uanset tilstand.

Bortskaffelse og genanvendelse


Dit Spex-sædesystem er fremstillet af en række forskellige materialer, hvoraf de fleste kan genbruges. Når det når slutningen af dets levetid, hvis du er den juridiske ejer, skal du ikke bortskaffe det som almindeligt husholdningsaffald, men aflevere dit Spex-system til et godkendt genbrugs- eller indsamlingssted for at bortskaffe det i henhold til lokale love og regler. Separat opsamling og genbrug af Spex-systemet ved bortskaffelse sikrer beskyttelse af miljøet og hjælper med bevarelse af naturressourcer.

Installation af monteringsblok



4 mm sekskantnøgle

1. Skru monteringsblokken direkte fast på rygstøtten med M6 x 25 mm-skruerne og skiverne. Brug en 4 mm sekskantnøgle til at spænde skrue.

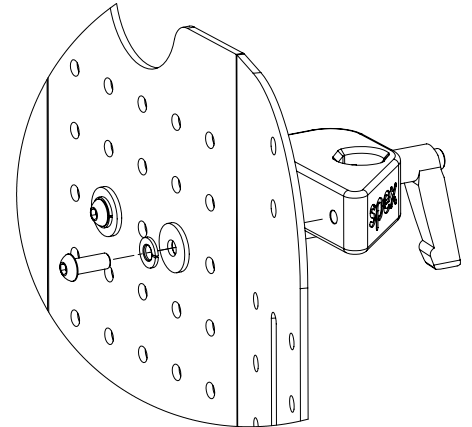


Fastgør stiftet til nakkestøtten



3 mm sekskantnøgle

1. Skru stiftet direkte på nakkestøtten med M5 x 10 mm-skruerne, og spænd derefter skrueerne godt fast med en 3 mm sekskantnøgle.

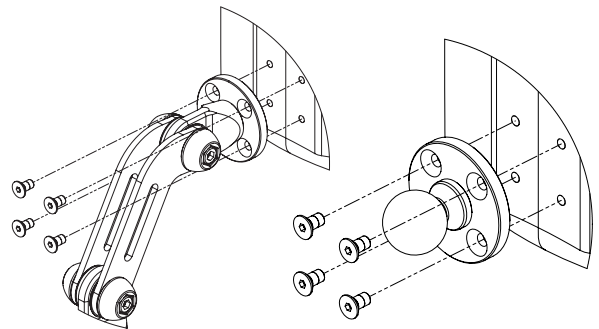


Fastgørelse af kugle til mekanisme




5 mm sekskantnøgle

1. Løsn begge bolte i den øverste klemme, så kuglen på nakkestøtten kan sættes ind i soklen.
2. Spænd boltene på den øverste klemme delvist, så nakkestøtten kan bevæge sig, men ikke er løs.
3. Placer nakkestøtten korrekt, og spænd derefter boltene godt fast med en 5 mm sekskantnøgle.

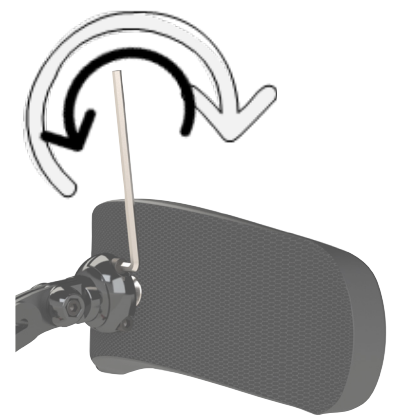

Indsættelse af spindlen

1. For at indsætte spindlen i monteringsblokken skal du sikre dig, at skruen på kuglen vender mod rygstøtten.

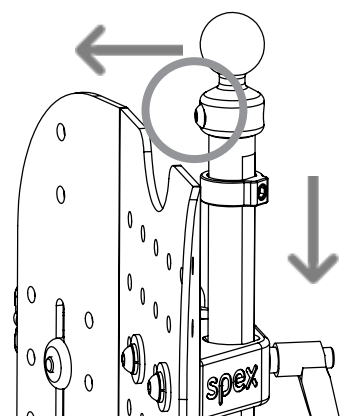


Justering af højde på spindel



3 mm sekskantnøgle

1. Løsn pinolskruen i 'Drop Stopper' med en 3 mm sekskantnøgle.
2. Løsn spændebåndet på monteringsblokken, og flyt spindlen op eller ned til den nye position. Stram spændebåndet for at fastgøre spindlen.
3. Spænd pinolskruen i 'Drop Stopper' for at fastholde højden på spindlen, når hovedstøtten tages af og på kørestolen

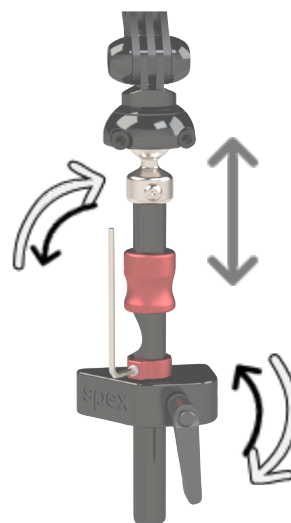


Justering af horisontale, laterale og vinklede positioner



5 mm sekskantnøgle

1. Løsn de 5 mm sekskantnøgle-kompatible bolte på positionerings-mekanismen.
2. Flyt hovedstøttepuden til den korrekte position.
3. Spænd de 5 mm sekskantnøgle-kompatible bolte på positionerings-mekanismen godt fast

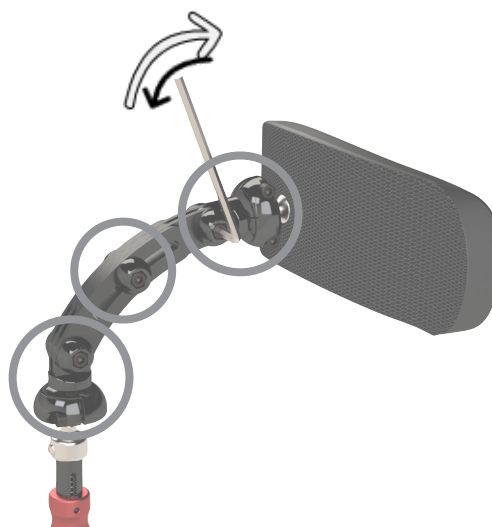


ADVARSEL

Hold kropsdelene fri under justeringen for at undgå fælder eller klemmepunkter, f.eks. mellem leddene. Tjek, at eventuelle links, der stikker ud fra positioneringsmekanismen, ikke er i vejen for brugeren eller kørestolen.

Betjening af Flip-back (hvis monteret)

1. Tag fat i den røde krave, og træk op.
2. Hold kraven op, og løft forsigtigt hovedstøttepuden væk.
3. Sørg for, at den røde krave er helt i indgreb igen, når hovedstøttepuden sættes tilbage i støtteposition.

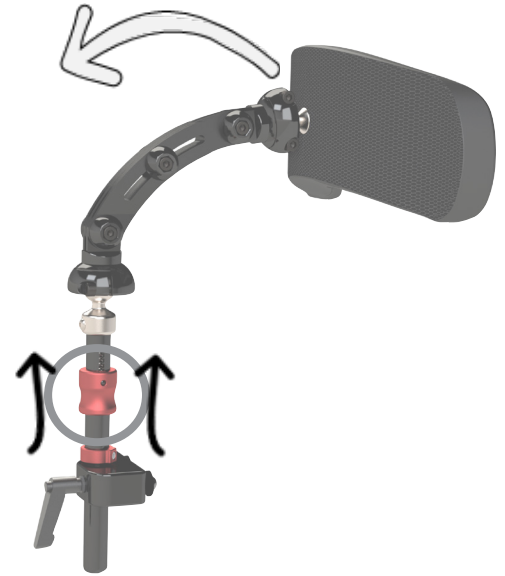

Justerbare sidevinger (hvis monteret)



5 mm sekskantnøgle, 10 mm skruenøgle



1. Sidevingerne kan placeres øverst eller nederst på den midterste hovedstøttepude. For at ændre højden på sidepuden skal du fjerne møtrikkerne på bagsiden af midterpuden med en 10 mm nøgle. Fjern sidevingen, lyn betrækket op, og flyt fastgørelsesbolten til det andet sæt huller. Luk betrækket, sæt sidevingen på plads, og spænd møtrikkerne.
2. Juster bredden mellem sidepuderne ved at løsne de 2 møtrikker på bagsiden af midterpuden med en 10 mm nøgle. Flyt sidestykkerne til den rigtige position, og spænd møtrikkerne.
3. Juster vinklen på hver sidepude ved at løsne de 2 sølvskruer med en 5 mm sekskantnøgle. Flyt sidestykkerne til den rigtige position, og spænd skrueerne.
4. Juster den forreste/bagerste position af hver sidepude ved at løsne de 2 møtrikker på bagsiden af sidepuden med en 10 mm nøgle. Flyt sidestykkerne til den rigtige position, og spænd møtrikkerne.

Vedligeholdelse

Den forventede brugstid for hovedstøtten er 5 år. Hovedstøtten bør kontrolleres og rengøres regelmæssigt for at forlænge dens levetid. Spex anbefaler, at hovedstøtten kontrolleres hver 6. måned. Hvis der opstår problemer, skal du stoppe med at bruge hovedstøtten og straks kontakte din leverandør af Spex sædesystemer.

Tjekliste for vedligeholdelse

- Kontrollér, at udstyret fungerer korrekt.
- Se efter løse bolte eller ødelagte komponenter.
- Undersøg eventuel slitage for tegn på stress eller revner.
- Stram alle løse skruer.


Tjekliste til rengøring

Udstyr

- Tørres af med mildt rengøringsmiddel og vand.
- Brug desinficerende klude. Spex anbefaler at bruge brintoverilte desinfektionsservietter. Desinfektionsproduktet skal bruges i henhold til producentens anvisninger. Spex påtager sig intet ansvar for effektiviteten af desinfektionsprocessen.
- Tør grundigt efter skylning.

Betræk

- Fjern betrækket, og vend vrangen ud.
- Maskinvask i varmt vand (40° C / 104° F)
- Hænge eller tørretumbles ved lav varme.
- Må ikke stryges. Må ikke renses. Må ikke bleges.
- Hvis der bruges kemiske rengøringsmidler, skal du skylle betrækket med vand for at fjerne alle kemikalierester og tørre det helt før brug
- Tjek betrækket for revner og overdreven slitage, og udskift det, hvis det er revet eller ødelagt.

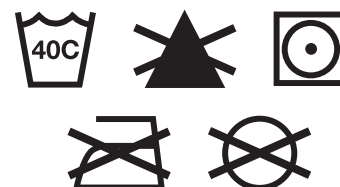

Hvis du har spørgsmål om rengøringsprocedurer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler af Spex sædesystemer.

Rapportering af alvorlige hændelser

I tilfælde af alvorlige hændelser med denne enhed bedes du straks rapportere dette til producenten: Spex Ltd på solutions@spexseating.com

Informér også din lokale distributør, som er angivet bag i denne brugermanual.

Transport Sikkerhed

Spex-sædesystemet er blevet kollisionstestet og overholder RESNA WC-4:2012, afsnit 20 (WC20). Spex-sædesystemet opfylder kravene i ISO 16840-4:2009 og er velegnet til brug som et motorkøretøjssæde, når det bruges med en passende kørestolsbase. Følg alle installations-, brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne vejledning samt følgende transportinstruktioner. Hvis det er muligt, bør kørestolsbrugeren flytte til køretøjets sæde og bruge køretøjets monterede fastholdelsesanordninger.

Spex-sædesystemet er designet til at imødekomme korrekt brug af køretøjsforankrede seler. Spex opnåede vurderingen Fremragende (16 ud af 16) i form af nem, korrekt positionering af fastspændingssæle og den grad, i hvilken korrekt selefastholdelse kan opnås, baseret på metoderne i bilag D. Følgende punkter i Spex-sædesystemet er testet og er egnet til brug i et motorkøretøj:

- Rygstøttemodeller i fuld højde
- Sædebase
- Pudemodeller
- Arm- og lårstøtter
- Tværgående overkrop-støtter
- Hovedstøtter

Bemærk: Rygstøtter, der er lavere end brugerens skulderhøjde, er ikke certificerede og anbefales ikke til transport i et køretøj. F.eks. Zygo Lo rygstøtte.

Montering, brug, vedligeholdelse og begrænsninger

- Justering af kørestolens opsætning må kun udføres af en kvalificeret behandler, fagperson eller forflytningsvejleder. Specialdesignede/skræddersyede systemer kan kræve en fagperson til at konfigurere og installere sædesystemet.
- Efter udførelse af eventuelle justeringer skal du sikre dig, at alle bolte, skruer og møtrikker er sikkert fastgjort igen for at sikre sikkerheden, når du kører i et køretøj.
- Sørg for, at de øverste og nederste beslag på ryglænet og de forreste og bageste beslag på sædeskålen er installeret så langt fra hinanden som muligt for at give en stærkere 4-punkts fastgørelse til kørestolsstellet. Sørg for, at hurtigudløser-låsene er i indgreb.
- Brug ikke Spex-sædesystemet som køretøjssæde, hvis sædekomponenter, der ikke er blevet vellykket kollisionstestet, bruges noget som helst sted i sædesystemet. Spex-sædesystem er designet og certificeret udelukkende ved brug af Spex-komponenter. Spex er ikke ansvarlig i tilfælde, hvor andre fremstillede sædesystemer anvendes i forbindelse med Spex-sædesystem.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alle fastgørelsesanordninger på Spex-sædesystemet ikke har løsnet sig under daglig brug, og efterspænd om nødvendigt.
- Sørg for, at de svingbare sidestykker er i deres låste position, før du bruger sædet som køretøjssæde i et motorkøretøj.

**ADVARSEL**

Transport Sikkerhed


Korrekt positionering af seler

Når du bruger Spex-sædesystemet som køretøjssæde, skal der altid bruges både bækken- og skuldersele. For at placere selerne korrekt på kørestolens passager, skal følgende sikres:

- Bækkenselen skal bæres lavt hen over bækkenets front nær samlepunktet mellem bækken og lår.
- Vinklen på bækkenselen skal være mellem 30° og 75° ift. vandret og ideelt set mellem 45° og 75° ift. vandret (som vist i figur 2).
- Bæltespændet på trepunktsselen skal placeres i kontakt med passagerens krop og væk fra kørestolskomponenter.
- Forbindelsen mellem skulderselen og bækkenselen på trepunktsselerne skal være placeret nær hoften modsat den skulder, som diagonalselen krydser over, og ikke nær midterlinjen af passageren.
- Seler bør ikke føres uden for kørestolens hjul eller over kørestolens armlæn og må ikke holdes væk fra kroppen af kørestolskomponenter eller dele.
- Seler til overkrop skal passe direkte over og i kontakt med midten af skulderen.
- Seler bør justeres, så de sidder så tæt som muligt, i overensstemmelse med brugerkomforten.
- Seler bør ikke bæres snoet på en måde, der reducerer selens kontaktområde med passageren.



Figur 1

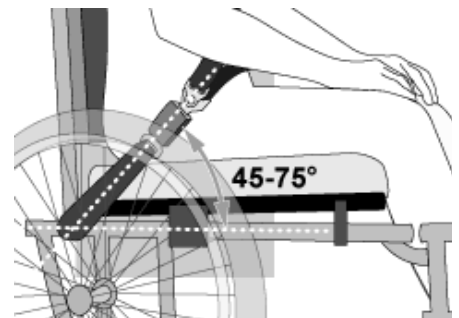

Figur 2



Figur 3a – Forkert positionering af bækkenseler over kørestolsstøtter.



Figur 3b – Korrekt føring og positionering af seler på kørestolspassageren.

**ADVARSEL**

1. Afstanden mellem toppen af brugerens skulder og toppen af ryggen bør ikke overstige 6.5" (16,5 cm).
2. Spex-sædesystemet må kun bruges med kørestolsbaser, der er testet som en del af et kørestolssystem, der overholder ydeevnekravene i ISO 7176-19 og RESNA WC-4:2012, afsnit 19.
3. Spex-sædesystemet bør kun bruges på kørestolsstel, der har fire fastgørelsespunkter og bækkensele-forankringspunkter, der overholder kravene i RESNA WC-4: 2012, afsnit 19.
4. Kørestolen skal mærkes som passende til brug som sæde i et motorkøretøj, dynamisk testet i henhold til ydeevnekravene i ISO 7176-19 og installeret, brugt og vedligeholdt i henhold til producentens instruktioner.
5. Spex-sædesystemet må kun bruges som angivet i denne brugervejledning.
6. Både bækken- og skulderseler som del af et komplet kørestolsbindings- og fastholdelsessystem (WTORS), som opfylder ISO 10542-1, skal bruges til at opnå effektiv fastholdelse af passagerer og optimal beskyttelse ved et køretøjs kollision; selerne skal være kompatible med den specifikke kørestol og monteret på brugeren i overensstemmelse med WTORS-producentens instruktioner.
7. Ryglæn med justerbar hældningsvinkel bør ikke vippes mere end 30° bagud under kørsel i køretøjer, medmindre det er nødvendigt af hensyn til passagerens medicinske og posturale behov.
8. Hvis rygstøtten skal justeres til en vinkel, der er større end 30° lodret under kørsel, skal det øverste skuldersele-forankringspunkt justeres bagud for at opretholde selens kontakt med kørestolspassagerens skulder og bryst.
9. Spex-sædesystemet må kun bruges til fremadvendte siddepladser i motorkøretøjer.


**ADVARSEL**

1. For at reducere risikoen for skader på passagerer i køretøjer skal kørestolsmonterede stive bakkeborde, der ikke er specifikt beregnet til brug under kørsel i motorkøretøjer, følgende:
 - a. Fjernes og fastgøres separat i køretøjet eller
 - b. Fastgjort til kørestolen, så de ikke går i stykker ved et styrt, og
 - Være placeret med et mellemrum på mindst 3" (75 mm) mellem bagkanten af bakkeborde og kørestolspassagerens mave og/eller bryst for ikke at forstyrre den korrekte brug af sele, og
 - Have energiabsorberende polstring placeret mellem bagkanten af bakkeborde og kørestolens passager.
2. Ændringer eller udskiftninger må ikke foretages i sædesystemets struktur, dele eller komponenter uden først at konsultere Spex.
3. Brugen af en postural bækkensele, der er fastgjort til kørestolens base eller sædestellet, anbefales under rejsen, men disse seler skal placeres, så de ikke forstyrrer den korrekte placering af kollisionssikre seler, og de er ikke beregnet til passagerbeskyttelse i kollisionssituationer, medmindre den posturale sele er designet til at overholde og opfylde kravene i WC19.
4. Holdningsstøtteanordninger, der ikke er mærket som værende i overensstemmelse med ISO 16840-4, kan bruges i et køretøj, men er ikke beregnet til fastholdelse af passagerer.
5. Både bækken- og skulderseler, der er i overensstemmelse med WC18 og/eller WC19, bør bruges til at begrænse passagerernes bevægelser ved et biluheld og reducere sandsynligheden for, at passageren slynges ud af køretøjet og/eller at passageren kommer i skade med køretøjets interiør.
6. Seler skal placeres på kørestolspassageren i overensstemmelse med WTORS-producentens instruktioner.
7. Ryglænets monteringsudstyr skal installeres korrekt. Se det relevante afsnit for korrekt monteringsvejledning til ryglænets udstyr.

**ADVARSEL**


1. Hvis kørestolen transporteres, mens den er i brug, skal kørestolen stadig være fastgjort til WTORS.
2. Børn, hvis vægt er mindre end 48.5 lbs. (22 kg) skal overføres fra deres sædesystem til passende barneselesystemer beregnet til brug i motorkøretøjer.
3. Der skal sørges for tilstrækkelig fri plads foran og bagud omkring kørestolens passager. Frizonen foran (FZ) skal være større, når der ikke bruges en skuldersele.

MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE ADVARSLER KAN FORÅRSAGE ALVORLIG SKADE PÅ KØRESTOLSBRUGEREN ELLER ANDRE.

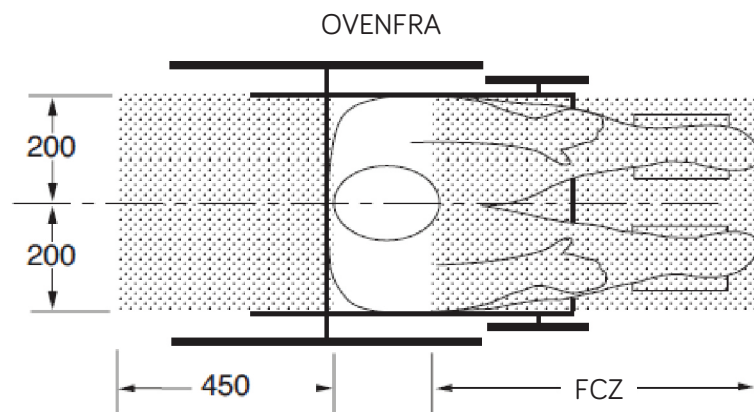

BEMÆRK: Frizonen bagtil måles fra det bagerste punkt på en passagers hoved. Frizonen foran måles fra det forreste punkt på en passagers hoved.

Siddende hovedhøjde (HHT) varierer fra omkring 47" (120 cm) for en lille voksen kvinde til omkring 61" (155 cm) for en høj voksen mand.

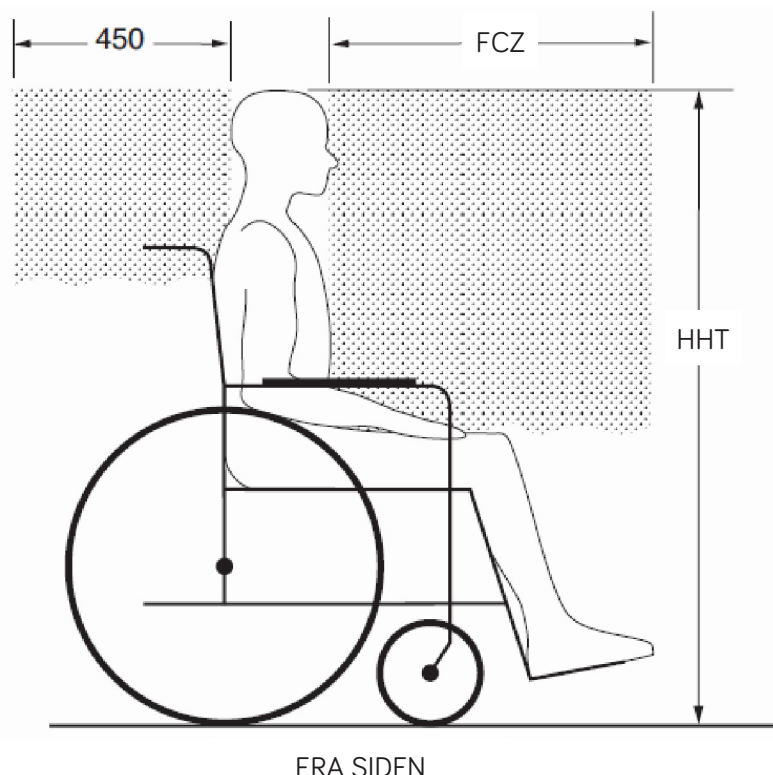

FCZ = 25.5" (65 cm) med overkropssele
37" (95 cm) med bækkensele udelukkende

BEMÆRK: Det anbefales kraftigt, at både bækken- og overkropssele bruges.

Anbefalede frie zoner foran og bagtil for kørestolssiddende passagerer. (Bemærk: FZ er muligvis ikke opnåelig for kørestolssiddende chauffører).

Garanti

Hver Spex-hovedstøtte inspiceres omhyggeligt for at sikre optimal ydeevne og garanteres at være fri for defekter i materialer og udførelse i 24 måneder fra købsdatoen under normal brug. Hvis der opstår en defekt i materialer eller udførelse inden for 24 måneder fra den oprindelige købsdato, vil Spex efter eget valg reparere eller udskifte produktet gratis. Denne garanti gælder ikke for normal slitage, herunder huller, revner eller brandsår, og heller ikke for det aftagelige betræk.

Krav og reparationer skal håndteres gennem den nærmeste autoriserede Spex-forhandler, der er anført på bagsiden. Med undtagelse af de udtrykkelige garantier, der er angivet heri, er alle andre garantier udelukket, herunder implicite garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Der er ingen garantier, der går ud over beskrivelsen heri. Beføjelser for brud på udtrykkelige garantier, der hermed gives, er begrænset til reparation eller udskiftning af varerne. Erstatning for brud på nogen garanti skal under ingen omstændigheder omfatte følgeskader eller overstige prisen på de solgte varer, der ikke overholder kravene.

Serienummeret på din hovedstøtte kan findes ved at åbne lynlåsen på hovedstøttebetrækket.

Distribueret af:



32 Detroit Drive
Rolleston 7614
New Zealand



spex

Spex Ltd
Telefon +64 3 307 9790
solutions@spexseating.com
spexseating.com

US	REP
Medicept 200 Homer Ave, Ashland, MA 01721 United States Tel: +1-508-231-8842	

EU	REP
BEO MedConsulting Berlin GmbH Helmholtzstr. 2 D-10587 Berlin, Tyskland Tel: +49-30-318045-30	