



COBI REHAB

PRODUKTARK

Kamille Power Komfortkørestol

Unik danskudviklet komfortkørestol til sansestimulering

Den individuelle tilpasning og den høje komfort er med til at højne både aktivitetsniveauet, funktionsniveauet og livskvaliteten. Med indbygningsmotor til fremdrift og mulighed for to joystick. Brugervægt maks. 140 kg.



OP TIL 140 KG



- Asymmetrisk justering af ryg- og sædesystem exceptionelt fleksible armlæn
- Elektrisk indstilling af ryg samt tilt af sæde/ryg (som standard)
- Elektrisk fremdrift (indbygningsmotor), der betjenes med joystick
- Swing away benstøtter (som standard)
- Specialudviklede flytbare, polstrede kropsstøtter (tilkøb)
- Aftagelige swing away benstøtter (tilkøb)
- Crash testet i henhold til ISO 7176-19



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Kamille Power Komfortkørestol

Generelt

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger om anvendelsen af Kamille Power Komfortkørestol og målgruppen for kørestolen. Den indeholder også en lang række specifikationer på Kamille Power Komfortkørestol.

Den nyeste version af dette produktark finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er den nyeste.

Hvis du har brug for et produktark, skrevet med en større skriftstørrelse, findes produktarket i skalérbar PDF-form på cobirehab.com.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på telefon 70 25 2522, hvis du ønsker flere oplysninger om Kamille Komfortkørestol.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

Kørestolens UDI-nummer fremgår af labelen, som er placeret på siden af stellet.

Produktsikkerhedsmeddelelser og tilbagekaldelse af produkter kan ses på hjemmesiden under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/>

Brugstemperatur

Kamille Power Komfortkørestol kan bruges i omgivelser med temperaturer fra 0° - 40°C og en luftfugtighed mellem 20-75%.

Overfladetemperaturen kan stige, når Kamille Power Komfortkørestol udsættes for eksterne varmekilder, fx sollys.

Anvendelse

Kamille Power Komfortkørestol bruges primært indendørs på plejehjem eller i plejeboliger og private hjem.

Kamille Power Komfortkørestol har en bredde, der gør, at den kan komme igennem almindelige døråbninger

Enkelte modeller kan dog på grund af deres store bredde have vanskeligt ved at passere gennem almindelige døre og nødudgange.

Kamille Power Komfortkørestol er beregnet til at yde mobilitet til borgere, der er begrænset til siddende stilling. Maks. brugervægt op til 140 kg.

Den tilsigtede operatør af kørestolen er en sundhedsuddannet fagperson, fx en terapeut, sygeplejerske eller en sosu-assistent.

Kontraindikationer

Borgere med nedsat kognitive funktionsevner skal overvåges i forbindelse med anvendelsen af Kamille Power Komfortkørestol.

Kamille Komfortkørestol uden elektrisk fremdrift

Kamille Power Komfortkørestol findes også i en model uden indbygningsmotor. Denne model, Kamille Komfortkørestol, har stadig elektrisk tilt som standard.

Indbygningsmotor kan monteres på allerede indkøbte Kamille Komfortkørestole.

Kamille Power komfortkørestol

Konstruktion

Kamille Power Komfortkørestol giver exceptionel støtte, fordi den i sin konstruktion er så fleksibel, at den kan understøtte kontrakturer i både OE og UE uden specialtilpasning.

Muligheden for maksimal individuel tilpasning er med til at højne både aktivitetsniveau, funktionsniveau og livskvalitet.

Kamille Power Komfortkørestol kan indstilles efter borgers hofte-, knæ- og ankelled. Sædet på kørestolen kan tiltes op til 45°, hvilket letter fx forflytninger. Ryggen kan vinkles op til 35°.

El-indstillelig ryg og el-tilt af sæde/ryg

Kamille Power Komfortkørestol kommer som standard med el-indstillelig ryg og el-tilt af sæde/ryg som enhed. De forskellige el-funktioner er trinløse, hvilket gør, at borger ikke oplever generende ryk.

El-funktionen giver også mulighed for justering af hoftevinkel og vinklingen på sæderyggen.

Funktionen el-indstillelig ryg låser automatisk.

Elektrisk tilt og indstilling af ryg sikrer bedre arbejdsforhold for hjælpere, som undgår brug af egen kropsvægt i håndteringen af kørestolen.

De elektriske funktioner aktiveres med et joystick, der både kan være borger- og hjælperbetjent.

Større livskvalitet

Den tryghed og ro, som borger kan opleve i den komfortable Kamille Power Komfortkørestol, kan være med til at højne funktionsniveauet.

Med det øgede funktionsniveau kommer også en højere grad af fleksibilitet, livskvalitet og lyst til at indgå i sociale relationer og aktiviteter.

Gentilpasning og tilbehør

Kamille Power Komfortkørestol kan genbruges, fordi det store udvalg af tilbehør gør det nemt at gentilpasse kørestolen.

Kørestolen kan opgraderes med bord, stretchcovers og forskellige typer af tyngdepuder, nakkestøtter, flexarme (krammearme) og benstøtter. Alt tilbehør tilpasses den enkelte borger.

Gentilpasninger bør altid foregå i samarbejde med de terapeutuddannede konsulenter fra Cobi Rehab.

For oversigt over tilbehør se side 12.

Elektrisk fremdrift

Kamille Power Komfortkørestol kan køre op til 5 km i timen. Den maksimale rækkevidde er ca. 10 km ved fuld last.

Kørestolen kan køre ned af kanter og hen over dørtrin på op til 30 mm.



1. Nakke
2. Rygsystem
3. Skubbebøjle
4. Håndbremse
5. Armlæn
6. Sædesystem
7. Frakkeskåner
8. Fodstøtte
9. Anti-tip

Joystick kan monteres på skubbebøjlen og/eller armlænet.

Sædesystem

Sædesystemet kan indstilles til borgere med asymmetriske problemstillinger. Sædesystemet består af to selvstændige plader, som via slidser kan placeres uafhængigt af hinanden.

De to selvstændige plader i sædesystemet sikrer en præcis indstilling, der matcher borgers individuelle anatomiske behov.

Det gavner borgere, som er udfordret af fx anisomeli (forskellige benlængder), difference i mængden af væv på UE eller af abduktion over hofteled. Muligheden for asymmetrisk justering imødekommer også udfordringer med windswept benstillinger.

Sædepladernes placering kan manuelt indstilles med almindeligt værktøj.

Kørestolens pudesystem er placeret direkte oven på sædepladerne.

Kamille Power Komfortkørestol er udstyret med polstrede frakkeskånere, der følger sædepladens bevægelser og vinkel.

Til forskel fra andre komfortkørestole, er størrelsen ikke fast, men et interval. På den måde kan bredde og dybde justeres til bedst muligt at imødekomme borgers dimensioner.



Selvstændige plader i sædesystemet sikrer en præcis indstilling.



Polstrede frakkeskånere, der følger sædepladens bevægelser.

Rygsystem

Ryggen kan justeres asymmetrisk. Det gør det nemmere at imødekomme anatomiske udfordringer såsom scolioser, øget lateral fleksion over truncus eller asymmetrisk væv fx ved overvægt, brok eller ødemer.

Asymmetrisk justering sker takket være de tre aluminiumsplader, der udgør rygsystemet. To af pladerne kan flyttes uafhængigt af hinanden, selvom alle tre plader er forbundet.

Rygsystemet består af rygbasen, som er monteret på seks slidser. Slidserne gør, at rygbasen kan justeres i højden.

Sidepladerne, monteret på to slidser, kan løses ved brug af almindeligt værktøj.

Rygsystemets tilt funktion er konstrueret, så det mindsker risikoen for shear, når rygvinklen ændres. Højden på ryggen kan øges 80 mm (ved hjælp af en rygforlænger) uden at gå på kompromis med rygsystemets indstilling.

Rygforlænger (tilkøb) består af tre plader monteret på rygsystemet. Rygforlænger kan justeres asymmetrisk.



Konstruktionen på rygsystemet mindsker risikoen for shear ved ændring af vinkel.

Polstrede kropsstøtter (tilkøb)

Specialudviklede kropsstøtter, placeret i slidser på rygsystemet, bidrager til en stabil og kropsnær truncusstabilitet, uanset om borger har scolioser eller nedsat/øget tonus thorakalt.

Kropsstøtternes placering på rygsystemet gør, at de kan placeres helt tæt på borger, så borger ikke kan "falde ud til" eller "falde ud over" kropsstøtten.

Der kan placeres flere kropsstøtter i hver side ved komplicerede behov.

Kropsstøtterne på Kamille Power Komfortkørestol er polstret med viskoelastisk skum og Krøyer-kugler.



Kamille Komfortkørestol med let vinklede polstrede kropsstøtter (i forskellige størrelser) uden hætte.

Benstøtter

Kamille Power Komfortkørestol er som standard udstyret swing away benstøtter. Swing away benstøtter understøtter, at borger i længere tid kan fastholde aktiviteten "Manuel forflytning" fra plejeseng til kørestol.

Benstøtterne kan højdejusteres og vinkeljusteres over knæ- og ankelled.

Benstøtterne er polstrede med skum på ydersiden og med en pude (viskoelastisk skum og Krøyer-kugler) på indersiden. Polstringen på ydersiden er af skum for at mindske risikoen for uhensigtsmæssig kontakt med stellet.

Fodstøtterne kan ved hjælp af små indsatser (tilkøb) gå fra todelt til samlet, til brug ved fx kraftig adduktion.

Swing away funktionen kan yderligere låse benstøtterne i en mere åben vinkel, som gør, at borgere med abduceret position kan sidde fuldt understøttet.

Aftagelige swing away benstøtter kan tilkøbes.



Benstøtterne kan højdejusteres, eleveres og vinkeljusteres over knæ- og ankelled.



Aftagelige swing away benstøtter kan tilkøbes.

Armlæn

Armlænet kan forholdsvis simpelt indstilles i dybden ved brug af unbraco værktøj.

Armlænet kan ved hjælp af fingerskruer vinkles ind ad, ned ad, op ad og justeres i højden. Det gør, at armlænet kan vinkles, så det således tilgodeser øget muskelkontraktion eller over-/underaktivitet i musklerne i overekstremiteterne.

Polstringen på armlænet indeholder samme type fyld som de øvrige puder på Kamille Power Komfortkørestol.

Polstringen højner mængden af sansestimuli og minimerer risikoen for tryksår.

Armlænene kan vinkles til naturlig hvileposition.

De fleksible armlæn er standard på alle udgaver af Kamille Power Komfortkørestol.

Der kan tilkøbes flexarme (krammearme) med tyngde, som understøtter borgers arme og bidrager til yderligere tryghed, ro og komfort.



Aftagelige armlæn, der kan vinkles både ind, ud og lidt op og helt op.

Pudesystem

Kamille Power Komfortkørestol er udstyret med et komplet og unikt pudesystem, der sikrer optimal trykfordeling og kropsnær positionering. Puderne er fyldte med en blanding af Krøyer-kugler og skum, som tilsammen bidrager til forøget sansestimuli. Hver pude har sin egen lynlås.

Den punktberøring, som Krøyer-kuglerne leverer, resulterer i en lang række "beskeder" til hjernen.

Bearbejdningen af "beskederne" fører til en "samlende" effekt og til fornemmelsen af kropsafrænsning og velvære hos borger.

Puderne er modellerbare og kan løbende justeres individuelt til den enkelte borger. Det giver høj genbrugsværdi i tråd med kravet om bæredygtighed.

Puderne er nøje udformet til at passe den kropsdel, som de understøtter. Puderne er holdt i en neutral tone, da erfaring viser, at mørke farver kan virke "bundløse" for borgere med visuel-kognitive funktionsproblemer.



Puderne er modellerbare og kan justeres manuelt til den enkelte borger.

Nakkestøtte

Armen på nakkestøtten består af udskiftelige og kraftige kugleled. Kugleleddene er med til sikre fleksibilitet uden at nakkestøtten forskubber sig.

Kugleleddene indstilles med en unbraco nøgle.

Der er påmonteret to pudeelementer på nakkestøtten, en blød skumbase betrukket med neopren og en blød pude med tre kamre fyldt med Krøyer-kugler og viskoelastisk skum. De enkelte kamre kan justeres efter behov.



Kraftige kugleled på nakkestøttens arm gør, at nakkestøtten fx kan vinkles både til højre og venstre side.

Skubbebøjle

Kamille Power Komfortkørestol er udstyret med en skubbebøjle for nem manøvrering. Skubbebøjlen er udformet, så den kan bruges i flere positioner.

Skubbebøjlen vinkel kan justeres ved hjælp af de to fingerskruer, placeret på højre og venstre side af skubbebøjlen.



Skubbebøjlen kan vinkles til forskellige højder.

Bremser

Bremseren på Kamille Power Komfortkørestol er indbygget i motoren. Det vil sige, når joysticket slippes, stopper kørestolen.

Hjultype

Kamille Power Komfortkørestol er udstyret med 12½" massive dæk, i gråt nylon gummi, der ikke efterlader mærker på gulvet.

Indbygningsmotoren er indbygget i 12½" hjulene. Derfor er totalbredden større end modellen uden indbygningsmotor.

For mere information om totalbredden på Kamille Power Komfortstol kontakt Cobi Rehab på 7025 2522 eller cobi@cobi.dk.



Massive 12½" hjul i nylon gummi.

Aktuatorer

Der findes to aktuatorer under sædet på Kamille Power Komfortkørestol. En sædeaktuator og en rygaktuator.

Styreboks

Styreboksen sidder fastmonteret på bundpladen. Demontering af styreboksen sker ved hjælp af værktøj, men må ikke foretages af andre end Cobi Rehabs serviceteknikere.

Elektronikken er IPX4 klassificeret. Det betyder, at kørestolen og dens komponenter tåler let regn.

Elektronikken monteret på kørestolen kan ikke forstyrre driften af enheder i kørestolens miljø, som udsender elektromagnetiske felter, fx alarmsystemer i butikker, automatiske døre med mere.

Kørestolens køreegenskaber påvirker ikke elektromagnetiske felter, som udsendes af fx bærbare telefoner og elektricitetsgeneratorer.

Elektrisk tilt og indstilling af ryg

Kamille Komfortkørestol kommer som standard med el-indstillelig ryg og el-tilt af sæde / ryg som enhed. Det giver en trinløs, rolig og komfortabel justering af siddeenheden, som kan foregå med borger sidde i kørestolen.

Anti-shear funktionen på Kamille Komfortkørestol er unik. Konstruktionen af den el-indstillelige ryg er udformet således, at den minimerer risiko for shear, da rotationsakslen er placeret ud fra bækkenets udgangspunkt.

EI-tilt en aktiveres, når sæde / ryg som enhed skal vinkles. Denne funktion er vigtig for borgerne med behov for varierede siddestillinger i løbet af dagen for:

- at undgå smerter
- at forbygge tryksår
- at opnå truncusstabilitet
- at opnå hovedkontrol

EI-tilt er desuden vigtig, når der skal opnås en vinkling i sidestillingen, der sikrer, at borgers hovedstillingen så vidt muligt er i lod.

EI-tilt er tilsvarende en vigtig funktion i forhold til spisefunktion og synkning.

Joystick

Joysticket tillader plejepersonale eller borger at manøvrere kørestolen og at justere sæde- og rygvinklen (tilt og recline).

Det primære joystick er monteret på skubbebøjlen, men der kan også monteres et joystick på armlænet til borger.

Det primære joystick monteret på skubbebøjlen bestemmer, hvem der styrer kørestolen. Joysticket på armlænet kan slås til/fra ved behov.

På bagsiden af joysticket findes stikket til opladning af kørestolen. Kørestolens batteri lukker ned i op til 72 timer, hvis batteriet tømmes fuldstændigt. Oplad derfor kørestolen til 100% hver dag.

På joysticket ses:

- en tænd- og slukknop
- en knap med et horn
- et display, som viser batterikapacitet, tidspunkt, hastighed, og kørselsprofil
- to knapper mærket med *Mode* og *Profile*
- en dobbeltknop, der styrer hastigheden.

Kørsel

Kamille Power Komfortkørestol kan køre op til 5 km i timen. Den maksimale rækkevidde er ca. 10 km ved fuld last.

Kørestolen kan køre ned af/hen over kanter og hen over dørtrin på op til 30 mm og op og ned ad bakker og ramper med en 6% hældning.

For borger og pårørende betyder det frihed til at komme rundt indenfor.



Stik til oplader på undersiden af joysticket



Rengøring og vedligeholdelse

Stretchcovers (anbefalet tilkøb) til Kamille Power Komfortkørestol kan vaskes ved 60°C og tørretumbles.

Puderne kan tørres af med en klud vredet op i mildt sæbevand.

Alle puder kan skiftes ved overgang til ny borger.

Hvis stellet er snavset, kan det tørres af med en klud vredet op i mildt sæbevand.

Det anbefales, at Kamille Power Komfortkørestol aftørres og støvsuges mindst én gang om ugen, og hjulene tjekkes for snavs.

Desinfektion

Stel, puder, joystick og skubbebøjle kan også

desinficeres med fx Wet Wipe 70 % eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

 Desinficér altid Kamille Power Komfortkørestol, hvis den skal overgå til ny borger. Det skal ske for at undgå krydskontamination.

Brug af vaskehal

Skal Kamille Power Komfortkørestol desinficeres eller vaskes i vaskehal på fx depot eller hospital skal alle elektriske komponenter samt puder og betræk afmonteres.

Afmontering og genmontering af elektriske komponenter bør kun ske af teknisk uddannet personale. Kontakt os for mere information om afmontering af elektriske komponenter.

Opbevaring og transport

Når Kamille Power Komfortkørestol ikke er i brug, bør den opbevares tørt og mellem 0°-40°C.

Kamille Power Komfortkørestol er (uden borger) egnet til transport på land. Kamille Power Komfortkørestol kan ikke klappes sammen, da den har en fast ramme.

For at undgå skader i fx ryggen, frarådes det, at hjælper/plejepersonalet bærer den 67 kg tunge kørestol.

Kamille Power Komfortkørestol tåler at blive løftet op i rammen, hvis den skal transporteres uden borger i motoriseret køretøj.

Kamille Power Komfortkørestol er crash testet og må derfor bruges som et sæde i et motoriseret køretøj, hvis der er monteret transportbeslag (tilkøb).

Langtidsopbevaring

Ved langtidsopbevaring (over tre måneder) af Kamille Power Komfortkørestol bør kørestolen opbevares mellem 0°-30°C og i en luftfugtighed, under 75%.

Det anbefales, at batteriet er 40-60 % opladt før opbevaringen.

Når kørestolen tages i brug igen efter langtidsopbevaring, skal den tilsluttes strøm via bagsiden af joysticket og oplades i minimum en time.

Hold øje med batterikapaciteten, da batteriet vil aflade over tid.



Alle puder på Kamille Power Komfortkørestol kan udskiftes. Der er lynlås på hver eneste pude.

**Stik
til
oplader
på undersiden
af joysticket**

Specifikationer

Maks. brugervægt	140 kg
Risikoklasse	1
Grundlæggende UDI DI	5740000100024N8
Forventet holdbarhed	Minimum 7 år
Crash testet	Ja, i henhold til ISO 7176-19
Sædedybde	400-560 mm
Højde fra gulv til forkant på sædepladen uden sædepude	470 mm
Højde sædepude	120 mm
Ryg vinkel	96° - 131°, trinløst
Sædevinkel	0° - 45°, trinløst
Ryglæns højde	500-525 mm
Sædebredde	340-520 mm
Totalbredde	725-915 mm
Vægt af kørestol	67 kg
Vægt af tungeste komponent på kørestolen	4 kg
Maks. hældning op ad bakke	6°
Massive dæk	12½", PU
Stellet	Stål og aluminium
Pudefyld (ryg, fod)	Viskoelastisk skum og Krøyer-kugler
Pudefyld (sæde)	Viskoelastisk skum, koldskum og Krøyer-kugler
Pudepolstring	Strækbar PU
Skubbebøjle, indstillelig	Ja
Venderadius (pivot)	1100-1300 mm
Sammenklappelig	Nej
Generelle krav og prøvningsmetoder	ISO/EN 12182:2012, ISO/EN 12183:2014
Modstandsdygtighed i forhold til vand	IPX4
Skubbebøjle, fodstøtterør, fod- og lægplade	Stål
Hjulgafler	Aluminium
Batteri	Li-Ion 24V 22.4 Ah
Aktuatorer/Styreboks	LINAK LA23/ Curtiss -W right R-net PM120
Joystick	R-net JSM-LCD

Bestilling

Model	Sædebredde mm	Sædedybde mm	Varenummer	HMI-nummer
Power kørestol med joystick	340-400	400-440	0351-142-000	133528
Power kørestol med joystick	340-400	460-500	0351-148-000	133529
Power kørestol med joystick	400-460	400-440	0351-242-000	133627
Power kørestol med joystick	400-460	460-500	0351-248-000	133629
Power kørestol med joystick	400-460	520-560	0351-254-000	133718
Power kørestol med joystick	460-520	460-500	0351-348-000	133720
Power kørestol med joystick	460-520	520-560	0351-354-000	133722

Tilbehør

Tilbehør	Varenummer
Led til montering af aftagelige swing away benstøtte, H	0350-999-282
Led til montering af aftagelige swing away benstøtte, V	0350-999-283
Nakkestøtte	0350-999-041
Ekstra led til nakkestøtte	0350-999-043
Flexarme (krammearme) med tyngde, H	0353-999-201H
Flexarme (krammearme) med tyngde, V	0353-999-201V
Flexarme uden tyngde, H	0353-999-203H
Flexarme uden tyngde, V	0353-999-203V
Rygforhøjer S	0350-999-247S
Rygforhøjer M	0350-999-247M
Rygforhøjer L	0350-999-247L
FLO2-Brystsele, S	0355-999-002
FLO2-Brystsele, M	0355-999-003
FLO2-Brystsele, L	0355-999-004
FLO2-Brystsele Female, M	0355-999-005
FLO2-Brystsele Female, L	0355-999-006
POSIGO 4-punkt hoftesele med sikkerhedsspænde, XS	0355-999-020
POSIGO 4-punkt hoftesele med standardspænde, XS	0355-999-021
POSIGO 4-punkt hoftesele med standardspænde, S	0355-999-022
POSIGO 4-punkt hoftesele med sikkerhedsspænde, S	0355-999-023
POSIGO 4-punkt hoftesele med standardspænde, M	0355-999-024
POSIGO 4-punkt hoftesele med sikkerhedsspænde, M	0355-999-025
POSIGO 4-punkt hoftesele med standardspænde, L	0355-999-026
POSIGO 4-punkt hoftesele med standardspænde, L	0355-999-027
Beslag til positioneringssele, lille	0353-999-021
Beslag til positioneringssele, stor	0353-999-023
Kropsstøtte, H	0353-999-081H
Kropsstøtte, V	0353-999-081V
Kropsstøtte, S højre	0353-999-083H
Kropsstøtte, S venstre	0353-999-083V
Sidestøtteplade	0353-999-061

Nakkepude med tyngde	0353-999-205
Lårpudetæppe med tyngde	0353-999-207
Bord	0100-999-001
Beslag til bord	0353-999-047
Komplet pudesæt Kamille Komfortkørestol, S	0352-999-201
Komplet pudesæt Kamille Komfortkørestol, M	0352-999-203
Komplet pudesæt Kamille Komfortkørestol, L	0352-999-205
Rygpude 1, S	0350-999-410
Rygpude 1, M	0350-999-411
Rygpude 1, L	0350-999-412
Rygpude 2, S	0350-999-415
Rygpude 2, M	0350-999-416
Rygpude 2, L	0350-999-417
Rygpude 3, S	0350-999-420
Rygpude 3, M	0350-999-421
Rygpude 3, L	0350-999-422
Ryg sidepude, H	0350-999-425
Ryg sidepude, V	0350-999-427
Frakkeskånerpude, H	0350-999-435
Frakkeskånerpude, V	0350-999-437
Lægpude delt, H	0350-999-440
Lægpude delt, V	0350-999-442
Fodpude delt, H	0350-999-450
Fodpude delt, V	0350-999-452
Fodstøtte rørpude, H	0350-999-460
Fodstøtte rørpude, V	0350-999-462
Sædepude, S	0350-999-465
Sædepude, M	0350-999-466
Sædepude, L	0350-999-467
Nakkestøttepude	0350-999-471
Armlæns pude	0353-999-209
Nakkestøtte stretchcover, M	0350-999-551

Ryg stretchcover, S	0350-999-555
Ryg stretchcover, M	0350-999-556
Ryg stretchcover, L	0350-999-557
Sædepude stretchcover, S	0350-999-560
Sædepude stretchcover, M	0350-999-561
Sædepude stretchcover, L	0350-999-562
Stretchcover sædestyr/frakkeskåner	0350-999-563
Benstøtte delt, stretchcover, H eller V	0350-999-565H eller V
Flexarme (krammearme) stretchcover, H	0353-999-121H
Flexarme (krammearme) stretchcover, V	0353-999-121V
Armlænpude stretchcover	0353-999-125
Ryg sort nylon overtræk, S	0350-999-580
Ryg sort nylon overtræk, M	0350-999-581
Ryg sort nylon overtræk, L	0350-999-582
Rygforlænger sort nylon overtræk, S	0350-999-585
Rygforlænger sort nylon overtræk, M	0350-999-586
Rygforlænger sort nylon overtræk, L	0350-999-587
Benstøtte sort nylon overtræk, H	0350-999-590H
Benstøtte sort nylon overtræk, V	0350-999-590V



COBI REHAB



FORHANDLER OG FABRIKANT

Cobi Rehab

Silovej 16 -18
DK-2690 Karlslunde
Danmark
+45 7025 2522

cobirehab.com