



COBI REHAB®
The Positioning Company

PRODUKTARK

Caneo XL – bariatrisk kørestol

Sammenklappelig kørestol med forstærket konstruktion beregnet til brugere op til 200 kg.

Til indendørs- og udendørs brug.

Mange indstillingsmuligheder.

Caneo XL kørestol bruges på plejecentre og hospitaler samt i hjemmeplejen og private hjem til brugere med behov for en komfortabel standard kørestol.

Bemærk, at der ikke følger en sædepude med.

OP TIL 200 kg



- Sammenklappelig og nem at transportere.
- Mulighed for justering af blandt andet ryglæn og armpuder.
- Højdeindstillelige fodplader med lægstrop.
- Benstøtter kan svinges ud/tages af.
- Desinficerbar.
- Passer til de fleste døråbninger.
- Mulighed for tilkøb af forskellige sædepuder.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Anvendelse

Caneo XL kørestol er designet til indendørs brug på fx hospitaler, institutioner og i plejeboliger.

Kørestolen kan også bruges udendørs og i private hjem.

Caneo XL kørestol er beregnet til brugere op til 200 kg med begrænset stand- og gangfunktion.

Den tilsigtede operatør af Caneo XL kørestol er en sundhedsuddannet fagperson, fx en terapeut, sygeplejerske eller en sosu-assistent.

Tilsigtede operatør kan også være brugeren med truncusstabilitet og funktionsevne til selv at kunne drive, styre og bremse kørestolen.

Caneo XL kørestol kan bruges i omgivelser med en temperatur fra -10° til 50°C og i en luftfugtighed mellem 20-75%.

Ibrugtagning

Når Caneo XL kørestol tages i brug, bør bruger sammen med terapeut eller en anden sundhedsfaglig medarbejder udføre en række forskellige række-, fremadbøjnings- og forflytningsøvelser for at forstå sikkerhedsgrænserne for kørestolen.

Kontraindikationer

Brugere med nedsat kognitive funktionsevner, alvorlige forstyrrelser i balanceorganet eller manglende evne til at sidde skal overvåges og guides i forbindelse med brugen af Caneo XL kørestol.

Om dette produktark

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger om anvendelsen af XL kørestol og målgruppen for kørestolen. Det indeholder også en lang række specifikationer på Caneo XL kørestol.

Den nyeste version af dette produktark finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er det nyeste.

Hvis du har brug for et produktark, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes det i PDF-form på cobirehab.com, som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på 7025 2522 eller på cobi@cobi.dk, hvis du ønsker flere oplysninger om Caneo XL kørestol.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.



Caneo XL kørestol op til 200kg.

Konstruktion

Caneo XL kørestol er en manuel transportkørestol med en krydskonstruktion, der gør kørestolen sammenklappelig.

Rammen og rygrør er lavet af hvidlakeret stål, mens sæde- og rygpolstringen er lavet af 300 D polyester.

Armpuder i PU-skum er monteret på armlænene.

Caneo XL kørestol er udstyret med parkeringsbremse og skubbehåndtag.

Antitip-hjul, der forhindrer, at kørestolen vipper bagover, er ekstraudstyr.

Caneo XL kørestol leveres med fodplader, et dertilhørende fodbræt og en lægstrop. Benstøtterne kan klikkes af eller justeres i højden. Andre typer af benstøtter kan tilkøbes.

Caneo XL kørestol har 24" drivhjul i PUR plast og 7" styrehjul, ligeledes i PUR plast.

Justeringsmuligheder

Armlæn indstilling desk/long

Armlænene kan tilpasses borgers behov. Løsn skruerne som fastholder armlænene på rammen og skub dem derefter frem eller tilbage.

Indstilling af ryglænsbolstringen

Ryglænet indstilles ved at fjerne rygdugen og løsne velcrobåndet på spændebåndene. Fæstn derefter spændebåndene i den ønskede stilling på velcrobåndet. Start med det nederste spændebånd.

Klap rygdugen over ryggen til sidst.

Benstøtter

Benstøtterne kan klikkes af og på ved hjælp af en udløserknop. Benstøtterne kan også svinges ud.

Der kan tilkøbes forskellige typer af benstøtter, fx amputationsbenstøtter.

Forstærkede sidedele (frakkeskånere)

De forstærkede sidedele kan svinges op (bagud) ved hjælp af en udløserknop.

Indstilling af sædehøjde

Sædehøjden kan indstilles i to højder med en afstand på 30 mm. Indstillingen sker ved hjælp af borehuller i forreste hjulgaffel og de tilsvarende huller i rammen. Denne indstilling må kun foretages af en fagmand.

Rengøring

Kørestolens rammer kan tørres af med en fugtig klud. Ved kraftigere snavs kan der anvendes et mildt rengøringsmiddel eller varmt vand.

Hjulene kan renses med en fugtig børste med bløde plastbørster.

Polstringen kan vaskes i hånden med en mild sæbeopløsning på op til 40°C.

Desinfektion

Ved manuel rengøring af et brugt hjælpemiddel tørres alle dele grundigt af med et desinfektionsmiddel til overflader. Til kørestolens materialer kan der fx bruges

Aldehydfrit desinfektionsmiddel, der indeholder alkohol (max. 70 % propylalkohol).

Opbevaring og transport

Når Caneo XL kørestol ikke er i brug, bør den opbevares tørt og beskyttet mod stærkt sollys ved en temperatur på 0°C til + 45°C og ved en relativ luftfugtighed på 20 - 75%.

Parkeringsbremsene må ikke være aktiveret.

Ovennævnte anbefalinger for opbevaring gælder også ved opbevaringsperioder over 4 måneder.

Transport

Caneo XL kørestol er (uden bruger) egnet til land- og/eller lufttransport, den tåler at blive løftet op i rammen, hvis den skal transporteres uden bruger i et køretøj.


Caneo XL kørestol er crash testet i henhold til ISO 7176-19, og den egner sig derfor som sæde til personbefordring i et køretøj.

Specifikationer


Maks. brugervægt	200 kg
Risikoklasse	I
Grundlæggende UDI DI	
Forventet holdbarhed	Minimum 7 år
Crash testet	Ja
Samlet bredde	760-800 mm
Samlet højde	920-950 mm
Samlet længde med benstøtter	1150-1200 mm
Sædedybde	400-440 mm
Sædebredde	567-607 mm
Sædehøjde fortil	440-470 mm
Sædevinkel	3°
Ryglænsenhøjde	430 mm
Armlæn justerbare (frem/tilbage)	Ja
Fodstøtter højdejusterbare	Ja
Vægt kørestol	25 kg
Skubbehåndtag indstillelig	Nej
Hældning op/ned ad bakke	Maks. 10°
Sæde- /Ryglænsespstring	300 D Polyester
Drivhjul quick release	Ja
Ramme, ryg, sædeplade	Stål
Drivhjul/styrehjul	24" massive/7" massive, PUR-plast
Armpuder	PU-skum
Benstøtter	Aluminium/plast
Fodplade med skridsikker tape	Aluminium/PVC
Sammenklappelig	Ja
Risikovurdering	DIN EN 12813
ISO-klassifikation	ISO 7176-8, ISO 10993-5

Bestilling og tilbehør

Model	Sædebredde	Varenummer
Caneo XL 200 kg bariatrisk kørestol	560 mm	0326-056-000
Caneo XL 200 kg bariatrisk kørestol	600 mm	0326-060-000
Caneo XL 200 kg bariatrisk kørestol	600 mm	0326-060-000T
Tilbehør		
Tilbehør og reservedele	Kontakt Cobi Rehab på tlf. 70 25 25 22	

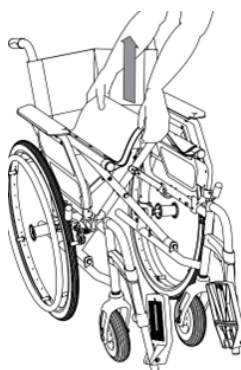

Caneo XL kørestol klappes sammen.

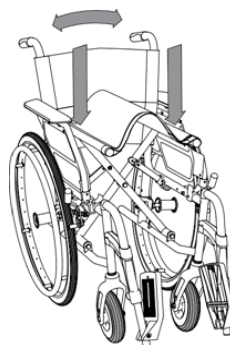

Caneo XL kørestol foldes ud.



COBI REHAB



FORHANDLER

Cobi Rehab
Silovej 16-18
DK-2690 Karlslunde
Danmark

+45 7025 2522
E-mail: cobi@cobi.dk
www.cobirehab.com

FABRIKANT

Dietz GmbH
Reutäckerstrasse 12
76 307 Karlsbad
Tyskland

Tel.: +49 7248.9186-0
Fax: +49 7248.9186-86
E-mail: info@dietz-reha.de
www.dietz-reha.de