



**COBI REHAB®**  
The Positioning Company

## PRODUKTARK

# Transporter kørestol

### **Robust, manuel kørestol til transport af bariatriske brugere.**

Transporter er designet til nem indendørs transport, fx på hospitaler og bariatriske afdelinger. Kørestolen er nem at desinficere og næsten vedligeholdelsesfri.

Transporter kørestol anvendes til brugere, der vejer op til 325 kg.



**OP TIL 325 kg**

- Nem indendørs transport
- Nem at desinficere
- Store 24" drivhjul med parkeringsbremse
- Robuste fodstøtter giver optimal brugerstøtte og sikkerhed
- Kurv til ejendele
- Ekstra lange armlæn



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

## Anvendelse

Transporter kørestol er designet til nem indendørs transport, fx på hospitaler, plejecentre og bariatriske afdelinger.

Her anvendes kørestolen fx til transport mellem afdelinger eller til transport ud til afventende ambulance eller lignende.

Kørestolen er nem at desinficere og næsten vedligeholdelsesfri.

Transporter kørestol anvendes til brugere, der vejer op til 325 kg.

Benstøtterne på Transporter kørestol kan bære 100 kg hver.

## Om dette produktark

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger om anvendelsen af Transporter kørestol og målgruppen for kørestolen. Det indeholder også en lang række specifikationer på Transporter kørestol.

Den nyeste version af dette produktark finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er det nyeste.

Hvis du har brug for et produktark, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes det i PDF-form på [cobirehab.com](http://cobirehab.com), som kan skaleres op i skriftstørrelsen.



Transporter set forfra.

Transport kørestol er udstyret med 24" drivhjul, som gør at kørestolen kan drives frem af både bruger og plejepersonale.

Totalbredden med standard armlæn er 78 cm, hvilket gør, at kørestolen kan komme igennem de fleste døråbninger.

Kontakt os gerne på 7025 2522 for råd og vejledning inden bestilling.

### Kontraindikationer

Der er ingen kontraindikationer forbundet med brugen af produktet.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på 7025 2522 eller på [cobi@cobi.dk](mailto:cobi@cobi.dk), hvis du ønsker flere oplysninger om Transporter kørestol.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.



Transporter med kurv til personlige ejendele.

## Konstruktion

Transporter kørestol er en bariatrisk kørestol, som kan drives frem af både bruger og plejepersonale.

Tanken bag designet er nem ind- og udstigning og sikkerhed.

### Drivhjul

De 24" store drivhjul gør stolen nemmere og mere retningsstabil at køre med for plejepersonalet.

Transporter kørestol har en sædebredde på 71 cm og et 5 cm højt PU-skumsæde.

### Robuste fodstøtter

Fodstøtterne kan bære op til 100 kg hver og kan indstilles i højde og i bredde, op til et ydre mål på 110 cm. Derved opnår brugere med meget væv på indersiden af låret en bedre komfort. Fodstøtterne er belagt med PU-skum.

### Funktionelle armlæn

Bariatriske brugere har ofte store mængder væv under armene og kan derfor have svært ved at føre armene langt nok tilbage til at få fat i armlænet på en almindelig kørestol, når de skal sætte sig. Derfor er armlænene på Transporter gjort ekstra lange.

Armlænene har en længde på 64 cm og stikker 7 cm frem foran siddefladen. På den måde får bruger nemt fat på armlænet og kan sætte sig

sikkert i kørestolen. Det giver tryghed for både plejepersonalet og bruger.

Armlænene er aftagelige og kan desuden svinges ud til siderne.

### Ryglæn med frigang

Under ryglænet er der en meget stor frigang ned til sædet, hvilket gør væv i glutealregionen kan stikke bagud. Herved opnås støtte i ryggen. Det giver samtidig plejepersonalet mulighed for at række ind efter et sejl for at kunne placere bruger korrekt.

### Håndbrems

Kørestolen er udstyret med to parkeringsbrems, én på hver side. Parkeringsbremsene sidder på den øverste ramme. Bremsen aktiveres med hånden og kan tilgås af både bruger og plejepersonale.

Kørestolen skal altid være bremsset ved ind- og udstigning.

## Rengøring

Kørestolens stel, sæde, skubbehåndtag og ryglæn skal rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

### Desinficering

Kørestolens stel, sæde, armlæn og ryglæn kan også desinficeres med fx ethanol 70 % eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

## Opbevaring og transport

Når Transporter ikke er i brug, bør den opbevares tørt og i temperaturer mellem -10° – 50°C. Dette gælder også ved langtidsopbevaring.

Opbevar desuden Transporter mørkt og dækket af et tæppe eller lignende.

### Transport

Transporter er (uden bruger) egnet til land- og/eller lufttransport. Kørestolen tåler at blive løftet op i rammen, hvis den skal transporteres uden bruger i et køretøj.

Transporter må ikke fastspændes og bruges som passagersæde i motoriseret køretøj.

## Specifikationer

|                                                                                                                                |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Maksimum brugervægt                                                                                                            | 325 kg                                            |
| Sædebredde med standard armlæn                                                                                                 | 710 mm                                            |
| Totalbredde med standard armlæn                                                                                                | 780 mm                                            |
| Sædedybde                                                                                                                      | 560 mm                                            |
| Sædehøjde                                                                                                                      | 550 mm                                            |
| Ryghøjde                                                                                                                       | 320-520 mm                                        |
| Afstand fra sæde til fodstøtter                                                                                                | 400-420-440-460-480 mm                            |
| Fodstøtter breddejustérbare (totalbredde ændres)                                                                               | 580-1100 mm                                       |
| Afstand fra gulv til skubbebøjle                                                                                               | 1000 mm                                           |
| Afstand mellem armlæn                                                                                                          | 540 mm                                            |
| Afstand fra gulv til underside af sæde                                                                                         | 445 mm                                            |
| Totallængde                                                                                                                    | 1290 mm                                           |
| Vægt                                                                                                                           | 30 kg                                             |
| Hjul                                                                                                                           | Ø125 mm, faste, punkterfrie, med parkeringsbremse |
| Sæde/ryg/armlæn                                                                                                                | Polyuretan                                        |
| Ramme                                                                                                                          | Pulverlakeret krom molybdæn stål                  |
| Fodstøttebelægning                                                                                                             | PU-skum                                           |
| Estimeret levetid                                                                                                              | 7 år                                              |
| ISO-klassifikation                                                                                                             | ISO 12 22 1805                                    |
| Risikoklasse                                                                                                                   | I                                                 |
| Grundlæggende UDI                                                                                                              | 5740000100004N2                                   |
| Risikovurdering                                                                                                                | EN/ISO 14971 : 2012                               |
| Generelle krav og prøvningsmetoder                                                                                             | EN/ISO 10535 : 1998, AS/NZS 3973 : 2009, EN 12182 |
| Overfladetemperaturen på Transporter kan stige eller falde, hvis kørestolen udsættes for eksterne kulde og varme påvirkninger. |                                                   |

## Bestilling og tilbehør

| Model/Sædebredde/Sædedybde            | Varenummer   |
|---------------------------------------|--------------|
| Transporter kørestol/ 71 cm/ 56 cm    | 0182-071-000 |
| <b>Tilbehør</b>                       |              |
| Iltflaske Ø10 cm og dropstativ        | 0100-999-021 |
| IV holder                             | 0100-999-025 |
| Fodstøtte standard justerbar, højre   | 0100-999-010 |
| Fodstøtte standard justerbar, venstre | 0100-999-011 |
| Stokkeholder                          | 0100-999-021 |



**COBI REHAB<sup>®</sup>**  
The Positioning Company

---

**FORHANDLER OG  
FABRIKANT**

**Cobi Rehab**  
Silovej 16-18  
2690 Karlslunde  
Danmark

+45 7025 2522

[cobirehab.com](http://cobirehab.com)